

FENDERWEDGE®



Suojaa ja separoi

INDIKAATIOT

Hampaan suojaaminen ja separointi preparoinnin ajan

TOIMINTA

FenderWedge on teräslevyn ja muovisen kiilan yhdistelmä. Asettamalla hampaan väliin se tarjoaa suojan ikenelle ja separoi hampaita, helpottaen matriisin vientiä

KÄYTTÖ

FenderWedge voidaan asettaa bukkaalisesti tai linguaalisesti. Sitä on saatavana neljää värikoodattua kokoa. fenderWedge tulee asettaa paikoilleen kevyttä tasaista voimaa käyttäen, jolloin se on stabiili koko preparoinnin ajan.

FENDERPREP™



Uutuus!

Suojaa isojen preparaatioiden aikana

INDIKAATIOT

FenderPrep suojaa viereistä hammasta ja ympäröivää ientä kaikissa merkittävässä preparoinneissa, kuten kruunut, laminaatit ja inlayt.

TOIMINTA

FenderPrep on kiilan ja metallilevyn yhdistelmä. Siinä on ohut "venemäinen kärki", joka mahdollistaa sen asettamisen tiiviisti approksimaalisesti, samanaikaisesti suojaen ientä vahingoittumiselta.

KÄYTTÖ

FenderPrep voidaan käyttää sekä bukkaalisesti että linguaalisesti. Teräslevy on perforoitu mahdollistaen sen taivuttamisen ennen asettamista, jolloin se nojaa viereistä hammasta vasten tarjoten paremman tilan ja näkyvän, säästään aikaa ja lisäksi turvallisuutta.

FENDERMATE®



Matriisi II-luokan yhdistelmämuovitäytteille

INDIKAATIOT

Sektorimatriisi pieniin ja keskisuuriin luokan II muovitäytteisiin, sopii ylipuoleen kaikista luokan II täytteistä.

TOIMINTA

FenderMate sektorimatriisin ja kiilan yhdistelmä, jonka muoto helpottaa paikoilleen asettamista. Matriisin kaareva muoto mahdollistaa tiukan kontaktin. Matriisin muoto mahdollistaa luonnollisen kontaktin.

KÄYTTÖ

FenderMate on suunniteltu käytettäväksi joko bukkaalisesti tai linguaalisesti. FenderMate on saatavana kahta eri kiila kokoa.

FENDERPRIME™



Uutuus!

Suoja ja matriisi maitohampaille

INDIKAATIOT

Preparointisuoja ja sektorimatriisin uniikki yhdistelmä luokan II täytteisiin maitohampaissa. FenderPrime mahdollistaa nopean, helpon ja turvallisen täyteen maitohampaissa.

TOIMINTA

FenderPrime on muovinen kiila metallisella levyllä, joka asetetaan approksimaalisesti. "Venemäinen muoto" kärjessä mahdollistaa sen asettamisen tiiviisti ientä vaurioittamatta ja pienentää verenvuotoa. Ennen täyteen tekoa voidaan taivuttaa hampaan muotoon.

KÄYTTÖ

FenderPrime on saatavana kahtena kokona, lyhyt ja pitkä. Tarvittaessa voidaan varmistaa hammaslangalla.

FenderWedge - Suojaa ja separoi

Large



Medium



Small



X-Small



FenderPrep - suojaa isojen preparaatioiden aikana

Regular



FenderMate - matriisi II-luokan yhdistelmämuovitäytteille

Left Regular



Left Narrow



Right Regular



Right Narrow



FenderPrime - Suoja ja matriisi maitohampaille

Long



Short



3401-1111 © Directa AB


FenderWedge® (Registered design) and FenderMate® (Registered Design and Patent pending) are registered trademarks owned by Directa AB.

DIRECTA AB P.O. Box 723, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Tel: +46 8 506 505 75, Fax: +46 8 590 306 30, info@directadental.com, www.directadental.com

DIRECTA
Design by Dentists


FENDERWEDGE®

Suojaa ja separoi

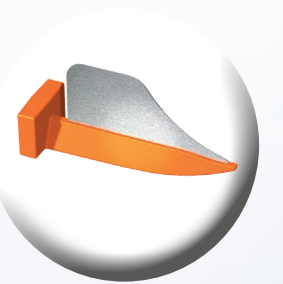


FENDERPREP™

Suojaa isojen preparaatioiden aikana

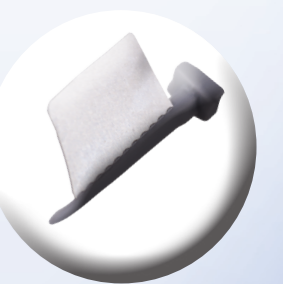


FENDERPRIME™

Suoja ja matriisi maitohampaille

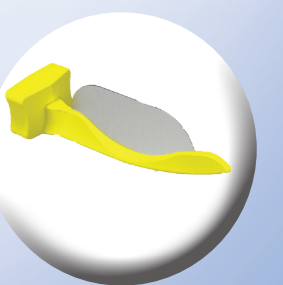

FENDERMATE®

Matriisi II-luokan yhdistelmämuovitäytteille

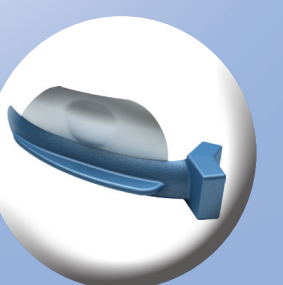


HAMMASVÄLINE

FENDERWEDGE




Suoja ja separoi

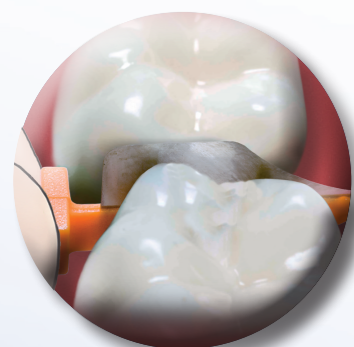

Asetetaan kuin kiila



Separoi preparoinnin aikana.
Pysyy paikoillaan.

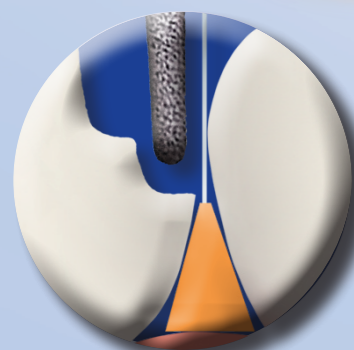

Suojaa viereistä hammasta



FenderWedge käytön jälkeen


FENDERPREP

Uutuus!



Suojaa hammasta ja ientä preparoinnin aikana




Taivuta levyä pois päin
preparoinnista ennen asettamista

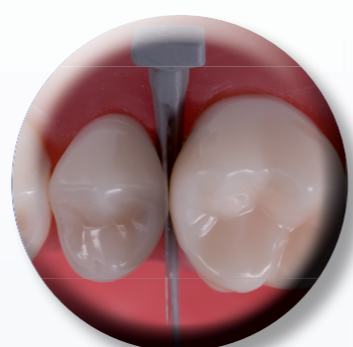

...bukkaalisesti tai linguaalisesti

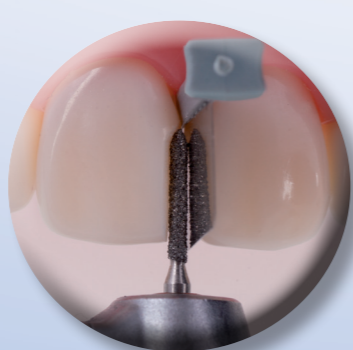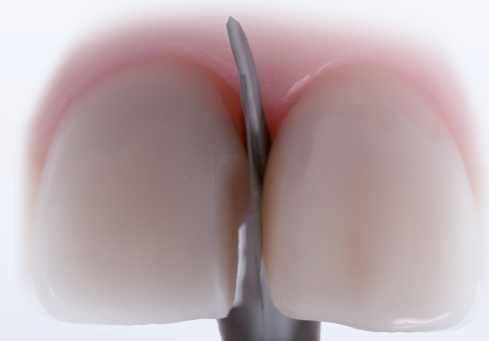


Suojaa viereistä hammasta
preparoidessa...

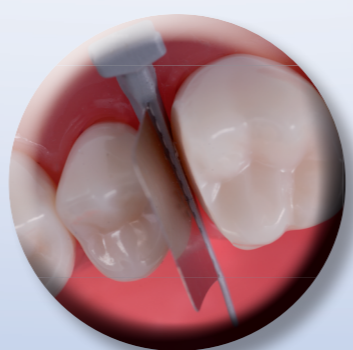

... ja ientä

FENDERMATE


Matriisi

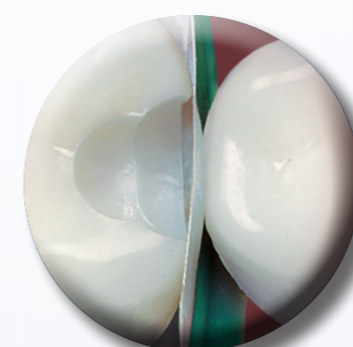

Taipuu paikoilleen



Matriisin kaareva muoto
aikaansaa luonnollisen
kontaktin

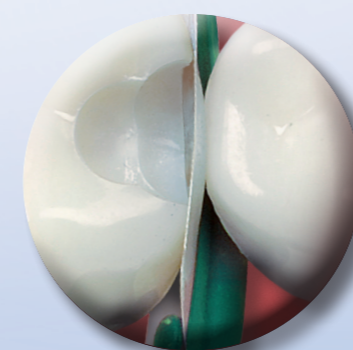

Tiivis kervikaalisesti, ei ylimääriä




Joustava siipi separoi ja täyttää
kervikaalisesti


FENDERPRIME

Uutuus!


Suoja ja matriisi maitohampaille

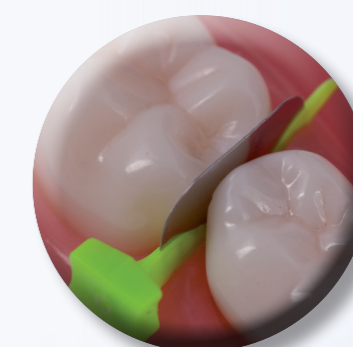


Aseta bukkalisesti tai linguaalisesti

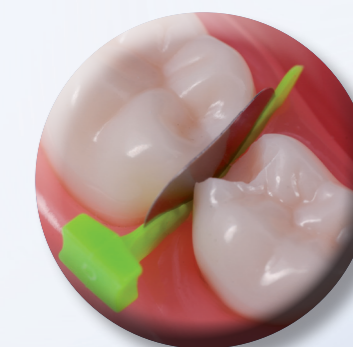

Suojaa preparoinnin aikana
naapurihammasta ja ientä

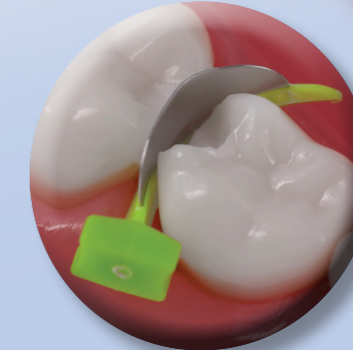

Taivutettava matriisi

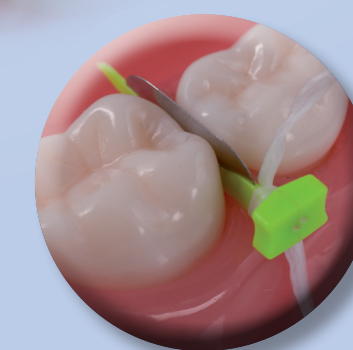

Voidaan varmistaa hammaslangalla