

Pinnat ja välineet

Klorilli

Erikoisdesinfektioaine



Käyttöalue

Klorilli on orgaanista klooriyhdistettä sisältävä pesevä erikoisdesinfektioaine terveydenhoidolliselle käyttöalueelle käsittäen desinfiävän puhdistuksen, instrumentti- ja välinedesinfektion sekä eritetahradesinfektion myös eristystilanteissa.

Pintadesinfektio	Instrumenttidesinfektio	Veri- ja eritetahradesinfektio
x	x	x

Ominaisuudet

Klorillin biosidisena tehoaineena on nestemäinen klooriamiini T. Valmisteen sisältämä orgaaninen klooriyhdiste tuhoaa tehokkaasti bakteereja, viruksia ja sieniä. Tuotteella on erinomainen lianirrotuskyky. Korkea pH pitää klooriyhdisteen sidotussa muodossa, valmisteen hajuttomana ja säilyvyyden hyvänä. Orgaaninen materiaali, lika ja mikrobit saavat pH:n alenemaan ja kloorin vapautumaan.

Klorilli Erikoisdesinfektioaineen teho on tutkittu Hjelt-Instituutin Kansanterveystieteen osaston Hygienian ja mikrobiologian laboratoriossa EN 13697 (bakteerit ja sienet) tutkimuksella ja Kjellanderin testillä sekä Kelsey-Sykes tutkimuksella (vrt. EN 1276, KYS).

Käyttöohje

Klorillin käyttö- ja laimennusohjeet	ppm	%	Klorilli	Vesi	Vaikutusaika	Huom!
Pintojen puhdistus ja desinfektio / pyyhintä (saniteetti-, huolto- ja keittiötilat)	200 500 1000	1 3 5	10 ml 30 ml 50 ml	9,9 dl 9,7 dl 9,5 dl		Myös hammashuoltoon
Eritetahradesinfektio	500-1000 5000	3-5 25	30-50 ml 2,5 dl	9,7-9,5 dl 7,5 dl		2-vaiheinen 1-vaiheinen
Välinedesinfektio / upotus, eristys (pintapyyhintä)	2000 5000	10 25	100 ml 2,5 dl	9 dl 7,5 dl	2 h 1 h	Huuhdellaan. Pintapyyhinnässä vaikutusaika on työhön käytetty aika
Creutzfeldt-Jakob	20000	100	10 dl	0 dl	1 h 2 h	Eritetahrat Välineet, (ennen konepesua)

Klorilli Erikoisdesinfektioaineesta valmistetaan käyttölaimennos puhtaaseen, viileään (+20°C) veteen. Käytä suojakäsineitä. Mittaa vesi ja Klorilli. Noudata ohjeeksi annettuja liotusaikoja. Välineliotuksessa tee uusi käyttölaimennos 1-2 kertaa viikossa. Eristystilanteissa tee laimennos jokaista käyttökertaa varten.

Puhdas käyttölaimennos säilyy 4 viikkoa suljetussa astiassa ja käytettäessä One System Basic pyyhepakkausta.

Välinedesinfektiossa Klorilli Erikoisdesinfektioainetta suositellaan silloin, kun desinfioivan pesukoneen käyttö ei ole mahdollista.

Laimennusohjeita ja liotusaikoja noudattamalla, huolellisella huuhtomisella ja kuivaamisella minimoidaan korroosiovaikutuksia. Vältä roiskeita ja liian märkiä työskentelytapoja. Varmista, että käsiteltävä materiaali kestää kyseistä desinfektioainetta. Käytä asianmukaisia suojaimia.

Huomioitavaa

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Koostumus

Anionsia tensidejä	< 5 %	pesutehoste
Dinatriummetasilikaatti	< 5 %	korroosiosuoja
Klooriamiini T	5-15 %	biosidi

Aktiiviklooripitoisuus 2 % = 20 000 ppm

pH

Tuotteen pH 13,1
Käyttöliuoksen pH 12,0

Varastointi

Huoneenlämmössä 2 v.

Valmistusmaa

Suomi

Käyttö- ja ympäristö- turvallisuus

Tuote on biologisesti hajoava. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelppoinen ja poltettava materiaali.

Pakkauskoko/ Tuotekoodi

	KiiltoClean	GTIN	Sailab
6x1 l pullo	8109	6417964 08109 1	20070222
3x5 l kanisteri	8110	6417964 08110 7	20070222

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.