



PINTOJEN PUHDISTUS JA DESINFEKTIO

EASYDES

PESEVÄ PINTADESINFEKTIOAINE



Käyttöalue

Easydes on mikrobisidisesti tehokas, käyttövalmis ja nopeavaikutteinen lääkinnällisten laitteiden ja välineiden sekä infektioiden torjunnan kannalta kriittisten pintojen pesevä pintadesinfektioaine. Easydes sopii kaikille alkoholeja sietäville materiaaleille. Se sopii useimmille muovimateriaaleille myös hammashuollon osa-alueella.

Ominaisuudet

Easydes on etanolipohjainen desinfektioaineseos, joka sisältää peseviä aineosia. Easydes on mikrobisidisesti laajatehoinen, nopeavaikutteinen sekä orgaanista räsytystä kestävä. Easydes tuhoaa tehokkaasti bakteerit, virukset ja sienet. Desinfektioehto saavutetaan myös näkyvästi kontaminoituneilla pinnoilla. Easydes poistaa hyvin lian ja rasvan. Tuotteen mikrobisidinen teho on tutkittu: EN 13697 (bakteerit ja sienet, myös modifioitu testi desinfektiopyyhkeille), EN 13727 ja EN 13713 bakterisidinen teho, myös MRSA-kannat, EN 14348 (mykobakteerit M. terrae ja M. avum), EN 1650 fungisidinen teho sekä virusidisen tehon testit EN 14476 (adenovirus), BVDV ja vaccinia. Myös teho norovirukseen on todennettu (30s).

Käyttöohje

Easydes pesevä desinfektioaine on käyttövalmis liuos. Annostelu: Kostuta pinnan pyyhinnässä käytettävä taitos/siivousliina desinfektioaineella. Huomioi riittävä kosteus. Pyyhi desinfioitava laite/alue huolellisesti. Odota, että alkoholi on haihtunut pinnalta ennen laitteen seuraavaa käyttöönottoa.

Noudata laitevalmistajien puhdistus- ja desinfiointiohjeita.

Huomioitavaa

Käytä suojakäsineitä. Ei saa käyttää kuumille pinnoille. Syttyvää. Clostridium difficile epidemioissa suosittelemme käytettäväksi Klorilli tai Erisan Oxy+ desinfektioainetta, sillä alkoholipohjaiset tuotteet eivät tuhoa bakteeri-itiöitä.

Koostumus

Etanoli	55-60 p-%	biosidi
Tertiäärinen butanoli	< 2 %	denaturointiaine
Kvaternäärinen ammoniumkloridi	< 0,5 %	biosidi, puhdistusteho
Alkyyliamiini	< 0,5 %	biosidi

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas neste

pH tiivisteessä

10,0

Varastointi

Huoneenlämmössä 3 v.

Valmistusmaa

Suomi



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi



Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on kierrätyskelppoinen ja poltettava materiaali.
Käytetyt kertakäyttöpyyhkeet ovat energiajätettä tai sairaalajätettä.

		Kiiltoclean	EAN	Sailab
Pakkauskoko /	15x150 ml suihkepullo	8221	641260 008221 0	20070223
Tuotekoodi	6x500 ml pullo	8081	641260 008081 0	20070223
	3x5 l kanisteri	8082	641260 008082 7	20070223
	16 x 16 kpl pyyhkepakkaus	8285	641796 408285 2	20070223

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.

06/13



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi