



VÄLINEHUOLTO

HYDRAGEL

ESIKÄSITTELYAINE INSTRUMENTEILLE



Käyttöalue

Hydragel on kontaminoituneiden instrumenttien esikäsittelytuote tilanteisiin, joissa instrumentteja ei pestä välittömästi käytön jälkeen. Tuote estää lian kuivumisen instrumenttien pintaan ja mikrobien lisääntymisen.

Ominaisuudet

Hydragel sumutetaan kontaminoituneiden instrumenttien päälle. Helposti levittyvä geelimäinen suihke muodostaa instrumenttien pinnalle mikrobeja läpäisemättömän pinnan. Geelikalvo estää lian kuivumisen kiinni instrumentteihin sekä mikrobien lisääntymisen ja leviämisen. Vaikutus kestää 5 vrk. Hydragel on vesiliukoinen ja huuhtoutuu hyvin instrumenttien pinnalta. Tuotetta voidaan käyttää tarvittaessa myös pesutehosteena hankalasti puhdistuville instrumenteille. Sisältää vaahdonestoainetta. Sopii yleisesti käytössä oleville materiaaleille, ei kuparille ja messingille. Tuotteen bakteriostaattinen vaikutus on tutkittu Helsingin yliopiston Hjelt-Instituutin Kansanterveystieteen osaston Hygienian ja mikrobiologian laboratoriossa.

Käyttöohje

Sumuta Hydragel esikäsittelyainetta kuljetuslaatikossa olevien instrumenttien päälle. Kostuta instrumentit geelillä huolellisesti. Noudata turvallisia työtapoja instrumenttien säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Pese instrumentit normaaliin tapaan.

Huomioitavaa

Roiskeet lattialla saattavat aiheuttaa liukkaita. Puhdistus vedellä.

Koostumus

Rasvahappojen alkanoliaminosisuola	5-15 %	geelinmuodostaja
Glykoleja	5-15 %	kuivumisen estoaine
Ionittomia tensidejä	< 5 %	pesuaktiivinen aine
Bentsyylihemifformaali	< 0,1 %	säilöntäaine

Ulkonäkö ja tuoksu pH tiivisteessä

Kirkas kellertävä opaalinen neste, mäntyöljyn tuoksu
Tuotteen pH 9,0

Varastointi

Säilytettävä alle 28 °C lämpötilassa. Säilyy 3 v. valmistusajankohdasta.

Valmistusmaa

Suomi

Käyttö- ja ympäristö- turvallisuus

Tuote on biologisesti hajoava. Raaka-aineet ovat ympäristömyönteisiä.

Pakkauskoko/ tuotekoodi

6x750 ml suihkepullo	KiiltoClean 8222	EAN 641260 008222 7	Sailab 20080421
----------------------	---------------------	------------------------	--------------------

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.

