


## LM-LiftOut -luksaattorit

### Käyttö

LM-LiftOut -instrumentin avulla hampaanpoisto voidaan suorittaa mahdollisimman atraumaattisesti. Tämä on tärkeää nopean paranemisen ja mahdollisen myöhemmän implantoinnin mahdollistamiseksi. Instrumentin ohut kärki viedään parodontaalirakoon ja hivutetaan kohti juuren apikaalista osaa, samalla edestakaisin hellävaroen kiertäen. LM-LiftOut ei sovellu vipuamiseen.



### Taivutukset ja koot

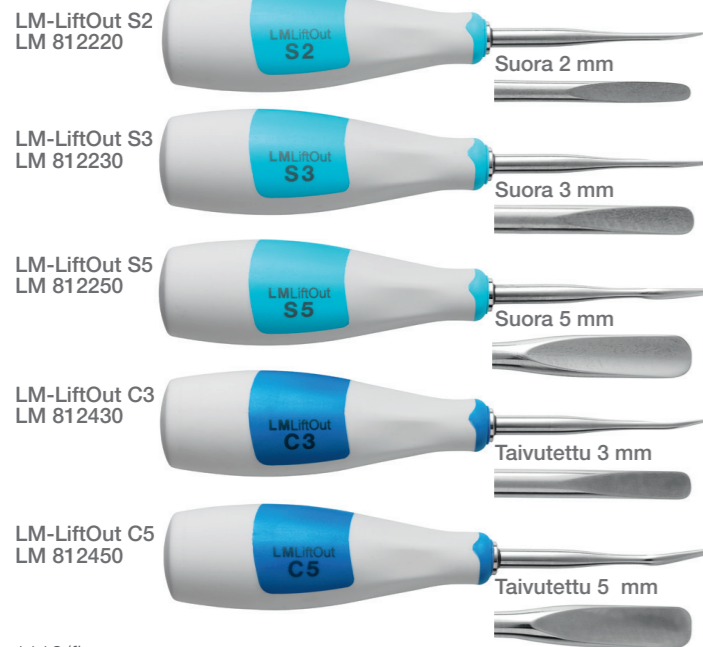


## LM-TwistOut -vivut

### Käyttö

LM-TwistOut -instrumentti soveltuu hampaiden poistoon tilanteissa, joissa voimankäyttö ja vipuliikkeet ovat tarpeellisia.



### Taivutukset ja koot

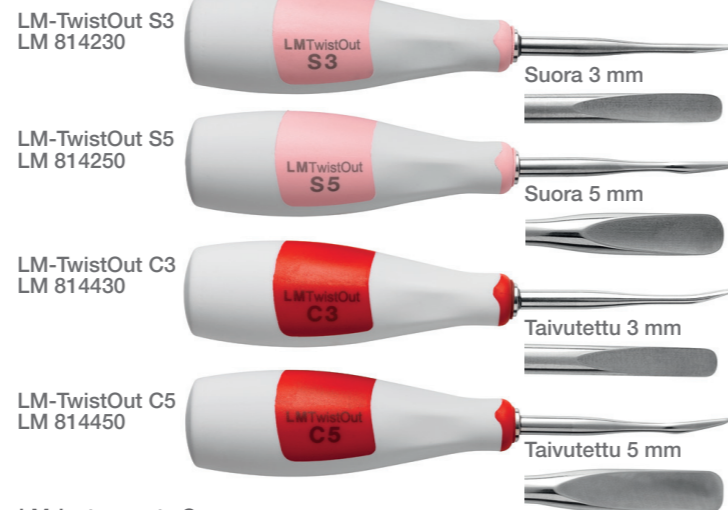

LM-Instruments Oy  
PL 88 (Norrbyn rantatie 8)  
FI-21601 Parainen  
Tel. +358 2 4546 400  
Fax +358 2 4546 444  
info@lminstruments.com  
www.lminstruments.com

Hammastarvikeliikkeistä

LM LiftOut & LM TwistOut



LM

feel the  
difference

Puhtia & pitoa poistoihin

## LM LiftOut

– luksaattorit atraumaattisiin poistoihin

- Ergonominen muotoilu – istuu käteen & helppo pyörittää
- Pitävä LM-ErgoTouch -pinta – lipsumaton & kevyt ote
- Hyvin tasapainotettu – kontrolloitu ote
- Kevyt – vähentää käden rasitusta
- Selkeä värikoodaus – helppo tunnistaa
- LM-DuraGradeMAX -superteräs – vahvat ja terävät työosat
- Terän tiivis liitos – hygieeninen



## LM TwistOut

– vivut kun tarvitset voimaa



### Kätevä huolttaa

#### Suojakasetti

LM-LiftOut ja LM-TwistOut -instrumentit toimitetaan kätevässä kasetissa, joka suojaa sekä instrumenttia että käsittelijää huoltokierron aikana. Kasetissa steriloitu instrumentti ei puhko pussia ja pysyy näin varmemmin steriilinä. Kasetin voi värikoodata.

#### Teroituskivi LM 818002

LM-DuraGradeMax -superteräksestä valmistetut ja käsin viimeistellyt terät pysyvät pitkään terävinä ja ovat oikein käytettynä ja huollettuna pitkäikäisiä. Teroita poistoinstrumentit silloin tällöin pyöreällä teroituskivellä. Se on yksinkertainen ja nopea tapa pitää ne parhaassa terässä ja aina käyttövalmiina.

Tuttua LM-ergonomiaa ja tuntoherkyttä nyt poistoinstrumenteissa