

Kätevä huoltaa

#### Kasetti LM 810001

LM poistoinstrumentit toimitetaan kätevässä kasetissa, joka suojaa sekä instrumenttia että käsittelijää huoltokierron aikana. Kasetissa steriloitu instrumentti ei puhko pussia ja pysyy näin varmemmin steriilinä. Kasetin voi värikoodata.



#### Teroituskivi LM 818002



LM-DuraGradeMax -superteräksestä valmistetut ja käsin viimeistellyt terät pysyvät pitkään terävinä ja ovat oikein käytettynä ja huollettuna pitkäikäisiä. Teroita poistoinstrumentit silloin tällöin pyöreällä teroituskivellä. Se on yksinkertainen ja nopea tapa pitää ne parhaassa terässä ja aina käyttövalmiina.

#### LMDental

LM-Instruments Oy  
PL 88 (Norrbyn rantatie 8)  
FI-21601 Parainen  
Tel. +358 2 4546 400  
Fax +358 2 4546 444  
info@lm-dental.com  
www.lm-dental.com

## Sirunpoistoinstrumentit

#### Root Tip Pick LM 769-771 XSI

- juurenkärjen ja – sirujen poistoon
- sopii hyvin vaikeasti ulotuttaviin paikkoihin
- saatavana vain LM-ErgoMax (XSI) kahvalla



#### LM-RootOut LM 812210

- sopii hienovaraiseen juurensirun poistoon
- ei suositeltavaa käyttää voimaa vaativiin juurensirujen poistoon
- muistuttaa Heidbrink – sirunpoistajaa
- ergonomisesti muotoiltu kahva takaa pitävän otteen



Hammastarvikeliikkeistä



M1066FI 05/2013 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

# LM SlimLift



Atraumaattinen luksointi

LM


feel the  
difference

## LM SlimLift

Luksointi-instrumentit atraumaattiseen poistoon ahtaissa raoissa

LM-SlimLift – luksointi-instrumentit on suunniteltu sopimaan erityisesti ahtaisiin paikkoihin joihin perinteisillä luksointi-instrumenteilla ei pääse. Tämä mahdollistaa atraumaattisen hampaanpoiston ja edesauttaa kudoksen paranemisen nopeasti. Erittäin ohueksi muotoiltu instrumentin terä asetetaan kapeaan parodontaalirakoon ja hitaasti hivutetaan kohti juuren kärkeä edestakaisella liikkeellä. LM-SlimLift ei sovellu vipuamiseen.

Terän erittäin ohut muotoilu mahdollistaa mitä atraumaattisimmat poistot.

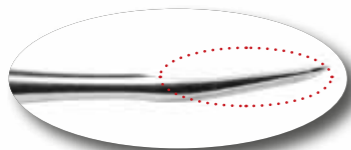

- Ergonominen muotoilu – istuu käteen & helppo pyörittää
- Pitävä LM-ErgoTouch -pinta – lipsumaton & kevyt ote
- Hyvin tasapainotettu – kontrolloitu ote
- Kevyt – vähentää käden rasitusta
- Selkeä värikoodaus – helppo tunnistaa
- LM-DuraGradeMAX -superteräs – vahvat ja terävät työosat
- Terän tiivis liitos – hygieeninen



### Taivutukset ja koot

LM-SlimLift S3  
LM 812630



Suora 3 mm

LM-SlimLift S4  
LM 812640



Suora 4 mm

LM-SlimLift S5  
LM 812650



Suora 5 mm

LM-SlimLift C3  
LM 812830



Taivutettu 3 mm

LM-SlimLift C4  
LM 812840



Taivutettu 4 mm

LM-SlimLift C5  
LM 812850



Taivutettu 5 mm