

DENTIRO® Wipes

- Erinomainen materiaali yhteensopivuus
- Ei jätä jäämiä kuivuessaan
- Kaksi pyyhe kokoa / Kolme tuoksua

DENTIRO® Wipes it ovat käyttövalmiita, kostutettuja nopeaan desinfiointiin ja puhdistukseen lääkintälaitteiden pienille pinnoille tarkoitettuja pyyhkeitä (esim. instrumenteille, instrumenttipöydälle, imuletkuille, käsi- ja kulmakappaleille, valaisinvarsille ja lääkintälaitteille, jotka on tehty PVC:stä, silikonista, muovista, akryyllilasista, alumiinista tai kuparista.) Korkea saturaatio mahdollistaa helpon ja tehokkaan käytön jokaiselle DENTIRO® Wipes pyyhkeelle. Erittäin alhainen alkoholipitoisuus, alle 50% vähentää allergiariskiä ja samalla lisää materiaalisopivuutta. DENTIRO® Wipes it ovat aldehyditömiä ja biologisesti hajoavia.



Käyttö



Ennen käyttöä, avaa täyttöpussi, vedä ensimmäinen pyyhe käyttötölkkin tähti-muotoisen kannen läpi ja laita sen jälkeen käyttötölkkin kansi kiinni. Vedä pyyhkeitä sivuttain käyttötölkistä. Varmista, että desinfioitava kohde on kokonaan kostea ja jätä aine vaikuttamaan. Käytä ainoastaan alkoholia kestäville kohteille. Herkät materiaalit on testattava laittamalla ainetta pienelle huomaamattomalle alueelle. Sulje käyttötölkkin kansi joka käyttökerran jälkeen.



Käyttöalue



- Nopeaan desinfiointiin ja puhdistukseen lääkintälaitteiden pienille pinnoille tarkoitettuja pyyhkeitä, esim. instrumenteille, instrumenttipöydälle, imuletkuille, käsi- ja kulmakappaleille, valaisinvarsille ja lääkintälaitteille, jotka on tehty PVC:stä, silikonista, muovista, akryylilasista, alumiinista tai kuparista jne

Toimitus tyyppi



Tölkki 120 pyyhettä, Täyttö 120 pyyhettä
Tuoksut: Classic, Floral ja Lemon

Jumbo tölkki 100 pyyhettä, Jumbo täyttö
100 pyyhettä
Tuoksut: Classic ja Lemon



EFFECTIVE SPECTRUM / EXPOSURE TIMES

Bactericide	30 seconds
Fungicide	30 seconds
Tuberculocide	30 seconds
MRSA (1)	30 seconds
Hepatitis B / HIV (2)	2 minutes
Hepatitis C (3)	30 seconds
Coronavirus (SARS) (4)	30 seconds

1) Multidrug resistant *Staphylococcus aureus*; 2) HBsAg antigen test; 3) BVDV surrogate virus test; 4) BCoV surrogate virus test

Complies with DGHM Standard Methods and AFNOR NF T 72170, EN 1040 and EN 1275 (*C. albicans*); DGHM / VAH listed



Composition in 100 g

31.3 g Ethanol, 16.7 g 2-Propanol, Surfactants.