

PEAK™ SE PRIMER

Itse-etsaava



Black Mini Brush-kärki

AINUTLAATUISET EDUT

- Tuore, stabiili kemiallinen koostumus
- Helppo yksikerrostekniikka
- Miellyttävä ja tarkka vienti
- Sekoituskuppeja tai harjoja ei tarvita

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

Peak SE Primer on itse-etsaava primeri, joka sekoitetaan ja annostellaan ainutlaatuisella JetMix-ruiskulla. JetMix-tekniikka pitää erillään tarkat määrät vahvaa (1,2 pH) happoa ja primerin estäen hydrolyyttisen hajoamisen, jota tapahtuu muissa itse-etsaustekniikoissa. Komponentit pysyvät erillään siihen asti, kunnes hammaslääkäri aktivoi ne. Peak SE Primeria käytetään Peak LC Bondin kanssa, ja sen sidoslujuus on ylivoimainen. Käyttö: kaikkiin valokovetteisiin sidostustoimenpiteisiin ihanteellisesti soveltuvana itse-etsaavaa Peak-sidostusjärjestelmää voidaan käyttää myös välittömän dentiinin suojaamiseen ennen jäljennöksiä ja väliaikaistäytteitä post-operatiivisen ja semen-

toinin aiheuttaman sensitiivisyyden vähentämiseksi. Toimii hyvin laminaattien sidostamisessa.

PAKKAUSKOOT

PEAK SE PRIMER -täyttöpakkaus


Tuotenro 06870 | Valm. koodi 5135

4 kpl Peak SE Primer -ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 18 kk. Säilytetään jääkaapissa.

JETMIX™-ruisku


Aina tuore. Aina sopiva konsistenssi. Aina luja. Estää sidosresiinin hydrolyysiä varmistaen lujan sidoksen koko käyttöiän.

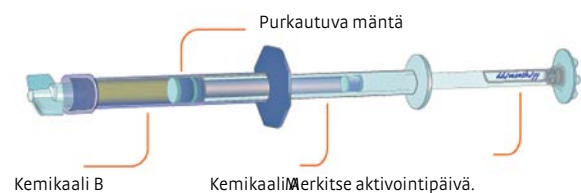

Kemikaali B Kemikaali A Merkitse aktivointipäivä.



Purkautuvan männän kalvopallot paineen räjähtävät sitten sekoittaen tarkasti vahvat kemikaalit.

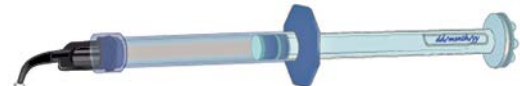

Tarkasti sekoitettu kemikaali säilyy 30 vuorokauden ajan.

1 www.realityesthetics.com 2 Ultramorphological evaluation of enamel etching. M. VARGAS. Iowa College of Dentistry. August 2007. 3 AADR Abstract ID 0825, Dallas 2008. Bond Strengths of Self-Etching Bonding Systems to Dentin and Enamel. U. S. and Int'l Patents Granted and Pending.