

VISCOSTAT® CLEAR

25 % alumiinikloridi



Metal DI -kärki



Blue Mini DI -kärki

AINUTLAATUISET EDUT

- Pysäyttää vähäisen vuodon esteettisellä alueella
- Ei jäämiä eikä värjäymiä, huuhtoutuu helposti
- Helppo asettaa
- Paksu mutta levittyvä geeli

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

ViscoStat Clear on 25-prosenttinen alumiinikloridgeeli viskosisessa, vesipitoisessa liuottimessa. Sen pH on noin 1. Patentoitu kudosturvallinen piikoostumus eliminoi väliaikaisesti vähäisen vuodon saaden aikaan kollageenin turpoamisen kapillaarien päissä ja sulkien siten kapillaarit. Hyytymää ei muodostu eikä hemostaasijäämä tartu preparointiin, mikä on erityisen tärkeää "esteettisellä vyöhykkeellä". ViscoStat Clear ei värjää kova- tai pehmytkudoksia. ViscoStat Clearia käytetään ienreunan hemostaasin aikaansaamiseen hammaslääketieteellisissä toimenpiteissä, mm. seuraavissa: jäljentäminen, väliaikaisten ja pysyvien restaaraatioiden istutus, kaviteettien täyttäminen ja kofferdamin asettaminen.

PAKKAUSKOOT

VISCOSTAT CLEAR DENTO INFUSOR Indispense -pakkaus

Valm. koodi 6407

1 kpl ViscoStat Clear Indispense -ruisku, 30 ml

20 kpl Metal Dento-Infusor -kärkiä

20 kpl tyhjää ruiskua, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 18 kk

VISCOSTAT CLEAR Indispense -täyttöpakkaus

Tuotenro 11565 | Valm. koodi 6408

1 kpl ViscoStat Clear Indispense -ruisku, 30 ml

Säilyvyysaika: 18 kk

VISCOSTAT CLEAR -KÄYTTÖOHJE



1. Subgingivaalinen preparointi ja vuotava ientasku. Hiero hemostaasiainetta voimakkaasti vuotavaa kudosta vasten.



2. Painele Ultrapak-lanka ientaskussa olevaan geeliin hammaspreparoinnin ympärille. Jätä se paikalleen 4–5 minuutiksi.



3. Poista lanka. Huuhtele voimakkaalla ilma-vesisuihkulla. Kuivaa ilmapuustilla. Hiero geeliä ientaskuun uudelleen. Anna vaikuttaa minuutin ajan.



4. Lopuksi huuhtele ja kuivaa sekä ota jäljennös. Toista vaiheet tarvittaessa.