

COMPOSITE WETTING RESIN

Yhdistelmämuovin kostutusresiini



Inspirial Brush -kärki



AINUTLAATUISET EDUT

- Helpottaa yhdistelmämuovin täppäämistä
- Ei haittaa polymeroitumista
- Kostuttaa kuivan yhdistelmämuovin muotoilun aikana

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

Composite Wetting Resin on 45 % fillereitä sisältävä valokoveteinen nestemäinen resiini. Se on huomattavasti parempi kuin yksikomponenttiset sidosaineet, jotka sisältävät liuottimia ja haittaavat polymeroitumista.

Composite Wetting Resiniä käytetään yhdistelmämuovimateriaalien kerrostamisessa. Suositellaan käytettäväksi silloin, kun happi-inhibitiokerros on poistettu tai häiriintynyt (esim. yhdistelmämuovin pinnan peseminen kontaminaation jälkeen). Yhdistelmämuovin kostutusresiiniä voidaan laittaa yhdistelmämuovin pinnalle, jos tämä on kuivunut muotoilemisen aikana. Käytä instrumenttia tai harjaa liukkauden lisäämiseksi. Helpottaa huomattavasti yhdistelmämuovitäyteen täppäämistä ja muotoilua.

PAKKAUSKOOT

COMPOSITE WETTING RESIN -täyttöpakkaus

Tuotenro 35562 | Valm. koodi 3059

2 kpl Composite Wetting Resin-ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 40 kk. Säilytetään jääkaapissa.