

ORASEAL®

Tiivistysaine ja putty



AINUTLAATUISET EDUT

OraSeal -tiivistys- ja pinnoitemateriaali kiinnittyy tehokkaasti kosteaan kofferdamkumiin, kosteaan ienkudokseen ja limakalvoon, kosteisiin hampaisiin, metalleihin jne. – jopa veden ja syljen läsnä ollessa!

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

OraSeal-tiivistysainetta käytetään, kun riittävä tiiviys on vaikea saada aikaan hampaissa ja/tai juurenpinnoissa. Sillä voidaan korjata myös kofferdamkumin vuotoja. Se tiivistää kofferdamin tehtäessä posliinin korjausta ja suojattaessa ientä fluorivetyhapolta. Annostellaan allemenoihin, implanttipalkkien ja tarkkuuskiinnikkeiden alle jne., jotta kylmäakryyli jäljennösmateriaali ei pääsisi tukkimaan tyhjiä tiloja. Kiskojen ja siltojen ikenepuoleiset kolot täytetään pysyvän sementoinnin ylimäärien puhdistuksen helpottamiseksi. Jotkut käyttävät mieluummin jäykempää OraSeal Puttya.

PAKKAUSKOOT

ORASEAL-pakkaus

Tuotenro 84894 | Valm. koodi 352

2 kpl OraSeal Caulking -ruiskuja

2 kpl OraSeal Putty -ruiskua, 1,2 ml

4 kpl Black Mini -kärkiä

20 kpl White Mac -kärkiä

Säilyvyysaika: 24 kk

ORASEAL-täyttöpakkaukset

Tuotenro 80833 | Valm. koodi 351

4 kpl OraSeal Caulking -ruiskuja, 1,2 ml

Tuotenro 80832 | Valm. koodi 353

4 kpl OraSeal Putty-ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 24 kk

ORASEAL-säästöpakkaukset

Valm. koodi 354 | 20 kpl OraSeal Caulking -ruiskuja, 1,2 ml

Valm. koodi 355 | 20 kpl OraSeal Putty -ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 24 kk

1 www.realityesthetics.com | 2 | Cohen S, Burns RC. Pathways of the Pulp Seventh Edition. Mosby, 1998 pp 123-124

ORASEAL-KÄYTTÖOHJE



OraSeal sulkee kofferdamkumin vuodot jopa upotettuna. Annostellaan reunan ympäri ja sitten ristiin rastiin reian päälle levittämällä OraSealia kunnes sulku on valmis.



OraSeal-tiivistysaine annostellaan mustalla Mini-kärjellä tai valkoisella Mac-kärjellä kofferdamin vuotamisen estämiseksi hoidon aikana². Materiaali muotoillaan käsin kädessä kostealla sormella, kostealla harsotaitoksella tai instrumentilla. Toimenpidettä puhtaalla, kuivalla alueella.



Varmistaa kofferdamin tiiviyn käytettäessä voimakasta peroksidia valkaisuun tai etsattaessa posliinia fluorivetyhapolla.



Proteettisen implanttiklipin alla ja ympärillä olevat allemenot tukitaan puttylla. Pinteen taipuisa osa peitetään puttylla pinteen taipumisen mukauttamiseksi jäljennöslusikan asettamisen ja poistamisen aikana.



Kosteuden hallinta pitää varmistaa sidostettaessa alahampaiden oikomisbraketteja. Sulje aukko tiivistysaineella tai puttylla estääksesi sylkeä tihkumasta aukkojen läpi ja kontaminoimasta aluetta.



Sulje laajat interproksimaalitalat, jolloin jäljennös irtaoo helposti ja vääristymättä.



Laita puttya kiinteiden osaproteesien tai implanttipalkkien alle ennen jäljennöksen ottoa.



Käytä puttya tukkimisaineena ennen kiinnikkeiden, pinteiden jne. ankkuroimista kylmäakryyliä.