

ENDOREZ[®] ACCELERATOR

Kiihdytin

AINUTLAATUISET EDUT

- Nopeuttaa EndoREZin polymeroitumista
- Mahdollistaa nastapreparoinnin samalla käynnillä

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

EndoREZ Accelerator lyhentää EndoREZin kovettumisaikaa 20–30 minuutista n. 5 minuuttiin, minkä jälkeen voidaan heti aloittaa korjaava toimenpide ja kruunun pysyvä restauraatio. Suunniteltu käytettäväksi yhdessä EndoREZin kanssa luotettavan juurentäytön aikaansaamiseksi ja hoitoajan lyhentämiseksi.

PAKKAUSKOOT

ENDOREZ ACCELERATOR, kertakäyttöiset ampullit

Tuotenro 99800 | Valm. koodi 399 | 20 kpl

Säilyvyysaika: 18 kk. Säilytetään jääkaapissa.



Vie EndoREZ Accelerator kanavaan tiivistysnastan avulla.



Nastapilarin rakentaminen tai muun restauraation valmistus voidaan aloittaa jo viiden minuutin kuluttua.




ENDOREZ ACCELERATOR -KÄYTTÖOHJE



1. Sovita EndoREZ-nastat kanavan pituuteen. Tarkista röntgenkuvalla.



2. Kuivaa kanava kapillaarikärjellä ja Luer-vakuumiadapterilla ja sen jälkeen paperinastoilla pitämällä kutakin nastaa 1–2 s (nastojen tulee olla kosteita 1–3 mm kärjestä). Sovita päänastaa kanavaan varmistaen, että se menee apikaaliseen ka-ventumaan asti.

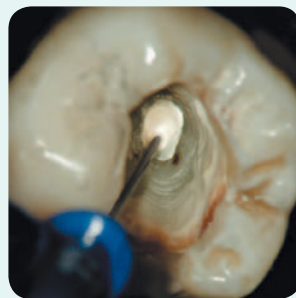

3. Vie kärki 2–4 mm:n päähän apeksista NaviTip-kärjellä tai Skini-ruiskulla, joka on täytetty EndoREZillä. Purista EndoREZiä ulos vetäen ruiskua samalla ulospäin, kunnes näet EndoREZin kanavan yläosassa. Ilmakuilien välttämiseksi pidä kärjen pää EndoREZin sisässä ulosvetämisen aikana.



4. Vie resiniinipäällysteiset EndoREZ-guttaperkkapäänastat sovitettuun pituuteen. 25 on suositeltava tiivistysnastojen määrä. EndoREZ kovettuu kanavassa noin 20–30 minuutissa. Poista ylimääräinen guttaperkka ja korjaa kruunun osa. EndoREZ edistää lateraalikondensaatio- ja kuumaguttaperkkatekniikkaa.

HUOMIOITAVAA! Toisin kuin muut juurentäyttöjärjestelmät EndoREZ on helpompi korjata heti tai tehdä uudelleen, jos et ole tyytyväinen täyttöpituuteen. Suosittelemme, että otat tarkistusröntgenkuvan ennen juurentäytteen poistamista. Jos haluat kuitenkin pidentää tai lyhentää täyttöä, poista täyte ja tee se uudelleen.