

Hyvä Blueprint alginaatin käyttäjä,

Olemme uudistaneet Blueprint alginaattia ja uusi Blueprint® x-creme tarjoaa uusia mahdollisuuksia sinulle:

- Pehmeämpi koostumus; helpompi asettelu lusikkaan ja tasaisempi pinta jäljennökseen.
- Runsaasti aikaa asettaa jäljennöslusikka suuhun.
- Pidempi säilytysaika – jopa 5 päivää.

Alta löydät muutamia tärkeitä vinkkejä uutta Blueprint x-crèmeä koskien:

Blueprint® x-creme – käsittelyohjeet

1. Käytä aina kannelistä säilytysastia- ja käännä se ylösalaisin kahdesti ennen käyttöä, jotta alginaattijauhe on ilmastavasti astiassa (älä koskaan käytä jauhetta suoraan pussista).



2. Ota jauhetta mitta-kevyesti, painamatta sitä.

3. Huomio uusi sekoitus-, työskentely- ja kovetus aika

- a. Sekoita enintään 30 sekuntia. Uuden Blueprintin® koostumus on erilainen – pehmeämpi – etkä saa pehmeämpää koostumusta pidentämällä sekoitusaikaa (silloin on olemassa riski, että seokseen tulee ilmakuplia).
- b. Sekoituksen jälkeen sinulla on **noin minuutti** aikaa asettaa seos jäljennöslusikkaan, ja valmistella potilas, ennenkuin laitat lusikan potilaan suuhun. Näin toimimalla kovetus aika suussa on vain n. 1 minuutti.



< 30 sekuntia



< 1 minuutti



> 1 minuutti

2 minuuttia 30 sekuntia

Kysymyksiä ja vastauksia

Voiko vanhoja Blueprint Cremix mittoja käyttää uuteen Blueprint x- crèmeen?

Kyllä, jauhe/vesi mitat ovat samat. Uusi lusikka on 25 ml, vanha 24 ml, mutta todellisuudessa ne ovat samankokoiset.

Voinko vaikuttaa kovetusaikaan veden lämpötilalla?

Kyllä, lämpimällä vedellä saat hieman nopeamman kovettumisaajan.