



#### TYÖSKENTELEYVAIHEET:

1. Aseta valmiiksi muotoiltu matriisi approksimaaliväliin.
2. Vie kiila ienrajaan.
3. Venytä pihdillä jousi ja aseta se paikoilleen matriisin viereen.
4. Tarvittaessa muotoile nauha viereistä hammasta vasten.
5. Laajemmissa kaviteeteissa aseta jousi kiilan toiselle puolelle.
6. MOD-täytteissä aseta ensin standardi jousi ja sitten päällimmäiseksi jousi, jossa pidemmät ulokkeet.