

GC G-Bond

Yksikomponenttinen Itse-etsaava Valokovetteinen
Sidosaine

GC G-Bond

KÄYTTÖOHJEET

1. Käyttö

1. Sekoita G-BOND pullo huolellisesti.
2. Annostele muutama tippa puhtaalle annostelualustalle
3. Sulje pullonkorkki välittömästi käytön jälkeen, koska aine sisältää haihtuvaa liuotinta.
4. Annostele sidosaine VÄLITTÖMÄSTI leikatuille kiille- ja dentiinipinnoille käyttämällä micro-tip venttikärkeä.
5. Jätä koskemattomaksi 10 sekunnin ajaksi.
6. Kuivaa sen jälkeen huolellisesti öljyvapaalla MAKSIMI ilmanpaineella 5 sekunnin ajan. Käytä vakuumi imua sidosaineen roiskumisen välttämiseksi

Lopputuloksen pitäisi olla ohut karkea sidosainekerros joka muistuttaa huurteista lasia eikä liiku näkyvästi ilmanpaineella puhallettaessa.

Fig. 1

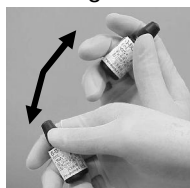


Fig. 2

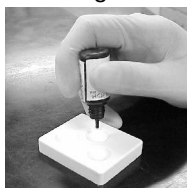


Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6

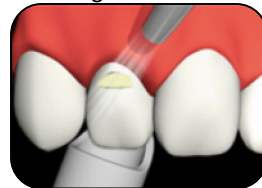

Huomaa:

1. Leikkaamattomat kiille- ja dentiinipinnat pitää käsitellä 35-40% fosforihappo etsausgeelillä, huuhdella vedellä ja kuivata kevyesti ennen G BOND:n käyttöä.
2. Poista ylimäärät muualta hampaanpinnoilta (ei sidostettavilta pinnoilta)puuvilla pelletillä tms., koska ylimäärät on hankala poistaa valokovetuksen jälkeen.
3. Jos annosteltu materiaali on kontaminoitunut veden, syljen tai veren kanssa ennen valokovetusta, huuhtelee ja kuivaa hammas ja toista käsittely annostelemalla materiaali uudestaan.

Fig. 7

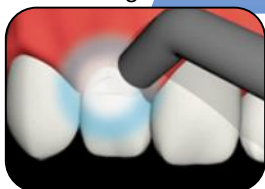

2. Valokovetus

Valokoveta kovettajalla joka käyttää näkyvää valoa

Halogen (700 mW/cm ²)	10 sekuntia
Plasma Arc (2000 mW/cm ²)	3 sekuntia
LED (700 mW/cm ²)	10 sekuntia

Jos valokärki on kauempana kuin 10 mm kovetevasta pinnasta, kovetusaika täytyy kaksinkertaistaa.

3. Valokovetteisten muovien ja kompomeerien vienti

Seuraa valmistajien käyttöohjeita, muotoile ja valokoveta valittu täytemateriaali.

4. Pakkaukset

002277	Starter Kit, Pullo (5ml pullo, 50 micro-tip aplikaattoria, 1 micro-tip varsi, 1 annostelualusta)
002302	Starter Kit, Unit Dose (50 x 0.1ml unit doses, 50 micro-tip aplikaattoria)



GC EUROPE N.V. Interleuvenlaan 13, 3001 Leuven, Belgium



Huomaa:

1. Älä käytä kemiallisesti kovettuvien muovien kanssa.
2. Älä käytä eugenolia sisältävien materiaalien tai desensitizerssien kanssa, koska ne voivat estää materiaalin kovettumisen tai sidostumisen.
3. Käytettynä kaksoiskovetteisten kiinnityssementtien ja pilarinrakennus materiaalien kanssa valokoveta kaksoiskovetteinen yhdistelmämuovi erikseen. Itsestään kovettuminen aiheuttaa keltomman sidoksen

Säilytys: Jos materiaalia ei käytetä pitkään aikaan, säilytetään jääkaapissa, muuten huoneenlämmössä (1 – 28°C).

Säilyvyysaika: 2 vuotta valmistuspäivämäärästä.



GC EUROPE N.V. Interleuvenlaan 13, 3001 Leuven, Belgium