

# Flexitime®

A-silikoni Vinyylipolysiloksaani.

Kaikki **Flexitime®** tuotteet sekoitetaan suhteessa 1 : 1 (Volyymi tai paino).

## Käytännön vihjeitä

**Flexitime®** tuotteet sopivat erinomaisesti yhdessä käytettäväksi. Erilaiset jäljennöstekniikka-vaihtoehdot mahdollistavat aina onnistuneen jäljennöksen. Emme suosittele niitä käytettäväksi muiden silikoniaineiden kanssa.

**Purkit korkit on kierrettävä huolellisesti paikalleen. Älä vaihda kansien, korkkien, lusikoiden oikeaa paikkaa. Kun käytät CD annostelupatruunoja ruiskuta vähän materiaalia ennen sekoituskärjen asettamista. Käytön jälkeen jätä sekoituskärki suojaksi. Välittömästi ennen seuraavaa käyttöä hiukan materiaalia painetaan uudelleen ulos ja sekoituskanyyli korvataan uudella.**

Kaikissa A-silikoni aineissa voi ilmetä kovettumisongelmia jos ne joutuvat kontaktiin latex-käsineitten, ientaskulankojen nesteiden tai juuri tehtyjen yhdistelmä-muovi täytteiden kanssa.

- Mallien valmistus:**

Valu tulee suorittaa aikaisintaan 15 min. jäljennöksen otosta. Muita aikarajoituksia ei ole. Kestää pitkän varastoinnin.
- Suositus mallimateriaaliksi:**

Kaikkia kaupallisesti saatavia materiaaleja voidaan käyttää.  
Suosittelemme:  
Luokan III kipsi, MOLDANO®  
Luokan IV kipsi, MOLDASTONE®, MOLDASYNTH®
- Elektrogalvanisointi:**

Jäljennökset voidaan pinnoittaa kuparilla tai hopealla käyttämällä tavanomaisia pinnoitusmenetelmiä.
- Desinfiointi:**

Jäljennökset voidaan käsitellä 2% glutaraldehydi-liuoksella ajan. Muita elastomeerien desinfiointiin tarkoitettuja aineita käytetään valmistajien ohjeiden mukaan.
- Liiman käyttö:**

Suositlemme Universal Adhesive liimaa.
- Varastointi:**

Ei varastointia yli 25°C lämpötilassa.

## Käyttöohje

| Flexitime®   | EN 24823                                 | Tuotteen väri  |                | Sekoitus aika | Kokonais-työstöaika* | Vähimmäis-suussapito-aika | Sitoutumis-aika | Shore A kovuus | Suurin mahd. muodon-muutos paineen alla | Palautus alkutilaan muodon-muutoksen jälkeen | Lineaarinen mitan-muutos (kuts-tuminen) |
|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                          | Perusmassa     | Katalysaatti   | s             | min : ssa            | min : ssa                 | min : ssa       |                | %                                       | %                                            | %                                       |
| Easy Putty   | Tyyppi 0 muovail-tava                    | violetti       | vaale-anharmaa | 45            | 2 : 30               | 2 : 30                    | 3 : 45 - 5 : 00 | 70             | 1,8                                     | 99,7                                         | 0,20                                    |
| Heavy Tray   | Tyyppi 1 jäykkäjuok-suinen               | violetti       | vaale-anharmaa | –             | 2 : 30               | 2 : 30                    | 3 : 30 - 5 : 00 | 72             | 1,6                                     | 99,0                                         | 0,18                                    |
| Mono Phase   | Tyyppi 2 medium konsistenssi keskijäykkä | violetti       | vaale-anharmaa | –             | 2 : 30               | 2 : 30                    | 3 : 30 - 5 : 00 | 58             | 2,6                                     | 98,8                                         | 0,20                                    |
| Correct Flow | Tyyppi 3 helppojuok-flytende             | vaale-anvihreä | vaale-anharmaa | –             | 2 : 30               | 2 : 30                    | 3 : 30 - 5 : 00 | 42             | 4,6                                     | 99,6                                         | 0,11                                    |

\*huoneenlämmössä 23°C, (50 ± 5) % suhteellinen kosteus. Korkeampi lämpötila lyhentää, alempi pidentää näitä aikoja.

Käyttötekniinen neuvonantomme suullisesti ja kirjallisesti ja kokeilemalla saatu tapahtuu parhaan ymmärryksen mukaan. Neuvot ovat kuitenkin vain sitoutumaton ohje, myös mahdollisten suojaoikeuksien suhteen kolmansien taholta, eivätkä ne vapauta toimittamiemme tuotteiden käyttäjää suorittamasta omia kokeilujaan tuotteen sopivuuden suhteen käytettäviin menetelmiin ja tarkoituksiin. Meillä ei ole mahdollisuutta valvoa tuotteiden käyttöä ja käsittelyä, mistä syystä käyttäjä yksin kantaa vastuun. Takaamme tietenkin tuotteidemme moitteettoman laadun yleisissä myynti- ja toimitusehdoissamme olevien määräysten mukaan.