

Flexitime®

A-silikonin Vinyylipolysiloksaani.

Kaikki **Flexitime®** tuotteet sekoitetaan suhteessa 1 : 1 (Volyymi tai paino).

Käytännön vihjeitä

Flexitime® tuotteet sopivat erinomaisesti yhdessä käytettäväksi. Erilaiset jäljennöstekniikka-vaihtoehdot mahdollistavat aina onnistuneen jäljennöksen. Emme suosittele niitä käytettäväksi muiden silikonien kanssa.

Käyttöohje

Purkit korkit on kierrettävä huolellisesti paikalleen. Älä vaihda kansien, korkkien, lusikoiden oikeaa paikkaa. Kun käytät CD annostelupatruunoja ruiskuta vähän materiaalia ennen sekoituskärjen asettamista. Käytön jälkeen jätä sekoituskärki suojaksi. Välittömästi ennen seuraavaa käyttöä hiukan materiaalia painetaan uudelleen ulos ja sekoituskanyyli korvataan uudella.

Kaikkissa A-silikonin aineissa voi ilmetä kovettumisongelmia jos ne joutuvat kontaktiin latex-käsineitten, ientaskulankojen nesteiden tai juuri tehtyjen yhdistelmämuovi täytteiden kanssa.

Mallien valmistus: Valu tulee suorittaa aikaisintaan 15 min. jäljennöksen otosta. Muita aikarajoituksia ei ole. Kestää pitkän varastoinnin.

Suositus mallimateriaaliksi: Kaikkia kaupallisesti saatavia materiaaleja voidaan käyttää. Suosittelemme:
Luokan III kipsi, MOLDANO®
Luokan IV kipsi, MOLDASTONE®, MOLDASYNTH®

Elektroalvanisointi: Jäljennökset voidaan pinnoittaa kuparilla tai hopealla käyttämällä tavanomaisia pinnoitusmenetelmiä.

Desinfiointi: Jäljennökset voidaan käsitellä 2% glutaraldehydi-liuoksella ajan. Muita elastomeerien desinfiointiin tarkoitettuja aineita käytetään valmistajien ohjeiden mukaan.

Liiman käyttö: Suosittelemme Universal Adhesive liimaa.

Varastointi: Ei varastointia yli 25°C lämpötilassa.

| Flexitime® | EN 24823 | Tuotteen väri | | Sekoitus-aika | Kokonais-työstö-aika* | Vähimmäis-suussapito-aika | Sitoutumis-aika | Shore A kovuus | Suurin mahd. muodonmuutos paineen alla | Palautus alkutilaan muodonmuutoksen jälkeen | Lineaarinen mitanmuutos (kutistuminen) |
|---------------------|--|----------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|--|---|--|
| | | Perusmassa | Katalysaatti | | | | | | | | |
| Easy Putty | Tyyppi 0 muovailtava | violetti | vaale-anharmaa | 45 | 2 : 30 | 2 : 30 | 3 : 45 - 5 : 00 | 70 | 1,8 | 99,7 | 0,20 |
| Heavy Tray | Tyyppi 1 jäykkäjuoksuinen | violetti | vaale-anharmaa | – | 2 : 30 | 2 : 30 | 3 : 30 - 5 : 00 | 72 | 1,6 | 99,0 | 0,18 |
| Mono Phase | Tyyppi 2 medium konsistenssi keskijäykkä | violetti | vaale-anharmaa | – | 2 : 30 | 2 : 30 | 3 : 30 - 5 : 00 | 58 | 2,6 | 98,8 | 0,20 |
| Correct Flow | Tyyppi 3 helppojuok-flytende | vaale-anvihreä | vaale-anharmaa | – | 2 : 30 | 2 : 30 | 3 : 30 - 5 : 00 | 42 | 4,6 | 99,6 | 0,11 |

*huoneenlämmössä 23°C, (50 ± 5) % suhteellinen kosteus. Korkeampi lämpötila lyhentää, alempi pidentää näitä aikoja.

Käyttökäyttöneuvonantomme suullisesti ja kirjallisesti ja kokeilemalla saatu tapahtuu parhaan ymmärryksen mukaan. Neuvot ovat kuitenkin vain sitoutumaton ohje, myös mahdollisten suoja-ohjeiden kolmansien taholta, eivätkä ne vapautta toimittamiemme tuotteiden käyttäjää suorittamasta omia kokeilujaan tuotteen sopivuuden suhteen käytettäviin menetelmiin ja tarkoituksiin. Meillä ei ole mahdollisuutta valvoa tuotteiden käyttöä ja käsittelyä, mistä syystä käyttäjä yksin kantaa vastuun. Takaamme tietenkin tuotteidemme moitteettoman laadun yleisissä myynti- ja toimitusehdoissamme olevien määräysten mukaan.