

## **OptiBond Solo Plus etsaava sideainepohjuste**

### **Kuvaus**

OptiBond Solo Plus etsaava sideainepohjuste on tarkoitettu käytettäväksi OptiBond Solo Plus -sideaineen tai kaksoiskovettuvan, aktivaattorityyppisen OptiBond Solo Plus -sideaineen kanssa (Unidose- tai pulloannostelu). Kun etsaavaa sideainetta käytetään OptiBond Solo Plusin tai sen aktivaattoriversion kanssa, sillä voidaan sidostaa sekä suoria että epäsuoria restoraatioita. Etsaavan pohjusteen käyttö tekee tarpeettomaksi fosforihappoetsauksen käytön sidostuksessa. Etsaavan pohjusteen etuihin sisältyvät esimerkiksi hoidon jälkeisen herkkyyden väheneminen ja joidenkin sidostuksessa tarvittavien vaiheiden poisjättäminen.

### **Käyttötarkoitukset**

#### **Suora käyttö**

Komposiitti kiilteeseen ja/tai dentiiniin  
Tukien ja ydinten rakentaminen

#### **Epäsuora käyttö**

Posliiniset tai komposiittipäälylytykset  
Posliini- tai komposiittivalutäytteet tai -tiivisteet  
Posliini- tai komposiittikruunut  
Posliini-metallikruunut, sillat

### **Käyttöohjeet**

#### Suorat restoraatiot

#### **Komposiitit**

1. Vie etsauspohjustetta\*\* kiille/dentiinipintaan harjausliikkeellä 15 sekunnin ajan.
2. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
3. Ravista OptiBond Solo Plus -pulloa lyhyesti. Vie OptiBond Solo Plusia kiille/dentiinipintaan kevyellä harjausliikkeellä 15 sekunnin ajan.
4. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
5. Lisää uudelleen OptiBond Solo Plusia kevyellä harjausliikkeellä 15 sekunnin ajan.
6. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
7. Valokoveta 20 sekunnin ajan\*.
8. Aseta komposiitti valmistajan käyttöohjeiden mukaan.

## Epäsuorat restoraatiot

### **Päällysteet**

1. Vie etsauspohjustetta\*\* kiille/dentiinipintaan harjausliikkeellä 15 sekunnin ajan.
2. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
3. Ravista OptiBond Solo Plus -pulloa lyhyesti. Vie OptiBond Solo Plusia kiille/dentiinipintaan kevyellä harjausliikkeellä 15 sekunnin ajan.
4. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
5. Lisää uudelleen OptiBond Solo Plusia kevyellä harjausliikkeellä 15 sekunnin ajan.
6. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
7. Valokoveta 20 sekunnin ajan\*.
8. Vie tiivistyssementtiä päällysteeseen valmistajan käyttöohjeiden mukaan.
9. Valokoveta 20 sekunnin ajan\*.

### **Kruunut, sillat, valutäytteet, tiivisteet ja metallipohjaiset restoraatiot (tiivistesementin kanssa)**

1. Vie etsauspohjustetta\*\* kiille/dentiinipintaan harjausliikkeellä 15 sekunnin ajan.
2. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
3. Ravista OptiBond Solo Plus -pulloa lyhyesti. Annostele yksi tippa OptiBond Solo Plusia ja yksi tippa OptiBond Solo Plus -aktivaattoria kertakäyttöiseen sekoitusaltaaseen. Sekoita 3 sekunnin ajan Kerrin sekoituskärjellä.

**Huomaa:** Jos käytät OptiBond Solo Plus Unidose -pakkauksia, avaa hylsy ja aseta yksi tippa OptiBond Solo Plus -aktivaattoria Unidose-kammioon. Sekoita 3 sekunnin ajan Kerrin sekoituskärjellä.

4. Vie sekoitusta kiille/dentiinipintoihin kevyellä harjausliikkeellä 15 sekunnin ajan niin että kiille/dentiinipinnat peittyvät.
5. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
6. Lisää sekoitusta 15 sekunnin ajan harjausliikkeellä.
7. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
8. Valokoveta 20 sekunnin ajan\*.
9. Vie tiivistyssementtiä restoraatioon valmistajan käyttöohjeiden mukaan.
10. Valokoveta 20 sekunnin ajan\*.

## Tuen ja ytimen sidostaminen

### **Tuet**

1. Vie etsauspohjustetta\*\* kiille/dentiini-, juuri- ja tukipintoihin, harjausliikkeellä 15 sekunnin ajan.
2. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
3. Ravista OptiBond Solo Plus -pulloa lyhyesti. Annostele yksi tippa OptiBond Solo Plusia ja yksi tippa OptiBond Solo Plus -aktivaattoria kertakäyttöiseen sekoitusaltaaseen. Sekoita 3 sekunnin ajan Kerrin sekoituskärjellä.

**Huomaa:** Jos käytät OptiBond Solo Plus Unidose -pakkauksia, avaa hylsy ja aseta yksi tippa OptiBond Solo Plus -aktivaattoria Unidose-kammioon. Sekoita 3 sekunnin ajan Kerrin sekoituskärjellä.

4. Vie sekoitusta kiille/dentiinipintoihin ja tukeen kevyellä harjausliikkeellä 15 sekunnin ajan niin että kiille/dentiinipinnat peittyvät. **ÄLÄ VALOKOVETA.**
5. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
6. Sekoita tiivistyssementti ja vie sitä kiille/dentiinipintaan ja tukeen.
7. Aseta tuki juureen.
8. Poista liika sementti.
9. Valokoveta 20 sekunnin ajan\*.

#### **Ydinmateriaalit**

1. Vie etsauspohjustetta\*\* kiille/dentiinipintaan harjausliikkeellä 15 sekunnin ajan.
2. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
3. Ravista OptiBond Solo Plus -pulloa lyhyesti. Annostele yksi tippa OptiBond Solo Plusia ja yksi tippa OptiBond Solo Plus -aktivaattoria kertakäyttöiseen sekoitusaltaaseen. Sekoita 3 sekunnin ajan Kerrin sekoituskärjellä.

**Huomaa:** Jos käytät OptiBond Solo Plus Unidose -pakkauksia, avaa hylsy ja aseta yksi tippa OptiBond Solo Plus -aktivaattoria Unidose-kammioon. Sekoita 3 sekunnin ajan Kerrin sekoituskärjellä.

4. Vie sekoitusta kiille/dentiinipintoihin kevyellä harjausliikkeellä 15 sekunnin ajan niin että kiille/dentiinipinnat peittyvät.
5. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
6. Lisää sekoitusta 15 sekunnin ajan harjausliikkeellä.
7. Ilmakuivaa 3 sekunnin ajan.
8. Valokoveta 20 sekunnin ajan\*.
9. Aseta ydinmateriaalia valmistajan käyttöohjeiden mukaan.
10. Valokoveta ydin\*.

**\*Suositellut kovetusajat:** Optilux 501 tehostustilassa 10 sekuntia, ramppitilassa 20 sekuntia tai normaalitilassa 20 sekuntia. Katso valmistajan suositusta muille valoille.

**\*\* VAROITUS:** Syövyttävä neste. Vältä kosketusta iholle, silmiin ja pehmeisiin kudoksiin. Jos ainetta pääsee iholle tai silmiin, huuhtelee heti vedellä. Silmien ollessa kyseessä, turvaudu lääkärin apuun. Ei saa nauttia sisäisesti.

**VAROITUS:** Kovettumaton metakrylaattiresiini voi kosketuksesta aiheuttaa ihotulehdusta ja vahingoittaa hammasydintä. Vältä kosketusta iholle, silmiin ja pehmeisiin kudoksiin. Pese hyvin vedellä kosketuksen jälkeen.

### **RAJOITETTU TAKUU KERR-YHTIÖN VASTUURAJOITUS**

Kerr-yhtiön tekninen neuvonanto, sekä suullinen että kirjallinen, on tarkoitettu auttamaan hammaslääkäreitä Kerr-tuotteiden käytössä. Tällaiset neuvot eivät laajenna Kerr-yhtiön rajoitettua takuuta eivätkä vapauta hammaslääkäreitä Kerr-tuotteiden testaamisesta niiden sopivuuden määrittämiseksi tarkoitettuun käyttöön ja menettelytapoihin. Hammaslääkäri omaksuu kaikki riskit ja vastuun vahingoista, jotka voivat aiheutua Kerr-tuotteiden virheellisestä käytöstä.

Jos materiaalissa tai työtavassa on vikaa, Kerr-yhtiön vastuu rajoittuu, yhtiön harkinnan mukaan, viallisen tuotteen tai sen osan vaihtamiseen uuteen, tai viallisen tuotteen ostohinnan palauttamiseen. Tämän rajoitetun takuun hyväksikäyttämistä varten viallinen tuote täytyy palauttaa Kerr-yhtiölle. Kerr ei missään tapauksessa ole vastuussa epäsuorista, sattumanvaraisista tai seurannaisista vahingoista.

**EDELLÄ ESITETTYÄ LUKUUN OTTAMATTA KERR EI ANNA MITÄÄN MUITA TAKUITA, SUORASTI TAI VÄLILLISESTI, MUKAAN LUETTUINA TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT TUOTEKUVAUSTA, LAATUA TAI SOPIVUUTTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.**