




VÄLINEHUOLTO

ERINOX

ERIKOISPESUAINE

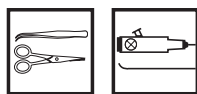

Käyttöalue

Erinox on matalavaahtoinen erikoispesuaine instrumenttien ja hoitovälineistön puhdistukseen.

Ominaisuudet

Erinox sopii hyvin

- ultraäänipesulaitteen pesuaineeksi
- endoskooppien käsin suoritettavaan puhdistukseen
- hoitovälineistön käsin suoritettavaan pesuun
- hammaslääkärin instrumenttien pesuun
- herkän lasitavaran pesuun
- laboratoriovälineiden pesuun

Erinox erikoispesuaine irrottaa tehokkaasti epäpuhtauksia ja rasvalikaa. Se sopii hyvin myös herkkien materiaalien puhdistukseen.

Käyttöohje

Valmista ohjeen mukainen käyttölaimennos Erinox erikoispesuaineesta. Valmis käyttölaimennos vaihdetaan päivittäin. Käsin suoritettavassa puhdistuksessa käyttölaimennos tehdään jokaista huoltotoimenpidettä varten erikseen. Pestyt välineet huuhdellaan ja kuivataan. Aseta välineet väljästi ultraäänipesulaitteeseen. Huuhtelee välineet pesun jälkeen. Tarvittaessa desinfioi välineet ennen pesua.

Huomioitavaa

Käytä suojakäsineitä.

Erinox käyttö- ja laimennosohjeet	%	Erinox	Vesi	Huom!
Ultraäänipesulaitteet				
- päivittäinen pesu	1-2 %	10-20 ml	1 l	vaihdla laimennos 1-2x pv esiliotus tarvittaessa 2 %
- peruspesu	2 %	20 ml	1 l	
Käsin suoritettava pesu				
- endoskoopit	2 %	20 ml	1 l	
- muu välineistö	1-2 %	10-20 ml	1 l	

Koostumus

Ionittomia tensidejä	5-15 %	pesuteho
Anionisia tensidejä	< 5 %	pesuteho
Butyylidiglykoli	< 5 %	rasvaliutin, lisää pesutehokkuutta hankalasti saavutettaviin kohtiin
Trietanolamiini	< 5 %	korroosiosuoja
EDTA	< 5 %	kompleksointiaine

Ulkonäkö ja tuoksu

pH

Varastointi

Valmistusmaa

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Kirkas, kellertävä neste
 Tuotteen pH 10,5. Käyttöliuoksen pH 9
 Huoneenlämmössä 3 v.
 Suomi
 Tuote on biologisesti hajoaava. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyönteinen, täysin kierrätyskelppoinen ja poltettava materiaali.

Pakkauskoko/
tuotekoodi3x5 l kanisteri
6x1 l pullo

KiiltoClean

8114
8113

EAN

641260 008114 5
641260 008113 8

Sailab

20070222
20070222

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.

KiiltoClean_{oy}PL/Box 157, FI-20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi