



GREEN&CLEAN ID N

Instrumenttien desinfiointi

GREEN&CLEAN ID N



1 Tiivisteen annosteluohje
esim. 3 litraan liuosta:
30 ml: pitoisuus 1%
60 ml: pitoisuus 2%
225 ml: pitoisuus 7,5%



2 Täytä altaaseen 3 litraa
kylmää vettä (merkkiin
saakka) ja lisää tiiviste



3 Upota instrumentit
kokonaan liuokseen



4 Peitä allas.
Vaikutusaika
1%: 60 min.
2%: 15 min.
7,5%: 5 min.



5 Huuhtelee instrumentit
hyvin ja kuivaa ne

Upotusdesinfiointi:

- Poista karkea lika instrumenteista ja tarvittaessa pura instrumentit osiin.
- Vaikutusajan laskenta alkaa siitä hetkestä, kun viimeinen instrumentti on upotettu.
- Noudata vaikutusaikaa koskevia ohjeita tarkasti.
- Noudata varovaisuutta käsitellessäsi teräviä esineitä.
- Käytä suojäkäsineitä.

GREEN&CLEAN ID N: Tiiviste instrumenttien ja poranterien desinfiointiin

- poranterien desinfiointiin
- 5 l tiivistettä riittää 500 l käyttöliuosta*
- ruosteenestosuojaus, materiaalien kestävyys testattu
- HBV/HCV/ HIV, Herpes-simplex virus tyyppi 1, bakteerit/sienet, MRSA, tuberkuloosi
- sopii kaikille tavallisille instrumenteille ja poranterille
- mahdollista käyttää ultraäänilaitteessa*
- Karl Storz Endoskope:n ja NTI Kahla:n suosittelema
- DGHM/VAH-listattu, CE 0408

*Huomioi valmistajan antamat annostelua ja vaikutusaikaa koskevat ohjeet!
Suositus: 1%:n liuos, 60 minuutin vaikutusaika (upotusaltaassa).