



GREEN&CLEAN AD

Jäljennösten desinfiointiaine

GREEN&CLEAN AD



1
Huuhtele jäljennös
huolellisesti vedellä
(poista näkyvät
eritteet)



2
Kaada desinfiointiaine
jäljennösten
desinfiointialtaaseen
(ei liian iso)



3
Laita jäljennös
kokonaan
desinfiointiaineeseen



4
Anna vaikuttaa
5 minuuttia



5
Huuhto jäljennös
huolellisesti vedellä

Vinkkejä:

- Huuhtele potilaan suu ennen jäljennöksen ottoa.
- Kiinnitä huomiota valmistajien ohjeisiin (jäljennösaine ja desinfiointiaine) vaikutusajan ja materiaalin yhteensopivuuden suhteen.
- Vaikutusaika ei saa ylittää 5 minuuttia (muotopysyvyys)!
- Sopimus hammaslaboratorion kanssa ehkäisee tupla desinfointia.

GREEN&CLEAN AD: Desinfiointiaine yleisimmille jäljennösaineille

alginaatti, silikoni, polyeetteri, ...

- muotopysyvyys testattu
- HBV/HCV/ HIV, Herpes-simplex virus tyyppi 1, bakteerit/sienet, MRSA, tuberkuloosi
- erinomainen puhdistava vaikutus
- lyhyt vaikutusaika (5 min. kaikille materiaaleille)
- DGHM/VAH listed, CE 0408