

TOP DENT SC Temp C&B Material

Käyttöohjeet

TOP DENT SC Temp C&B Material on fluoresoiva kemiallisesti kovettava pasta-pastajärjestelmä väliaikaisten kruunujen, siltojen, inlayden ja onlayden valmistukseen. **TOP DENT SC Temp C&B Material** koostuu base- ja catalyst-tahnasta.

Käyttöohje:

TOP DENT SC Temp C&B Material SC patruunassa:

Aseta **TOP DENT SC Temp C&B Material** patruuna asianmukaisella männällä varustettuun sekoituspistooliin (4:1/10:1). Teknisistä syistä patruunan säiliön täyttötasot voivat vaihdella. Varmistaaksesi asian, poista patruunasta korkki ja pursota materiaalia ulos, kunnes kummastakin säiliöstä materiaalia pursottautuu ulos tasaisesti ja yhtä paljon. Aseta sekoituskärki patruunan päähän ja lukitse se paikalleen kääntämällä sitä 90 astetta myötäpäivään. Aine työntyy ulos ja sekoittuu automaattisesti oikeassa suhteessa, kun sekoituspistoolin kahvaa puristetaan. Jätä käytön jälkeen sekoituskärki patruunaan ja aseta myöhemmin uusi vanhan tilalle juuri ennen seuraavaa käyttökertaa. Vaihdaessa sekoituskärjet uusiin muista tarkistaa patruunan ulostuloukdot niin, että materiaali pääsee pursottautumaan ulos tasaisesti molemmista aukoista.

Käyttöä koskevia ohjeita:

Tasolta preparaation allemenot ja käytä tarkoitukseen soveltuvaa eugenolitonta sementtiä. Jos etukäteen valmistettuja kruunuja tai vastaavia ei käytetä, on otettava jäljennös.

Valmistele jäljennös täyttämällä allemenot ja leikkaamalla poistumisarvat ylimääräiselle materiaalille. Jos väliaikaisten kruunujen seinämät ovat liian ohuet, suurena jäljennöstä. Poista erityisesti hampaiden välisten syvennyksien väliseinät. Sen jälkeen jäljennös on puhdistettava ja kuivattava.

Lisää **TOP DENT SC Temp C&B Material** materiaali suoraan jäljennökseen. Vältä liikatyötä. **TOP DENT SC Temp C&B Material** saavuttaa elastisen vaiheen 1 - 1,5 min kuluttua sekoittamisen aloittamisesta (suussa noin 0,5 - 1 min). Väliaikainen työ on poistettava suusta viimeistään 1,5 minuutin kuluttua, elastisessa vaiheessa. Kovettumisen etenemistä voidaan lisäksi tarkkailla seuraamalla ylimääräisen aineen kovettumista suussa.

Käyttämättömän materiaalin kovettumisaikaa (sekoituskärjissä) ei voida verrata suussa olevan materiaalin kovettumisaikaan.

Huoneen lämpötilan ollessa 23 °C astetta ja ilman kosteuden ollessa 50 %, materiaalin työskentelyajat ovat seuraavanlaiset:

min:s 0:00	min:s 0:30	min:s 1:00	min:s 1:30	min:s 4:00
applikointi suussa	kovettumisen suussa	poistaminen suusta	täydellinen kovettuminen	viimeistely

Lievää eroa kovettumisaikojen osalta esiintyy eri lämpötilaosuhteista johtuen. Ota väliaikainen työ jäljennöksestä noin 2 - 3 minuutin kuluttua ja pyyhi kuivaksi (tarvittaessa käytä liuotinta, esim. etyylialkoholia). Näin poistuu tavallisesti hapen vaikutuksesta muodostuva ohut inhibitiokerros ja viimeistely on siten helpompaa. Väliaikaisten työn pinnan tulee olla mattasilkkinäinen. Trimmata huolellisesti kaikki ylimääräinen aines ja karhenna ikeniä lähellä olevat alueet. Sementoi väliaikainen työ eugenolitommalla väliaikaisella sementillä.

Indikaatiot/varotoimenpiteet:

- **TOP DENT SC Temp C&B Material** sisältää metakrylaatteja, amiineja, terpienejä, bentsoyyliperoksidia, BHT:tä. **TOP DENT SC Temp C&B Material** ei pitäisi käyttää mikäli on todettuja yliherkkyyksiä (allergioita) kyseisille ainesosille.

- Ennen väliaikaisten valmistamista jo valmiit preparoidut pilarit voidaan eristää desensitioivilla aineilla (esim. fluorilakka)
- Välttääkseen fraktuuroita tai vaurioiden syntymisen ehkäisemiseksi väliaikaista ei pidä altistaa ylimääräisille kuormille (molaarialue).
- Resiiniin pohjaisista materiaaleista tehdyt linerit ja pilarit (yhdistelmämuovi) pitää eristää tarkoin (esim. glyseriini), jotta ne eivät irtaaisi väliaikaisten kappaleen mukana.
- Puutteellinen hygienia tai suuvesien runsas käyttö voi johtaa värimuutoksiin.
- Viimeistely pitäisi aloittaa vasta materiaalin kovettutua täydellisesti (noin 4 min. sekoittamisen aloittamisesta).
- Väliaikainen työ on mahdollista korjata:

Jos väliaikainen työ rikkoutuu **TOP DENT SC Temp C&B Material**in äärimmäisestä stabiilisuudesta huolimatta, suositellaan seuraavia toimenpiteitä:

- Ilmakuplat: täytä **TOP DENT SC Temp C&B Material** materiaallilla.
- Korjaus fraktuuran kohdalla: välittömästi väliaikaisten työn valmistamisen jälkeen voidaan murtuneet kohdat liittää yhteen tuoreella sekoitetulla **TOP DENT SC Temp C&B Material** materiaallilla.
- Korjaus vanhaan, jo käytettyyn väliaikaiseen työhön: karhenna murtuma-alue poralla ja paikallista allemenot. Lisää murtumaalueelle sidosainetta ja koveta käyttöohjeiden mukaisesti. Lisää juoksevaa yhdistelmämuovia preparoiduille alueille, yhdistä murtuneet osat ja koveta käyttöohjeita noudattaen.

Säilytys:

Säilytä 4 °C - 23 °C. Älä käytä viimeisen käyttöpäiväyksen jälkeen.

Säilytä suojattuna kirkaalta valolta esim. suljetuissa pakkauksissa, laatikoissa jne.

Tuotteemme on kehitetty hammaslääketieteelliseen käyttöön. Toimittamiemme tuotteiden käyttöä koskevat suulliset ja/tai kirjalliset tiedot ovat käytössämme olleiden parhaiden tietojemme mukaisia ja ne eivät ole velvoittavia. Antamamme tiedot tai neuvot eivät vapauta käyttäjää arvioimasta toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta aiotuun käyttöön. Koska emme voi valvoa toimittamiemme tuotteiden käyttöä, käyttäjä on itse täysin vastuussa niiden käytöstä. Takaamme luonnollisesti valmisteidemme voimassa olevien standardien mukaisen laadun ja myyntiä sekä jakelua koskevien yleisten sopimusehtojen mukaisuuden.

Last revised: 05/2013

DAB Dental AB

Finvids väg 8
194 47 Upplands Väsby - Sweden

Phone: +46 (0)8 506 505 00
Fax: +46 (0)8 506 505 10
E-mail: kontakt@dabddental.se
www.dabddental.se