

Opal Seal 46587, 46588, 46590, 46577

Fluoria luovuttava primeri ja sidosmuovi 500-060 kit 500-064 kärjet

Tuotteen kuvaus ja käyttöalueet:

Opal Seal on valokovetteinen primeri, jota käytetään kiinnitettäessä oikomiskojeita etsatulle kiilteelle.

Opal Seal sisältää 38 % GI-partikkeleita ja nanotäyteaineita, jotka vapauttavat fluoria oikomishoidon aikana. Kun Opal Sealia on viety hampaan pinnalle, voidaan mustalla UV-valolla valaisemalla nähdä resiinin sisältämä fluori on olemassa.

Toimenpiteet suorassa kiinnityksessä

HUOM! Työskentely leukaneljänneksittäin on suositeltavaa.

- Käsittele kiille
 - Käytä öljytöntä, vesipohjaista hohkakiveä kiilteen pinnan puhdistamiseen
 - Huuhtelee, kuivaa ja eristä etsattava hammas
 - Kiinnitä toiminnallinen kärki 35 %:n etsausgeeliruiskuun
 - Varmista etsin juoksevuus ennen kärjen suuhun vientiä
 - Vie etsi kiilteelle ja jätä paikoilleen 15-30 s.
VAROITUS! Älä päästä etsausgeeliä kontaktiin pehmytkudosten kanssa
 - Huuhtelee ja kuivaan kunnolla sekä eristä uudelleen. Käsitelty kiille näkyy nyt mattana.
- Vie Opal Seal hampaalle
 - Poista ruiskusta korkki ja laita tupsupäinen punainen kärki sen tilalle
 - Tarkista aineen juoksevuus ennen suuhun viemistä kevyesti puristamalla määnästä niin, että kärjen tupsu kostuu. **HUOM!** Jos liikaa ainetta tulee kärkeen, laita ylimäärä lehtiölle.
 - Vie etsatuille kiilteille ohut kerros Opal Sealia siistymällä nopeasti hampaalta toiselle.
 - Kevyesti puhaltamalla kuivaa ja ohenna 2 s per hammas.
VAIHTOEHTO: Ennen braketin laittamista pikavalota Opal Seal 5 s per hammas. Näin estät kiinnikkeen valumisen.
- Vie kiinnitysmuovi braketin verkkopohjaan ja aseta braketti hampaalle.
- Poista muoviylimäärät braketin pohjan ympäriltä.
- Valota muovin ja laitteen valmistajien ohjeiden mukaisesti.

Opal Seal on suunniteltu niin, että sillä käsittely voidaan toistaa oikomishoidon kuluessa. Musta UV-valo paljastaa hampaalla jäljellä olevan aineen.

Toimenpiteet laitettaessa ainetta uudelleen

- Kun kaarilanka on poistettu, varmista kiilteen pinnan olevan vapaa plakista ja ruuanjätteistä.
HUOM! Optimaalisen tuloksen varmistamiseksi, puhdistaa hampaan pinta öljyttömällä, vesiliukoisella hohkakivijauheella.
- Toista vaiheet 1b-f viemällä 35 % fosforihappoa paljaana olevalle kiilteelle braketin ympäriltä ja anna vaikuttaa 15–30 s.
HUOM! Fosforihappokäsittely ei aiheuta kokeiden irtoamista.
- Toista vaiheet 2a-d.
- Valota 10 s per hammas (20 s, jos valolähteen teho on < 600mW/cm²)

Toimenpiteet poistovaiheessa

- Hoidon lopussa jäljellä oleva Opal Seal tulee poistaa uurtteisella poralla tai hiovalla kiillotusporalla varoen kuumentamasta hammasta liikaa.
- Käyttämällä mustaa UV-valolamppua nähdään helposti jäljellä oleva Opal Seal.

VAROITUS:

- Tuotteet on tarkoitettu vain ammattimaiseen käyttöön.
- Tutustu huolella käyttöohjeisiin. Lue varoitukset sekä käyttöturvallisuustiedotteet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista tuotteen juoksevuus ennen ruiskun viemistä suuhun. Mikäli juoksevuus on vaikeaa tai estynyt, vaihda uusi kärki ruiskuun ja varmista juoksevuus uudelleen. Käytä vain suositeltuja kärkiä.
- Hävitä kärjet ja tyhjät ruiskut asianmukaisesti. Kärjet ovat kertakäyttöisiä.
- Sulje ruisku laittamalla alkuperäinen korkki paikalleen sekä desinfioi vaadittavalla tavalla potilaiden välillä.
- Käytä laadukasta valolähdettä tuotteen valotukseen. Alivalottunut resiini on puutteellinen fyysisiltä ominaisuuksiltaan.
- Pidä tuote pois kuumasta ja auringonvalosta.
- Kaikki kiinnitysaineet ja muovit eivät sovi käytettäväksi yhdessä. Testaa ensin käyttämäsi tuotteet, jotka eivät kuulu Ultradentin tai jonkin muun valmistajan samaan tuoteperheeseen.
- Mikäli tuotetta joutuu iholle tai pehmytkudokselle, huuhtelee ihoalue huolella. Allergisten reaktioiden, ihotulehdusten tai ihottuman kehittyessä konsultoi lääkärinä.

HUOM! Käyttöturvallisuustiedotteen sekä lisätietoja Opal Sealista saat Hammasvälineestä tai osoitteesta www.opalorthodontics.com