

VOCO

Provicol /Provicol C/Provicol QM

SF

CE

0482

Käyttöohjeet

standardin EN 23107/ISO 3107/1988
vaatimusten mukainen

Provicol/Provicol C/Provicol QM on eugenoliton kalsiumhydroksidia sisältävä sementti. Sitä on helppo käsitellä ja ei häiritse resiniinipohjaisten täyte- ja kiinnityssementtien kovettumista.

Provicol/Provicol C/Provicol QM sisältää kalsiumhydroksidia auttaakseen hampaan vitaliteetin säilyvyyttä.

Käyttöalueet:

Provicol/Provicol C/Provicol QM

käytetään väliaikaisena kiinnityssementtinä kiinnittämiseen ja eristämiseen pienten yhden pinnan kaviteetteihin.

Käyttötapa:

Provicol QM(QuickMix ruiskussa) :

Poista korkki QuickMix ruiskusta kääntämällä sitä 90 astetta myötäpäivään. Aseta sekoituskärki ruiskun päähän sovittamalla se ensin sopivasti paikoilleen ja sitten lukitsemalla se kääntämällä 90 astetta myötäpäivään. Materiaali sekoittuu automaattisesti sekoituskärjessä ja voidaan annostella suoraan väliaikaiseen kruunuun tai siltaan.

Provicol C(patruunassa):

Aseta **Provicol C**-patruuna **VOCO**-sekoituspistooliin (tyyppi 2) tai muuhun asianmukaisella männällä varustettuun ruiskupuristimeen. Teknisistä syistä kammioiden täyttötasot voivat vaihdella, joten poista patruunasta korkki ja pursota materiaalia ulos kunnes kummastakin kammioista ainetta vapautuu tasaisesti. Aseta ja lukitse sekoituskärki kääntämällä sitä 90 astetta. Aine työntyy ja sekoittuu automaattisesti oikeassa suhteessa, kun ruiskupumpun kahvaa puristetaan. Jätä käytön jälkeen sekoituskärki patruunaan ja aseta myöhemmin uusi vanhan tilalle juuri ennen seuraavaa käyttökertaa. Vaihdettaessa sekoituskärjet uusiin muista tarkistaa patruunan ulostuloaukot, niistämällä niin että materiaali pääsee pursottautumaan ulos tasaisesti molemmista aukoista.

Provicol (tuubeissa) :

Provicolilla työskennellään normaalissa huoneenlämpötilassa(keskim.18-25 C) ja ilman kosteudessa(keskim.45-55%). Matalimmissa lämpötiloissa(käytä viilennettyä lasilevyä sekoittamisessa) työskentelyaika vastaavasti pitenee.

Provicol catalyst ja base pastat sekoitetaan suhteessa 1:1 w/w. Annostele yhtä suuret määrät basea ja catalyst-pastaa tukevalle lasilevylle tai sekoituslualustalle, ei kosteutta imevälle. Sekoita nämä yhtä suuret määrät materiaalia keskenään keskim. 20 sekunnin ajan kunnes materiaali on homogeenistä konsistenssiltaan. Käytä sekoittamisessa muovilaastainta tai ruostumatonta metallilaastainta. Halutessaan materiaalista pehmeämpää ja pitääkseen **Provicol** työstettävänä pidemmän aikaa, lisää pieni määrä vaseliinia. Kovemman ja nopeamman materiaalin aikaansaamiseksi, lisää sinkkioksidia(väliaikainen sealeri)

Applikointi:

Annostele ohut kerros **Provicol/Provicol C/Provicol QM** väliaikaisen kruunun tai sillan sisään ja kiinnitä preparoituun hampaaseen. **Älä kuivaa pilareita, paras kosteuttaa ne hieman vedellä.** **Provicol**in työskentelyaika on 1,5-2 minuuttia, **Provicol C/Provicol QM**:n noin yksi minuutti. Kaikki materiaalit kovettuvat suussa 4-6 minuutissa. Aseta väliaikainen työ suuhun. Poista ylimäärät 3-5 minuutin kuluttua asettelun jälkeen.

Varotoimenpiteet:

Tapauksissa, joissa pulpa on avoin tai heikko dentiinikerros, pulpan suojaus olisi suositeltavaa. **Provicol/Provicol C/Provicol QM** sisältää sinkkioksidia, magnesiumoksidia, kalsiumhydroksidia, rasvahappoja, mod.rosin, kasviöljyjä. Allergiatapauksissa selvennä riskit ennen käyttöä. Pilarien yliherkkyys voidaan vähentää käyttämällä vihlomisen poistoon tarkoitettuja valmisteita(mm.**Bifluorid 5/12**) ennen väliaikaista sementtiä. Poista täysin nämä valmisteet ennen lopullista kiinnittämistä(älä käytä eugenolia sisältäviä valmisteita) Laajoilla pinnoilla ja monipintaisissa kaviteeteissa ja myös pitkäaikaisissa väliaikaisissa töissä pitäisi käyttää kovempaa sementtiä(esim. **VOCO Ionofil Molar** lasi-ionomeeriä)

LISÄOHJEITA:

Kosteus (kosteat pilarit) helpottaa työn poistoa jälkeinpäin. **Provicol/Provicol C/Provicol QM** ylimäärät voidaan poistaa kruunuista helposti kun ne on ensin käsitelty jäähdytys sprayllä.

Säilytä 4°C-23°C:een lämpötilassa.
Käytön jälkeen sulje tuubit tiukasti.

Provicol/Provicol C/Provicol QM ovat standardin EN 23107/ISO 3107 vaatimusten mukaisia.

Jakelupakkaukset:

Provicol QM

Art. No.1074 5 ml QuickMix ruisku,
sekoituskärkiä tyyppiä 10
Art. No.2189 50 kpl sekoituskärkiä
tyyppiä 10

Provicol C

Art.No.1076 2x65 g:n patruunaa,
sekoituskärkiä tyyppi 6
Art. No.2185 50 kpl sekoituskärkiä
tyyppiä 6

Provicol

Art. No. 1075 pakkaus 25 g base, 25 g
catalyst
Art. No. 1078 säästöpakkaus 5 x 25 g
baseä, 5 x 25 g catalystiä tuubeissa

Tuotteemme on kehitetty
hammaslääkintäkäyttöön.
Toimittamiemme tuotteiden käyttöä
koskevat suulliset tai kirjalliset tiedot
ovat käytössämme olleiden tietojen
mukaisia ja ne eivät ole velvoittavia.
Antamamme tiedot tai neuvot eivät
vapauta käyttäjää arvioimasta
toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta
aiottuun käyttöön. Koska emme voi
valvoa toimittamiemme tuotteiden
käyttöä, käyttäjä on itse täysin vastuussa
niiden käytöstä. Takaamme
luonnollisesti valmisteidemme voimassa
olevien standardien mukaisen laadun ja
myyntiä sekä jakelua koskevien yleisten
sopimusehtojen mukaisuuden.