



hydrogum[®]5



HIGH STABILITY ALGINATE IMPRESSION MATERIAL

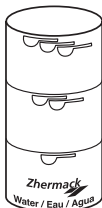

**SPECIFIC MEASURES
FOR Hydrogum5 ONLY!**

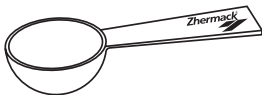

CE

Zhermack[®]
CLINICAL



Zhermack SpA
Via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (Rovigo) - Italy
tel. +39 0425 597611 - fax +39 0425 53596
www.zhermack.com - info@zhermack.com

U113382/D Last Update: 06/2009

Pölyämätön alginaati hampaiden jäljentämiseen.

KLIINISET KÄYTTÖAJAT*

Annostelu	1 lusikallinen jauhetta (7 g) 1: mitta vettä (15 ml)
Sekoitus aika	< 30"
Työskentely aika	1' 5"
Suussapito aika	45"
Tartunta-aika	1' 50"
Työskentely aika yhteensä (ISO 1563)	1' 40"

Ravista pakkausta 2-3 kertaa.

*Kaikki yllämainitut ajat lasketaan siitä eteenpäin, kun jauhe sekoitetaan 23°C/73°F lämpöiseen ionittomaan veteen. Kylmä vesi hidastaa ja lämmin vesi nopeuttaa kovettumista.

Vastaa ADA 18-ISO 1563 säättämiä vaatimuksia.

VAROITUKSIA

Veden kovuus voi vaikuttaa yllämainittuihin aikoihin.

Huuhtelee huolellisesti jäljennöksen ottamisen jälkeen, jotta, sylki saadaan poistettua. Poista liika vesi ja vala heti. Mikäli tämä ei ole mahdollista, säilytä jäljennös ilmatiiviissä pussissa (Long Life Bag Zhermack) 23°C/73°F lämpötilassa. Näissä olosuhteissa kipsin valamista voidaan viivyttää korkeintaan 120 tuntia jäljennöksen otosta.

JÄLJENNÖSLUSIKAN PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

Huuhtelee jäljennöslusikka huolellisesti juoksevilla vedellä, jonka jälkeen voit desinfioida sen välittömästi. Paras mahdollinen desinfiointi saadaan upottamalla jäljennöslusikka **Zeta 7 solution** (Zhermack) liuokseen tai suihkuttamalla sille suoraan **Zeta 7 Spray** suihketta (Zhermack). Noudata valmistajan ohjeita käyttäessäsi muita desinfiointiaineita.

SUOSITELLUT KIPSIT

Tyyppi 3 (Elite Model/Model Fast - Zhermack), Tyyppi 4 (Elite Rock - Zhermack). Säilytä pakkaus suljettuna huoneen lämmössä (5-27°C/41-80°F).

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA: Suullisesti, kirjallisesti tai havainnollisesti annetut tuotteiden käyttöohjeet perustuvat hammaslääketieteellisen teknologian vallitsevaan tilaan ja tietotaitoomme. Niitä ei tule pitää sitovina tietoina (myös muiden osapuolien oikeuksien suhteen), jonka vuoksi käyttäjän tulee tarkistaa henkilökohtaisesti, soveltuuko tuote haluttuun käyttötarkoitukseen. Yrityksellä ei ole mahdollisuutta tarkistaa käyttäjän valitsemaa käyttöä ja käyttötarkoitusta, jolloin ne jäävät käyttäjän vastuulle. Mahdollinen vastuu vaurioista rajoittuu yrityksen toimittamien ja käyttäjän käyttämien tavaroiden arvoon.

AINOASTAAN HAMMASLÄÄKETIETEELLISEEN KÄYTTÖÖN