



Le istruzioni per l'uso del prodotto devono essere conservate per l'intera durata di utilizzo del prodotto stesso. Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti menzionati consultare le rispettive istruzioni per l'uso.

#### Campi d'applicazione

- Tutti i tipi di rilevamento d'impronte, p.e.:
  - corone, ponti, inlay ed onlay
  - impanti
  - rilevi d'impronte ortodontiche

Questi prodotti ad indurimento ultrarapido sono particolarmente adatti a rilevi d'impronte a una o due unità.

#### Avvertenze

##### I pazienti

Questo prodotto contiene sostanze che possono provocare, in soggetti sensibili, una reazione allergica al contatto con la pelle. Evitare l'utilizzo di questo prodotto sui pazienti con allergie note verso il metallo. In caso di contatto prolungato con i tessuti molli orali, disincapaciare con abbondante acqua. Se si verifica una reazione allergica, rimuovere il prodotto e non utilizzarlo più, eventualmente consultare un medico.

#### Per il personale dello studio odontoiatrico

Questo prodotto contiene sostanze che possono provocare, in soggetti sensibili, una reazione allergica al contatto con la pelle. Per ridurre il rischio di reazioni allergiche, evitare il contatto con questi materiali; in particolare il contatto con la pelle non protetta. In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare subito la pelle con acqua e sapone.

Si consiglia di usare guanti protettivi e di non toccare il prodotto con le mani. L'olio di menta può penetrare attraverso i guanti protettivi più comuneamente utilizzati. Se il prodotto viene in contatto con il guanto, rimuovere e buttare il guanto. Lavare immediatamente le mani con acqua e sapone e successivamente indossare un altro guanto. Se si verifica una reazione allergica, consultare eventualmente un medico.

Le schede dati di sicurezza 3M ESPE sono disponibili all'indirizzo [www.mmm.com](http://www.mmm.com) o presso la filiale locale.

#### Preparazione

- Eliminare adeguatamente sottosquadri o setti interdentali per facilitare il distacco dell'impronta dall'arcata dentaria. In caso contrario la rimozione dalla bocca può essere difficile tanto da portare all'estrazione di denti naturali o alla rimozione di protesi esistenti. L'eliminazione dei sottosquadri è particolarmente necessaria per Imprint 4 Penta Putty o per qualsiasi altro materiale da impronta con durezza Shore elevata.
- Portainpronte:** Si possono utilizzare tutti i portainpronte normalmente in commercio per impronte di precisione. Per la tecnica di doppia impronta e quando si usa Imprint 4 Penta Putty sono raccomandati portainpronte rigidi:
  - Per ottenere una sufficiente adesione applicare VPS Tray Adhesive sul portainpronte e lasciare essiccare completamente, tempo ideale 5–15 minuti.

##### Materiale Penta:

- Inserire i sacchetti tubolari Penta™ nella apposita cartuccia Penta™.
- Inserire nel miscelatore Pentamix la cartuccia caricata.
- Applicare una cannuola di miscelazione Penta™ Mixing Tip – Red.
- Portare gli strumenti del miscelatore in linea corsa abbandonati con il volantino. Non esercitare troppa pressione.
- Nel caso di sacchetti tubolari nuovi avviare il processo di miscelazione e fare uscire una piccola quantità di pasta fino ad ottenere un colore omogeneo. Gettarne via questa prima quantità di pasta.
- Per il riempimento del portainpronte consultare la sezione "Rilevazione dell'impronta".

##### Dispenser Garant:

- Inserire la cartuccia del materiale per impronte ad alta viscosità o putty.
- Prima dell'applicazione estrarre il cappuccio e verificare che le due aperture della cartuccia non siano otturate.

Al primo utilizzo delle cartucce fare uscire una piccola quantità di pasta senza cannuola di miscelazione sino a far fuoriuscire una quantità uniforme di pasta base e pasto catalizzatore.

Inserire sulla cartuccia una cannuola di miscelazione Garant verde per misurare il materiale per impronte ad alta viscosità o Medium Body.

Ci sono due possibilità di miscelazione e applicazione dei materiali a bassa viscosità o Medium Body:

1. Per il materiale a bassa viscosità inserire una cannuola di miscelazione Garant gialla sulla cartuccia e un puntale introrale giallo Garant sulla cannuola di miscelazione. Se necessario accorciare il puntale introrale con un bisturi per allargare il foro d'uscita.

2. Utilizzare una siringa introrale verde 3M ESPE. Leggere la seguente sezione.

Per quanto riguarda l'ulteriore procedura, consultare la sezione "Rilevazione dell'impronta".

#### 3M ESPE Intra-oral Syringe – Green

La siringa introrale verde può essere utilizzata per l'applicazione del materiale di impronte in VPS attorno alle preparazioni ai sensi della ISO 4823 tipo 3 e per i materiali da impronte in VPS di tipo 2.

Preparare il dispenser Garant con la cartuccia inserita (vedi Preparazione – Dispenser Garant).

Preparare una siringa introrale verde e rimuovere gli stantuffi. Lasciare la cannuola di miscelazione della siringa introrale in una posizione chiusa, non aperta.

Inserire la siringa introrale sulle aperture della cartuccia e tenerla ben ferma.

Con il dispenser Garant, riempire con il materiale da impronta quanto necessario, tuttavia al massimo fino alla linea di contrassegno (circa 1 cm sotto all'articolazione della cannuola di miscelazione) nella siringa introrale.

Estrarre dalla cartuccia la siringa introrale e richiudere la cartuccia con la chiusura originale della cartuccia.

Se si usa la chiusura più di una volta, accertarsi che la pasto catalizzatore non entri in contatto con la pasta base per evitare trascinamenti di pasta.

Inserire lo stantuffo nella siringa introrale stringendo in avanti la pasta nel corpo della siringa, al massimo fino al giunto della cannuola di miscelazione.

Rimuovere la pasta eventualmente estesa sui lati del giunto della cannuola di miscelazione prima dell'applicazione in bocca.

Il contenuto di una siringa introrale è sufficiente per ricoprire da 2 a 4 preparazioni. Nei lavori protesici di maggiori dimensioni si devono preparare eventualmente rimuovere dalla bocca ogni residuo di materiale da impronta.

Una siringa introrale si può usare solo su un unico paziente!

Sì può conservare la siringa introrale piena fino a 12 ore.

Subito prima dell'applicazione, stendere la cannuola di miscelazione della siringa introrale a un angolo di 180° (finché si sente la resistenza).

Stendere completamente la cannuola di miscelazione per evitare perdite nel giunto della cannuola di miscelazione.

Fare fuoriuscire una piccola quantità di pasta su un blocco da miscelazione finché pasta base e catalizzatore fuoriescono in una miscela uniforme e omogenea. Subito dopo, applicare il materiale da impronta attorno alla preparazione (vedi Rilevazione dell'impronta).

**– È vietato riempire di nuovo una siringa introrale che sia stata vuota completamente o parzialmente.**

#### Retrazione

Materiali di retrazione attuali sono fili di retrazione e soluzioni o paste a base di zirconio o alluminio, solfato di alluminio o solfato di ferro.

Si consiglia 3M ESPE Astringent Retraction Paste/Retraction Capsule. Questa pasto contenente cloruro d'alluminio si applica sul solo direttamente dalla capsula di retrazione. Secondo il tipo di situazione clinica o tecnica di lavoro dell'operatore, la pasta può essere usata come alternativa o in combinazione a fili di retrazione o altri metodi di retrazione.

Le aree da rilevare con l'impronta devono essere tenute asciutte.

Prima di eseguire l'impronta rimuovere ogni residuo di sostanza di retrazione tramite lavaggio ed asciugatura.

#### Tempi

	Tempo di lavorazione a 23°C/74°F dall'inizio della miscelazione* min:sec	Lavorazione in bocca min:sec	Permanenza in bocca min:sec
Imprint 4 Super Quick Heavy	1:15	-	1:15
Imprint 4 Super Quick	1:15	-	1:15
Imprint 4 Super Quick Regular	1:15	0:35	1:15

#### Conservazione e durata

Conservare il prodotto a 15–25°C/59–77°F.

Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.

Conservare le impronte a temperatura inferiore a 30°C/86°F.

Quando i puntigli di impronta sono stati rilevati e la siringa è stata pulita.

Imprint 4 Super Quick

1:15

0:35

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15



