

OPALUSTRE® JA OPALCUPS™

Kemiallinen ja mekaaninen hankaustahna

AINUTLAATUISET EDUT

- Poistaa pinnalliset valkoiset ja ruskeat värjäymät
- Mini-invasiivinen fluoroosin hoito
- Suora, siisti annostelu
- Yhden käytökerran tulos
- Autoklavoitavat OpalCups-kupit minimoivat roiskumisen

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

OPALUSTRE on 6,6-prosenttinen suolahappotahna, joka sisältää piikarbidimikrohiukkasia. Tämä yhdistelmä poistaa värjäymän kemiallisesti yhdessä hellävaraisen mekaanisen hankausten kanssa. Tällä tekniikalla voidaan poistaa nopeasti rumia dekalsifikaatiovirheitä, jotka ovat syvyydeltään alle 0,2 mm. Sopii ihanteellisesti pinnallisiin valkoisiin ja ruskeisiin demineralisaatiolaikkuihin, jotka johtuvat fluoroosin aiheuttamasta kiilteen laikkuuntumisesta.² OpalCups-harjakiillotuskuppeja käytetään Opalustre-mikroabraasiotekniikassa helpottamaan voimakkaampaa liikettä ja minimoimaan roiskumista. OpalCups-viimeistelykuppeja käytetään Opalustren kanssa juuri hoidetun kiillepinnan mikrokiillotuksessa. OpalCupsit kestävät autoklavoinnin tietyn määrän syklejä.

PAKKAUSKOOT

OPALUSTRE-pakkaus

Tuotenro 36611 | Valm. koodi 554

4 kpl Opalustre-ruiskuja, 1,2 ml

20 kpl valkoisia Mac-kärkiä

20 kpl OpalCupsia (10 harjaa ja 10 viimeistelykärkeä)

Säilyvyysaika: 24 kk

OPALUSTRE-täyttöpakkaus

Valm. koodi 555 | 4 kpl Opalustre-ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 24 kk

OPALCUPS-harjat

Tuotenro 39416 | Valm. koodi 5800 | 20 kpl OpalCups-harjalla


OPALCUPS-viimeistelykärjet

Tuotenro 39417 | Valm. koodi 5799 | 20 kpl OpalCups-viimeistelyyn




OpalCups-viimeistelykärjet

White Mac -kärki

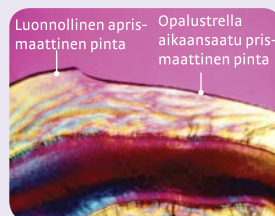

Kemiallinen ja mekaaninen abraasio tuottaa luonnolliselta näyttävän pinnan.

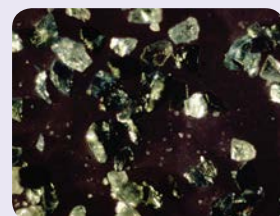

Opalustren sisältämiä piikarbidimikrohiukkasia.

ENNEN



Ennen hoitoa.

JÄLKEEN



Kiilteen mikroabraasion ja 21 päivän Opalescencella valkaisuun jälkeen.



Poista tai vähennä huomattavasti lieviä ja kohtalaisia oikomishoitoon liittyviä dekalsifikaatioita muutamalla Opalustren käyttökeralla. Annostele jäykällä harjakupilla ja 10:1-hidastavalla käsikappaleella käyttäen napakkaa painetta.

¹ www.realityesthetics.com ² Croll TP, Segura A, Donly J. Enamel microabrasion: new considerations in 1993. PP&A 1993 5:19-29 (Lit 53)