

OPADESCENCE® PF

10 % JA 16 %

Karbamidiperoksidi, joka sisältää kaliumnitraattia ja fluoridia




Ensimmäinen ja ainoa patentoitu, tahmea viskoosinen geeli, joka sisältää kaliumnitraattia ja fluoridia.

AINUTLAATUISET EDUT

- Kaliumnitraatti-fluoridikoostumus vahvistaa kiillettä, vähentää sensitiivisyyttä, ehkäisee kariesta^{2,3,4,5,6}
- Koostumus estää kuivumista ja värjäymän palautumista
- Kaksi pitoisuutta
- Kolme makua
- Päivä- tai yökäyttö
- Tahmea ja paksu geeli ei valu pehmytkudoksiin ja varmistaa lusikan pysymisen tiukasti paikallaan

Koostumukseltaan tahmea ja viskoosinen Opalescence-geeli ei valu lusikasta kuten muut valkaisugeelit³, ja se pitää lusikan tiukasti paikallaan. Kaliumnitraatti ja fluoridi vähentävät sensitiivisyyttä sekä samalla vahvistavat kiillettä ja ehkäisevät kariesta.^{2,3,4,5,6} Kahdenkymmenen prosentin vesipitoisuus estää kuivumista ja värjäymän palautumista, minkä ansiosta Opalescence on yksi luotettavimmista saatavilla olevista valkaisu-geeleistä. Opalescencella valkaistut vitaalit hampaat pysyvät vaaleampina vuosia.^{7,8,9,10} Yliopistotutkimus osoittaa, että geeli pysyy aktiivisena 8–10 tuntia yökäytössä⁷. Tämä merkitsee potilaille nopeita tuloksia ja lisääntyvää hoitomyöntyvyyttä. Saatavana eri pitoisuuksia, koostumuksia ja makuja sekä pakkauskojoja kaikkien potilaittesi valkaisutarpeisiin.

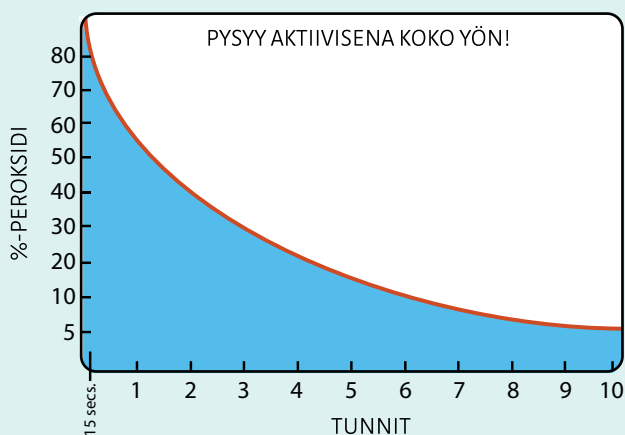

Indianan yliopisto: Pieniä määriä geeliä otettiin talteen ja analysoitiin eri ajankohtina.¹¹

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

Opalescencea suositellaan värjäytyneiden hampaiden valkaisuun ennen yhdistelmämuovin, laminaattien ja/tai kruunujen asettamista. Se poistaa tehokkaasti synnynnäisten, systeemisten, farmakologisten, traumaattisten jne. tekijöiden sekä ikääntymisen aiheuttamat värjäymät kokonaan tai osittain. Se tehoaa fluoroosin ja jopa tetrasykliinin aiheuttamaan värjäytymiseen.^{2,3}

VALMISTAJAN SUOSITTELEMAT KÄYTTÖAJAT

- | | |
|----------------------|------------------|
| Opalescence® PF 10 % | 8–10 tuntia/yö |
| Opalescence® PF 16 % | 4–6 tuntia/päivä |

PAKKAUSKOOT

Vaikuttava aine 10 % tai 16 % karbamidiperoksidi. Sisältää kaliumnitraattia ja fluoria. Maku regular, minttu ja meloni. Voidaan käyttää päivisin tai öisin, vähentää hampaiden sensitiivisyyttä. Säilyvyys: jääkaapissa 24 kk ja huoneenlämmössä 12 kk.

OPAESCENCE-potilaspakkaus

8 kpl Opalescence-ruiskuja, 1,2 ml
1 kpl Opalescence-hammastahna, 22 ml
1 kpl lusikkarasia, sävykartta ja matkapakkaus



OPAESCENCE PF 10 % ja 16 %

		10% PF	16% PF
REGULAR	Tuotenro	37736	37738
	Valm. koodi	5366-EU	4482-EU
MINTTU	Tuotenro	37737	37739
	Valm. koodi	5364-EU	4480-EU
MELONI	Valm. koodi	5365-EU	4481-EU



OPAESCENCE-täyttöpakkaus

40 kpl Opalescence-ruiskuja, 1,2 ml
1 kpl sävykartta.



OPAESCENCE PF 10 % ja 16 %

		10% PF	16% PF
REGULAR	Tuotenro	37740	37742
	Valm. koodi	5396-EU	4488-EU
MINTTU	Tuotenro	37741	37743
	Valm. koodi	5394-EU	4486-EU
MELONI	Valm. koodi	5395-EU	4487-EU

ENNEN

JÄLKEEN



Ennen valkaisua.



Ylihampaat 5 yön hoidon, noin 40 tunnin jälkeen.



Voimakkaita tetrasykliinivärjäymiä. Näiden valkaisu voi vaatia hoidon, joka kestää useasta viikosta kuukausiin.



12-vuotiaan hampaat ennen valkaisua.



Viiden yön valkaisuun jälkeen.



Ennen valkaisua.



16 päivän 16 % Opalescence PF:llä hoidon jälkeen.



Kohtalaisia ja voimakkaita tetrasykliinivärjäymiä.



Parantumista 2 viikossa. Tetrasykliinivärjäymien hoito voi vaatia 2–6 kk.