

OPAESCENCE® ENDO

Ei-vitaalin hampaan "kävelyvalkaisu" – 35% vetyperoksidi



Black Mini -kärki

AINUTLAATUISET EDUT

- 35 % vetyperoksidi
- Helppo asettaa pulpakammion sisään
- 3–5 päivän hoito

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

Formuloitu erityisesti juurihoidettujen hampaiden valkaisuun "kävelyvalkaisu-tekniikalla"; Opalescence Endo jätetään hampaaseen 3–5 päivän ajaksi.

PAKKAUSKOOT

OPAESCENCE ENDO -minipakkaus

Tuotenumro 71687 | Valm. koodi 1270
2 kpl Opalescence Endo-ruiskuja, 1,2 ml
20 kpl Black Mini -kärkiä
Säilyvyysaika: 24 kk. Säilytettävä jääkaapissa.

OPAESCENCE ENDO -minitäyttöpakkaus

Tuotenumro 71688 | Valm. koodi 1323
2 kpl Opalescence Endo-ruiskuja, 1,2 ml
Säilyvyysaika: 24 kk. Säilytettävä jääkaapissa.

ENNEN



JÄLKEEN



OPAESCENCE ENDO -KÄYTTÖOHJE



1. Aseta Opalescence Endo juurikanavaan.



2. Annostele sekoitettu Ultra-Temp Regular suoraan hoidettavaan kohtaan Skini-ruiskulla.



3. Ylimääräinen aine on helppo pyyhkiä kostealla harsotaitoksella tai vanulla ennen asettamista.



4. Valmis.



5. Poista helposti.

1 www.realityesthetics.com