

# LC BLOCK-OUT RESIN

Resiiniblokkeri ekstraoraaliseen käyttöön



Black Mini -kärki

## AINUTLAATUISET EDUT

- Alhainen viskositeetti
- Sininen väriaine
- Erinomainen yleisresini<sup>2</sup>

## KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

Muodostaa valkaisulusikoihin tilan valkaisuainetta varten ja on hyödyllinen muissa laboratorioitöissä, kuten mallien ja muottien korjauksissa. Nopea ja tehokas annostelu mustalla Mini-kärjellä. Valokovetteinen. Ei intraoraaliseen käyttöön.

## LC BLOCK-OUT RESIN -KÄYTTÖOHJE



Valkaisuaineen tilaa varten annostelee LC Block-Outia noin 0,5 mm:n paksuudelta labiaalipinnoille. Pysyttelee noin 1,5 mm:n etäisyydellä ienreunasta. Älä levitä inkisaalireunoihin tai okklusaalipinoille.



LC Block-Out Resin on nopeasti kovettava, luja, sekoittamatta käyttövalmis materiaali muottien allemenojen tukkimiseen ja onkaloiden täyttämiseen.

## PAKKAUSKOOT

### LC BLOCK-OUT RESIN -pakkaus

Tuotenro 86179 | Valm. koodi 240

4 kpl LC Block-Out Resin-ruiskuja, 1,2 ml

20 kpl Black Mini -kärkiä

Säilyvyysaika: 36 kk

### LC BLOCK-OUT RESIN -täyttöpakkaus

Valm. koodi 241

4 kpl LC Block-Out Resin-ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 36 kk

### LC BLOCK-OUT RESIN -säätöpakkaus

Valm. koodi 242

20 kpl LC Block-Out Resin-ruiskuja, 1,2 ml

20 kpl Black Mini -kärkiä

Säilyvyysaika: 36 kk

<sup>1</sup> www.realityesthetics.com <sup>2</sup> Frazier, Kevin B., Haywood Van B. Correcting incisal defects in custom-fabricated bleaching trays. Quintessence Int. 1998;29(9): 565-566. (Lit 18)