

# OPALDAM® & OPALDAM® GREEN

## Valokouetteiset resiinisuojat



### AINUTLAATUISET EDUT

- Suojaa pehmytkudosta läpäisemättömällä saumalla
- Helppo irrottaa
- Suora annostelu

### KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

Passiivisesti adhesiivinen (pinnoite), metakrylaattipohjainen resiinisuoja-aine, jota käytetään valkaistavien hampaiden lähellä olevien pehmytkudosten eristämiseen. Yksittäistä hammasta valkaistaessa OpalDamilla voidaan suojata viereinen hammas. Valon heijastus kovettumisen aikaisen lämmön ja kudosten sensitiivisyyden minimoimiseksi. Vihreä OpalDam varmistaa aina turvallisen, suojan.

### OPALDAM & OPALDAM GREEN -KÄYTTÖOHJE



1. Annostele OpalDamia ikenelle 4–6 mm:n leveydeltä. Sulje hammasvälit. Ulota resiini noin 0,5 mm kuivalle kiilteelle sauman suojaamiseksi. Ulota resiini yhden hampaan verran viimeisen valkaistavan hampaan taakse. Valokoveta 20 sekuntia.



2. Poista kovettunut resiini nopeasti ja helposti yhtenä tai useampana isona palana. Tarkista hammasvälit ja poista sieltä resiini. OpalDam on suunniteltu onkaloiden ja allemenojen helppoon poistoon.



Micro 20G -kärki

Black Mini -kärki

### PAKKAUSKOOT

#### OPALDAM-pakkaus

Tuotenro 86558 | Valm. koodi 324

4 kpl OpalDam-ruiskuja, 1,2 ml

10 kpl Micro 20G -kärkiä

10 kpl Black Mini -kärkiä

Säilyvyysaika: 24 kk. Säilytetään jääkaapissa.

#### OPALDAM-täyttöpakkaukset

Valm. koodi 325 | 4 kpl OpalDam-ruiskuja, 1,2 ml

Valm. koodi 326 | 20 kpl OpalDam-ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 24 kk. Säilytetään jääkaapissa.

#### OPALDAM GREEN -pakkaus

Tuotenro 34549 | Valm. koodi 1824

4 kpl OpalDam Green -ruiskuja, 1,2 ml

10 kpl Micro 20G -kärkiä

10 kpl Black Mini -kärkiä

Säilyvyysaika: 24 kk. Säilytetään jääkaapissa.

#### OPALDAM GREEN -täyttöpakkaukset

Valm. koodi 1825 | 4 kpl OpalDam Green -ruiskua, 1,2 ml

Valm. koodi 1826 | 20 kpl OpalDam Green -ruiskua, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 24 kk. Säilytetään jääkaapissa.

1 www.realityesthetics.com U.S. Patent Nos.: RE38,721; RE38,823 and RE38,722.