



AMERICAN EAGLE IMPLANTTI-INSTRUMENTIT

Implantti-instrumenttien hoito-ohje

Hoito-ohje

Implantti-instrumentit on valmistettu lääketieteellisestä titaanista. Nämä instrumentit eivät naarmuta tai vaurioita titaani-implantteja. American Eagle -instrumenttien ainutlaatuisen muotoilun ansiosta työskentely on turvallista myös subgingivaalisella alueella. Vaikka AEI:n implantti-instrumentit voidaan puhdistaa ja steriloida samalla tavalla, kuin ruostumattomasta teräksestä valmistetut instrumentit, alla olevia ohjeita noudattamalla saa lisättyä instrumentin käyttöikää. Noudata aina implantin valmistajan implantin hoitosuosituksia.

Tekniikka

- Tarkasta hammaskiven ja biofilmin määrä.
- Poista hammaskivi kevyesti implantin pinnalta.
- Käytä vain implantin pinnoille.
- Älä käytä instrumentteja amalgaamin, sementin, paikkaylimäärien tai yhdistelmämuovin työstämiseen.

Hoito

- Käytä instrumenttikasetteja puhdistuksen ja varastoinnin aikana.
- Testaa instrumentin terävyys säännöllisesti AEI-testipuikon avulla (tuotekoodi 39701).
- Käytä timantti teroituskiveä implantti-instrumenttien teroittamiseen (tuotekoodi 39700).
- Karkeaa teroituskiveä ei saa käyttää!

Puhdistus

- Puhdista instrumentit viipymättä ultraäänipesulaitteessa. Suositeltu puhdistusaika on 20 minuuttia.
- Käytä pH-neutraalia pesuainetta.
- Huuhtelee instrumentit vedellä ultraäänipuhdistuksen jälkeen.

Sterilointi

- Kuivaa instrumentit ennen sterilointia.
- Autoklavoi instrumentit. Noudata laitteen valmistajan suosituksia.
- Kuivausohjelma on sallittu instrumenteille.

Varastointi

- Kuivaa instrumentit huolellisesti ennen varastointia.

HAMMASVÄLINE