



## XP-TEKNOLOGIALLA VALMISTETUT INSTRUMENTIT

## Hoito-ohje

### XP-teknologialla valmistettujen instrumenttien hoito-ohje

American Eagle Instruments (AEI) suunnittelee ja valmistaa instrumentteja XP Teknologialla™, joita voi käyttää toistuvasti ilman teroitusta. Instrumentit säilyttävät alkuperäisen muotonsa ja rakenteensa koko instrumentin käyttöajan ajan. Vaikka XP-instrumentteja voidaan puhdistaa ja steriloida samalla tavalla, kuin ruostumattomasta teräksestä valmistettuja instrumentteja, seuraavat ohjeet lisäävät XP Teknologialla™ valmistettujen instrumenttien käyttöikää ja suorituskkyä.

#### Tekniikka

- Instrumentteja tulee käsitellä varoen; mitä terävämpi reuna sitä ohuempi terä.
- Poista hammaskivi kevyesti 4-6 vedolla hampaan pinnalta.
- Älä murra hammaskiveä.
- Älä käytä ylimäärien, amalgaamin tai yhdistelmämuovin työstämiseen.

#### Hoito

- Käytä instrumenttikasetteja puhdistuksen ja varastoinnin aikana.
- Testaa instrumentin terävyys säännöllisesti AEI-testipuikon avulla (tuotekoodi 39701).

#### Puhdistus

- Puhdista instrumentit viipymättä ultraäänipesulaitteessa. Suositeltu puhdistusaika on 20 minuuttia.
- Erottele XP Teknologialla™ valmistetut instrumentit muista instrumenteista ennen puhdistusta/sterilointia. AEI ei suosittele erilaisten metallien sterilointia yhtä aikaa.
- Käytä pH-neutraalia pesuainetta.
- Huuhtelee instrumentit vedellä ultraäänipuhdistuksen jälkeen.
- Kuivaa instrumentit ennen sterilointia.
- Älä käytä klooripitoisia tai happamia puhdistusaineita

#### Sterilointi

- Autoklavoi instrumentit. Noudata laitteen valmistajan suosituksia.
- Kuivausohjelma on sallittu instrumenteille.

#### Varastointi

- Kuivaa instrumentit huolellisesti ennen varastointia.