

ASTRINGEDENT®

Nestemäinen 15,5 % rautasulfaattiliuos, pH noin 1



AINUTLAATUISET EDUT

- Pysäyttää vuodon muutamassa sekunnissa
- Eliminoi ientaskunestekontaminaation optimaalisella sidoksella
- Vähentää kallista uusintajäljennösten ottoa

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

Nestemäinen 15,5-prosenttinen rautasulfaattihemostaasiliuos, jonka pH on noin 1. "Erittäin suositeltava – tehokas helppo käyttää vuodon tyrehtyttämisessä, kudoshallinnassa ja pulpotomioissa. Arviointi ++++." Sopivat monenlaisiin hammas- tai suukirurgisiin toimenpiteisiin pinnallisen kapillaarivuodon tyrehtyttämiseen. Tällaisia toimenpiteitä ovat kiintoprotetiikka, restoratiivis-operatiivinen hoito, parodontaaliohoito jne. Astringedentin käyttöä suositellaan myös retrogradisessa juurentäytämisessä, impaktoituneen kulmahampaan paljastamisessa, gingivektomioissa ja "fiksatiivina" pulpotomioissa. Astringedentia voidaan käyttää myös ientaskunestekontaminaation aiheuttaman vuodon estämisessä suoran sidostamisen aikana. Kastele Ultrapak-lanka hemostaasiliuokseen ja eristä kudokset,

ja huuhtelee sitten voimakkaalla ilma-vesisuihkulla. Pääsääntöisesti ViscoStatin ja Astringedentin kanssa käytetään metallista Dento-Infusor-kärkeä. ViscoStat on viskoosisempi liuos, joten se ei juokse kunnolla muovisen kärjen läpi. Ientaskunesteen hallinnassa tarvitaan vain hyvin pieni määrä ViscoStatia. Muovikärjen pehmeämpi pää voi olla parempi vasta parantuneelle epiteelille sidostettaessa subgingivaalisia lopullisia restauraatioita. Sidostus ja resiinisementointi vaatii ehdotonta kudosnesteiden hallintaa.

PAKKAUSKOOT

ASTRINGEDENT-täyttöpakkaukset

| Valm. koodi 686 | 1 kpl Indispense-ruisku, 30 ml

Tuotenro 82821 | Valm. koodi 111 | 1 kpl pullo 30 ml

Säilyvyysaika: 48 kk