

ULTRAPAK®

Litteä neuloslanka



AINUTLAATUISET EDUT

- Avaa nopeasti ientaskun
- Helppo hallita ja asettaa
- Ei tartu poriin tai instrumentteihin

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

Ultrapak-lanka on valmistettu 100-prosenttisesta puuvillasta neuloen tuhansien pienienpienien silmukoiden ketjuiksi. Tämä ainutlaatuinen neulosmalli antaa hellävaraisen ulospäin suuntautuvan voiman asettamisen jälkeen, kun neulosilmukat

pyrkivät avautumaan. Optimaalinen ientaskun avautuminen tapahtuu 1–3 minuutissa. Ultrapak-langalla ientasku saadaan avattua nopeasti ennen jäljennöksen ottoa, ja sen avulla voidaan myös viedä rautasulfaattiliuoksia ikenen alle ientaskunesteen hallitsemiseksi. Ultrapak on tarkoitettu ViscoStat-, Astringedent-, Dento-Infusor-kudoshallintatekniikoiden tehostamiseen. Myös tavanomaisia tekniikoita, joissa käytetään alumiinia tai alumiinikloridia jne., voidaan tehostaa käyttämällä litteitä Ultrapak-neuloslankoja, jotka imevät enemmän hemostaasiliuosta kuin tavalliset langat.

ULTRAPAK-KÄYTTÖOHJE



PREPAROINTIA EDELTÄVÄ ASETUSTEK- NIikka ENNEN PAKKAAMISTA

Varmistaaksesi langan pysymisen preparoinnin aikana käytä niin isoa lankaa, että se painautuu tiiviisti ientaskuun. Avaa approksimaaliset kontaktit, ja aseta hemostaasiliuokseen kastettu Ultrapak-neuloslanka. Ultrapak puristuu kokoon pakattaessa, joten käytä lankakokoa, joka vaikuttaa liian suurelta. Ohuella Ultrapak-pakkausinstrumentilla lanka saadaan helposti painettua paikalleen. Neuloslangan ainutlaatuinen rakenne (silmukkaverkko) helpottaa pakkaamista ja paikallaan pysymistä.




PREPAROINTI

Ulosta reuna subgingivaalisesti poraamalla osittain neuloslankaan, joka ei tartu timanttiporaan. Poista langan palaset kalsiumhydroksidiapplikaattorilla (pieni pallopää). Vuoto on hyvin vähäistä. Pieni osa preparoimatonta hammasta ienkiinnityksen yläpuolella säilytetään merkinä jäljennöksessä.



HEMOSTAASI JA JÄLJENNÖS

Hiero Dento-Infusor-kärkeä vuotavaa kudosta vasten, koska liuos pusertuu ulos hitaasti. Poista ylimääräinen hemostaasiliuos voimakkaalla ilma-vesisuihkulla. Jos havaitset vielä vuotoa, toista nämä vaiheet. Jos ientaskua pitää avata enemmän, pakkaa uusi sopivan kokoinen lanka. Kuivaa ilmapuustilla ja ota jäljennös.

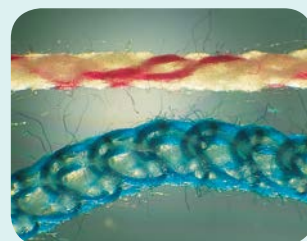

Ultrapak-neuloslangassa mikroskooppisissa kokoonpuristuvissa silmukoissa (alempi) on enemmän säikeiden välitilaa kuin punoslangassa (ylempi). Pakattaessa silmukat painuvat kasaan ja välittävät hemostaattisen astringentin alla oleviin kudoksiin. Silmukoiden avautuessa syntyy hellävarainen, jatkuva ulospäin työntävä voima. Neuloslanka on kuin ketju; se taipuu ja pysyy koossa pakattaessa.

PAKKAUSKOOT

ULTRAPAK-LANKA, lajitelmapakkaus

Tuotenro 82822 | Valm. koodi 130

1 kpl kutakin lankakokoa oo, o, 1 ja 2

1 kpl Ultrapak-teline



ULTRAPAK-LANKA ooo, täyttöpakkaus

Tuotenro 85554 | Valm. koodi 137

1 kpl Ultrapak-lanka ooo, musta

- Vaihtoehtona mustalle silkkiommellangalle alempana lankana "kaksilankatekniikassa".
- Etuhampaat
- Tuplapakkaus



ULTRAPAK-LANKA oo, täyttöpakkaus

Tuotenro 87254 | Valm. koodi 136

1 kpl Ultrapak-lanka oo, keltainen

- Laminaattien preparointiin ja sementointiin
- Restoratiiviset toimenpiteet, joissa käsitellään ohuita, hauraita kudoksia



ULTRAPAK-LANKA o, täyttöpakkaus

Tuotenro 82823 | Valm. koodi 131

1 kpl Ultrapak-lanka o, lila

- Alaetuhampaat
- Ikenen lähellä ja alla olevien laminaattien sementointiin
- Luokkien III, IV ja V täytteet
- Toisena lankana "kaksilankatekniikassa"



ULTRAPAK-LANKA 1, täyttöpakkaus

Tuotenro 82824 | Valm. koodi 132

1 kpl Ultrapak-lanka 1, sininen

- Kyllästämättömät koot 1 ja 2 ovat erityisen tehokkaita kudoshallinnassa ja/tai ientaskun avauksessa kastettuna koaguloivaan hemostaasiliuokseen ennen ja/tai jälkeen kruunupreparointien
- Voidaan käyttää suojalankana ennen preparointia etuhampaissa



ULTRAPAK-LANKA 2, täyttöpakkaus

Tuotenro 82825 | Valm. koodi 133

1 kpl Ultrapak-lanka 2, vihreä

- Ylempänä lankana "kaksilankatekniikassa"
- Voidaan käyttää suojalankana ennen preparointia etuhampaissa



ULTRAPAK-LANKA 3, täyttöpakkaus

Tuotenro 82826 | Valm. koodi 134

1 kpl Ultrapak-lanka 3, punainen

- Alueet, joissa on melko paksu ienkudos ja joilla tarvitaan huomattava määrä voimaa
- Ylempänä lankana "kaksilankatekniikassa"

