

ULTRAPAK®

Litteä neuloslanka



2013¹
REALITY
Five Star Award
★★★★★



AINUTLAATUISET EDUT

- Avaa nopeasti ientaskun
- Helppo hallita ja asettaa
- Ei tartu poriin tai instrumentteihin

KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

Ultrapak-lanka on valmistettu 100-prosenttisesta puuvillasta neuloen tuhansien pienienpienien silmukoiden ketjuiksi. Tämä ainutlaatuinen neulosmalli antaa hellävaraisen ulospäin suuntautuvan voiman asettamisen jälkeen, kun neulosilmukat

pyrkivät avautumaan. Optimaalinen ientaskun avautuminen tapahtuu 1–3 minuutissa. Ultrapak-langalla ientasku saadaan avattua nopeasti ennen jäljennöksen ottoa, ja sen avulla voidaan myös viedä rautasulfaattiliuoksia ikenen alle ientaskunesteen hallitsemiseksi. Ultrapak on tarkoitettu ViscoStat-, Astringedent-, Dento-Infusor-kudoshallintatekniikoiden tehostamiseen. Myös tavanomaisia tekniikoita, joissa käytetään alumiinia tai alumiinikloridia jne., voidaan tehostaa käyttämällä litteitä Ultrapak-neuloslankoja, jotka imevät enemmän hemostaasiliuosta kuin tavalliset langat.

ULTRAPAK-KÄYTTÖOHJE



PREPAROINTIA EDELTÄVÄ ASETUSTEK- NIikka ENNEN PAKKAAMISTA

Varmistaaksesi langan pysymisen pre-
paroinnin aikana käytä niin isoa lankaa,
että se painautuu tiiviisti ientaskuun.
Avaa approksimaaliset kontaktit, ja aseta
hemostaasiliuokseen kastettu Ultrapak-
neuloslanka. Ultrapak puristuu kokoon
pakattaessa, joten käytä lankakokoa, joka
vaikuttaa liian suurelta. Ohuella Ultrapak-
pakkausinstrumentilla lanka saadaan hel-
posti painettua paikalleen. Neuloslangan
ainutlaatuinen rakenne (silmukkaverkko)
helpottaa pakkaamista ja paikallaan
pysymistä.




PREPAROINTI

Ulosta reuna subgingivaalisesti poraamalla
osittain neuloslankaan, joka ei tartu timant-
tiporaan. Poista langan palaset kalsiumhyd-
roksidiapplikaattorilla (pieni pallopää). Vuoto
on hyvin vähäistä. Pieni osa prepaarointitonta
hammasta ienkiinnityksen yläpuolella säily-
tetään merkinä jäljennöksessä.



HEMOSTAASI JA JÄLJENNÖS

Hiero Dento-Infusor-kärkeä vuotavaa
kudosta vasten, koska liuos pusertuu ulos
hitaasti. Poista ylimääräinen hemostaas-
siliuos voimakkaalla ilma-vesisuihkulla.
Jos havaitset vielä vuotoa, toista nämä
vaiheet. Jos ientaskua pitää avata enem-
män, pakkaa uusi sopivan kokoinen lanka.
Kuivaa ilmapuustilla ja ota jäljennös.

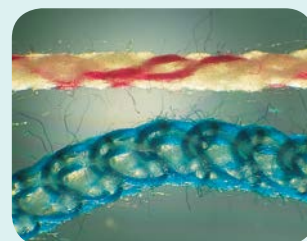

Ultrapak-neuloslangassa mikroskoop-
pisissa kokoonpuristuvissa silmukoissa
(alempi) on enemmän säikeiden välitilaa
kuin punoslangassa (ylempi). Pakattaessa
silmukat painuvat kasaan ja välittävät
hemostaattisen astringentin alla oleviin
kudoksiin. Silmukoiden avautuessa syntyy
hellävarainen, jatkuva ulospäin työntävä
voima. Neuloslanka on kuin ketju; se tai-
puu ja pysyy koossa pakattaessa.

PAKKAUSKOOT

ULTRAPAK-LANKA, lajitelmapakkaus

Tuotenro 82822 | Valm. koodi 130

1 kpl kutakin lankakokoa oo, o, 1 ja 2

1 kpl Ultrapak-teline



ULTRAPAK-LANKA ooo, täyttöpakkaus

Tuotenro 85554 | Valm. koodi 137

1 kpl Ultrapak-lanka ooo, musta

- Vaihtoehtona mustalle silkkiommellangalle alempana lankana "kaksilankatekniikassa".
- Etuhampaat
- Tuplapakkaus



ULTRAPAK-LANKA oo, täyttöpakkaus

Tuotenro 87254 | Valm. koodi 136

1 kpl Ultrapak-lanka oo, keltainen

- Laminaattien preparointiin ja sementointiin
- Restoratiiviset toimenpiteet, joissa käsitellään ohuita, hauraita kudoksia



ULTRAPAK-LANKA o, täyttöpakkaus

Tuotenro 82823 | Valm. koodi 131

1 kpl Ultrapak-lanka o, lila

- Alaetuhampaat
- Ikenen lähellä ja alla olevien laminaattien sementointiin
- Luokkien III, IV ja V täytteet
- Toisena lankana "kaksilankatekniikassa"



ULTRAPAK-LANKA 1, täyttöpakkaus

Tuotenro 82824 | Valm. koodi 132

1 kpl Ultrapak-lanka 1, sininen

- Kyllästämättömät koot 1 ja 2 ovat erityisen tehokkaita kudoshallinnassa ja/tai ientaskun avauksessa kastettuna koaguloivaan hemostaasiliuokseen ennen ja/tai jälkeen kruunupreparointien
- Voidaan käyttää suojalankana ennen preparointia etuhampaissa



ULTRAPAK-LANKA 2, täyttöpakkaus

Tuotenro 82825 | Valm. koodi 133

1 kpl Ultrapak-lanka 2, vihreä

- Ylempänä lankana "kaksilankatekniikassa"
- Voidaan käyttää suojalankana ennen preparointia etuhampaissa



ULTRAPAK-LANKA 3, täyttöpakkaus

Tuotenro 82826 | Valm. koodi 134

1 kpl Ultrapak-lanka 3, punainen

- Alueet, joissa on melko paksu ienkudos ja joilla tarvitaan huomattava määrä voimaa
- Ylempänä lankana "kaksilankatekniikassa"

