

Kaikki Forestadent® tuotteet toimitetaan steriloimattomina.

Tuotteet tulee steriloida DIN EN ISO 17665-1 standardin mukaan validoidulla (vahvistetulla) ohjelmalla ennen käyttöä. Huomioi paikalliset säännökset. Tämän toimenpiteen tulee tehdä siihen kouluttautunut henkilö.

### Instrumenttien ja terien esi-käsittely

Aseta instrumentit alkaliseen (emäksiseen) puhdistusliuokseen määritellyksi ajaksi. Instrumenttien tulee olla kokonaan peittyneet ja niiden ei tule koskettaa toisiinsa. Huuhtelee kaikki instrumentin urat ennen ja jälkeen puhdistusliuoksen, esimerkiksi kertakäyttöistä huuhteluruiskua apuna käyttäen (vähintään 5 ml tilavuus). Poista instrumentit puhdistusliuoksesta ja huuhtelee kauttaaltaan vedellä. Tarkista instrumentit vielä, että ne ovat kauttaaltaan puhdistuneet.

### Instrumenttien, terien ja implanttien puhdistaminen

Poista kaikki OrthoEasy® ruuvit ja instrumentit alkuperäisistä pakkauksistaan ennen puhdistusta, desinfektiota ja sterilointia ja aseta niille tarkoitettuun telineeseen (esimerkiksi 1199-0000-OrthoEasy® Rack).

### Instrumenttien, terien ja implanttien desinfektio

Automaattinen desinfektio, alkalinen puhdistus/desinfektio, tarvittaessa ultra-äänilaitteessa (esim. esi-huuhtelee, alkalinen puhdistaminen (pH >10, korotetussa lämpötilassa vähintään 55 asteessa), välihuuhtelu ja tämän jälkeen lämpödesinfektio/jälki-huuhtelu desinfektorissa).

### Instrumenttien, terien ja implanttien sterilointi

Huomioi ja noudata sterilointilaitteiston valmistajan ohjeita sterilointiprosessissa koskien lämpötilaa, painetta ja loppukuivausta.

Seuraavat asiat ovat validoituja (vahvistettuja) erottelevassa höyrysterilointimenetelmässä:

- Lämpötila vähintään 133-135 astetta, 3 x esi-vakuumi
- Standardi kesto 15 minuuttia (minimi 6 minuuttia)
- Loppukuivausaika 8 minuuttia

Forestadent® ei vastaa käyttäjän tekemästä sterilointiprosessista. Sterilointiprosessi tulee tehdä oikeaoppisesti.

\*\*\*\*\*

Esimerkki soveltuvasta aineesta:

37617 Poraneste Orolin Burbath    OCC    2 l

Käyttövalmis, aldehyditön desinfiointi- ja puhdistusaine pyöriville instrumenteille. Laajatehoinen ja nopeavaikutteinen. Liuos on käyttökelpoinen viikon ajan.