



**TOP DENT**

**TOP DENT-JÄLJENNÖSAINEET**

**HAMMASVÄLINE**

## Käsi­käyt­­töiset jäl­jen­nö­sa­ineet

# IMPRESS A

### Laadukkaat A-silikonipohjaiset jäljennösaineet

#### LIGHT BODY

Top Dent Light Body -jäljennösaineen pääasiallinen käyttö on yksivaiheisissa tarkkuusjäljennöksissä yhdessä halutun lusikkamateriaalin kanssa.

Erinomaiset materiaali- ja tarkkuusominaisuudet jäljentävät yksityiskohdat tarkasti. Materiaali voidaan annostella suoraan preparoiduille hampaille tai yhdessä valitun lusikkamateriaalin kanssa. Voidaan käyttää myös limakalvojäljennöksissä.

Väri: pinkki

Maku: mieto minttu

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia (riippumatta työskentelyajasta)



#### PAKKAUSKOOT

- 38300 Light Body, 2 x 50 ml + 12 kpl
- 32515 Sekoituskärjet Top Dent, keltainen, matala konsistenssi, 50 kpl
- 32518 Intraoraalikärjet Top Dent, keltainen, 100 kpl
- 32510 Sekoituspistooli Top Dent DS50 1:1/2:1, 1 kpl

#### MEDIUM BODY

Top Dent Medium Body -jäljennösaineen pääasiallinen käyttö on yksivaiheisissa tarkkuusjäljennöksissä halutun lusikkamateriaalin kanssa.

Erinomaiset materiaali- ja tarkkuusominaisuudet jäljentävät yksityiskohdat tarkasti. Materiaali voidaan annostella suoraan preparoiduille hampaille tai yhdessä valitun lusikkamateriaalin kanssa. Voidaan käyttää myös limakalvojäljennöksissä.

Väri: lila

Maku: mieto minttu

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia (riippumatta työskentelyajasta)



#### PAKKAUSKOOT

- 38301 Medium Body, 2 x 50 ml + 12 kpl
- 32516 Sekoituskärjet Top Dent, medium konsistenssi, 50 kpl
- 35887 Intraoraalikärjet, valkoinen, 100 kpl
- 32510 Sekoituspistooli Top Dent DS50 1:1/2:1, 1 kpl

## HEAVY BODY

Top Dent Heavy Body (Tray) -jäljennösaineen pääasiallinen käyttö on lusikkamateriaalina yksi- ja kaksivaiheisissa jäljennöstenotoissa. Materiaali annostellaan samalla sekoituspistoolilla kuin tarkkuusjäljennösaine, mikä tekee järjestelmästä yksinkertaisen ilman sekoituslaitetta. Materiaalia voidaan käyttää myös purennaanrekisteröintiin yhdessä Light Body tai Medium Body materiaalien kanssa.

Väri: lila

Maku: neutraali

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia 15 sekuntia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia 15 sekuntia (riippumatta työskentelyajasta)



### PAKKAUSKOOT

- 38302 Heavy Body (Tray), 2 x 50 ml + 6 kpl
- 32517 Sekoituskärjet Top Dent, heavy konsistenssi, 50 kpl
- 32510 Sekoituspistooli Top Dent DS50 1:1/2:1, 1 kpl

*Lisäksi saatavana Top Dent metalliset, perforoidut jäljennöslusikat sekä kertakäyttöiset jäljennöslusikat.*

## PUTTY SOFT

Lämmössä aktivoituva, tarttumaton ja käsin sekoitettava helposti käsiteltävä materiaali. Käytetään lusikkamateriaalina yksi- ja kaksivaiheisissa jäljennöstenotoissa.

Väri: sininen (sekoitettuna)

Maku: mieto minttu

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia (riippumatta työskentelyajasta)



### PAKKAUSKOOT

- 38304 Putty Soft, 2 x 450 ml

*Lisäksi saatavana Top Dent metalliset, perforoidut jäljennöslusikat sekä kertakäyttöiset jäljennöslusikat.*

## Jäljennösaineet sekoituslaitteeseen

### MONOPHASE

Top Dent Monophasen muotonsa pitävät ominaisuudet mahdollistavat sen käytön lusikkamateriaalina, ja samanaikaisesti hydrofiliset ja tiksotrooppiset ominaisuudet mahdollistavat sen käytön tarkkuutta vaativissa jäljennöksissä, kuten Inlay/Onlay, kruunu- ja siltajäljennökset, implanttijäljennökset ja limakalvojäljennökset. Monosphase-materiaalia saa sekoituslaitteisiin tarkoitetuissa kaseteissa, mutta sitä voidaan annostella myös suoraan hampaille kertakäyttöisen jäljennösruihkun avulla (ei sisälly pakkaukseen).

Väri: sininen

Maku: mieto minttu

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia (riippumatta työskentelyajasta)

### PAKKAUSKOOT

- 38307 Monophase, 5:1, 380 ml + 10 kpl
- 38441 Sekoituskärki 5:1, keltainen, 40 kpl
- 38442 Kiiinnitysrengas, 5:1, keltainen, 2 kpl
- 34468 Jäljennösruihku, kertakäyttöinen Depro, 100 kpl



### HEAVY BODY

Top Dent Heavy Body (Tray) -jäljennösaineen pääasiallinen käyttö on lusikkamateriaalina yksi- ja kaksivaiheisissa jäljennöstenotoissa. Materiaalia voidaan käyttää myös purennanrekisteröintiin yhdessä Light Body tai Medium Body materiaalien kanssa.

Väri: sininen

Maku: neutraali

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia 15 sekuntia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia 15 sekuntia (riippumatta työskentelyajasta)

### PAKKAUSKOOT

- 31153 Heavy Body (Tray), 5:1, 380 ml + 10 kpl
- 38441 Sekoituskärki 5:1, keltainen, 40 kpl
- 38442 Kiinnitysrengas, 5:1, keltainen, 2 kpl

*Lisäksi saatavana Top Dent metalliset, perforoidut jäljennöslusikat sekä kertakäyttöiset jäljennöslusikat.*



## PUTTY SOFT

Top Dent Putty Soft on lämmössä aktivoituva, tarttumaton helposti käsiteltävä materiaali. Käytetään lusikkamateriaalina yksi- ja kaksivaiheisissa jäljennöstenotoissa.

Väri: sininen (sekoitettuna)

Maku: mieto minttu

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia (riippumatta työskentelyajasta)



## PAKKAUSKOOT

38308 Putty Soft, 5:1, 2 x 380 ml

38441 Sekoituskärki 5:1, keltainen, 40 kpl

38442 Kiinnitysrengas, 5:1, keltainen, 2 kpl

| Tekniset tiedot          | Putty Soft              | Putty Soft 380 ml | Medium body    | Light body     | Monophase      | Heavy Tray            |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Väri                     | vaaleanvihreä / sininen | sininen           | lila           | pinkki         | sininen        | lila                  |
| Annostus / Sekoitusaika  | 1:1 / 30 sek            | automaattinen     | automaattinen  | automaattinen  | automaattinen  | automaattinen         |
| Työskentelyaika *        | enintään 2 min          | enintään 2 min    | enintään 2 min | enintään 2 min | enintään 2 min | enintään 2 min 15 sek |
| Suussaoloaika            | 2 min                   | 2 min             | 2 min          | 2 min          | 2 min          | 2 min 15 sek          |
| Kokonais-kovettumisaika  | enintään 4 min          | enintään 4 min    | enintään 4 min | enintään 4 min | enintään 4 min | enintään 4 min 30 sek |
| Maku                     | Minttu                  | Minttu            | Minttu         | Minttu         | Minttu         | Neutraali             |
| Muodonpitävyys           | 99,4 %                  | 99,5 %            | 99,6 %         | 99,6 %         | 99,7 %         | 99,6 %                |
| Lineaarinen muodonmuutos | 0,2 %                   | 0,2 %             | 0,13 %         | 0,16 %         | 0,2 %          | 0,1 %                 |

\* Lämpötilan ollessa 23 °C. Ylläolevassa taulukossa annetut ajat pätevät suhteellisen kosteuden ollessa 50+/- 10%.

Yleisesti ottaen korkea lämpötila nopeuttaa, matala lämpötila hidastaa aineen kovettumista.

| Materiaali/indikaatio                                | Kruunu- ja siltajäljennökset | Inlays/Onlays     | Implantti-jäljennökset | Limakalvo-jäljennökset |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Top Dent Heavy Body yhdessä Light/Medium Body kanssa | Sininen-rosa-lila            | Sininen-rosa-lila | Sininen                |                        |
| Top Dent Putty Soft yhdessä Light/Medium Body kanssa | Sininen-rosa-lila            | Sininen-rosa-lila |                        |                        |
| Top Dent Monophase                                   | Sininen                      | Sininen           | Sininen                | Sininen                |
| Top Dent Light/Medium Body                           |                              |                   |                        | Rosa-lila              |

## Jäljennöslusikat

### JÄLJENNÖSLUSIKAT TOP DENT

*Perforoitu, ruostumatonta terästä*

#### Yläleuka

|       |                     |       |
|-------|---------------------|-------|
| 82430 | nro 1, iso          | 1 kpl |
| 82443 | nro3, medium iso    | 1 kpl |
| 82451 | nro 4, medium       | 1 kpl |
| 82510 | nro 5, medium pieni | 1 kpl |
| 82577 | nro 7, pieni        | 1 kpl |
| 82583 | nro 9, lasten       | 1 kpl |
| 82609 | nro 14, lasten      | 1 kpl |

#### Alaleuka

|       |                |       |
|-------|----------------|-------|
| 82620 | nro 20, iso    | 1 kpl |
| 82631 | nro 21, medium | 1 kpl |
| 82645 | nro 24, lasten | 1 kpl |
| 82661 | nro 28, lasten | 1 kpl |

#### Osalusikat

|       |                                 |       |
|-------|---------------------------------|-------|
| 82692 | nro 30, vasen ylä, oikea ala    | 1 kpl |
| 82694 | nro 31, oikea ylä, vasen ala    | 1 kpl |
| 82712 | nro 32, alaleuka, etualue       | 1kpl  |
| 82727 | nro 33, yläleuka, etualue       | 1 kpl |
| 82731 | nro 99, säädettävä, vasen/oikea | 1 kpl |



## KERTAKÄYTTÖISET JÄLJENNÖSLUSIKAT TOP DENT

*Kertakäyttöiset, muoviset perforoidut ja sileät jäljennöslusikat*

### **Yläleuka**

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 32173 | koko L | 12 kpl |
| 32174 | koko M | 12 kpl |
| 32175 | koko S | 12 kpl |

### **Alaleuka**

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 32176 | koko L | 12 kpl |
| 32177 | koko M | 12 kpl |
| 32178 | koko S | 12 kpl |

### **Osalusikat**

|       |              |        |
|-------|--------------|--------|
| 32181 | yläleuka     | 12 kpl |
| 32182 | alaleuka     | 12 kpl |
| 32179 | sektorit 2/4 | 12 kpl |
| 32180 | sektorit 1/3 | 12 kpl |

### **Osalusikat sileä**

|       |                          |        |
|-------|--------------------------|--------|
| 32183 | 2/4, sileä               | 12 kpl |
| 32184 | 1/3, sileä               | 12 kpl |
| 32185 | yläleuka, etualue, sileä | 12 kpl |
| 32186 | alaleuka, etualue, sileä | 12 kpl |



32173



32176



32174



32177



32175



32178



32179



32180



32181



32182



32183



32184



32185



32186



**HAMMASVÄLINE**

HAMMASVÄLINE OY | PL 15, 02101 Espoo | Asiakaspalvelu, p. 010 588 6100 | [www.hammasvaline.fi](http://www.hammasvaline.fi)