



TOP DENT

TOP DENT-JÄLJENNÖSAINEET

HAMMASVÄLINE

Käsi­käyt­toiset jäl­jen­nö­sa­ineet

IMPRESS A

Laadukkaat A-silikonipohjaiset jäl­jen­nö­sa­ineet

LIGHT BODY

Top Dent Light Body -jäl­jen­nö­sa­ineen pää­asi­allinen käyttö on yksivaiheisissa tarkkuusjäl­jen­nö­ksissä yhdessä halutun lusikka­ma­te­riaalin kanssa.

Erinomaiset ma­te­riaali- ja tarkkuusominaisuudet jäl­jen­tä­vät yksityiskohdat tarkasti. Ma­te­riaali voidaan annostella suoraan prepa­ro­iduille hampaille tai yhdessä valitun lusikka­ma­te­riaalin kanssa. Voidaan käyttää myös limakalvo­jäl­jen­nö­ksissä.

Väri: pinkki

Maku: mieto minttu

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia (riippumatta työskentelyajasta)



PAKKAUSKOOT

- 38300 Light Body, 2 x 50 ml + 12 kpl
- 32515 Sekoituskärjet Top Dent, keltainen, matala konsistenssi, 50 kpl
- 32518 Intraoraalikärjet Top Dent, keltainen, 100 kpl
- 32510 Sekoituspistooli Top Dent DS50 1:1/2:1, 1 kpl

MEDIUM BODY

Top Dent Medium Body -jäl­jen­nö­sa­ineen pää­asi­allinen käyttö on yksivaiheisissa tarkkuusjäl­jen­nö­ksissä halutun lusikka­ma­te­riaalin kanssa.

Erinomaiset ma­te­riaali- ja tarkkuusominaisuudet jäl­jen­tä­vät yksityiskohdat tarkasti. Ma­te­riaali voidaan annostella suoraan prepa­ro­iduille hampaille tai yhdessä valitun lusikka­ma­te­riaalin kanssa. Voidaan käyttää myös limakalvo­jäl­jen­nö­ksissä.

Väri: lila

Maku: mieto minttu

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia (riippumatta työskentelyajasta)



PAKKAUSKOOT

- 38301 Medium Body, 2 x 50 ml + 12 kpl
- 32516 Sekoituskärjet Top Dent, medium konsistenssi, 50 kpl
- 35887 Intraoraalikärjet, valkoinen, 100 kpl
- 32510 Sekoituspistooli Top Dent DS50 1:1/2:1, 1 kpl

HEAVY BODY

Top Dent Heavy Body (Tray) -jäljennösaineen pääasiallinen käyttö on lusikkamateriaalina yksi- ja kaksivaiheisissa jäljennöstenotoissa. Materiaali annostellaan samalla sekoituspistoolilla kuin tarkkuusjäljennösaine, mikä tekee järjestelmästä yksinkertaisen ilman sekoituslaitetta. Materiaalia voidaan käyttää myös purennanrekisteröintiin yhdessä Light Body tai Medium Body materiaalien kanssa.

Väri: lila

Maku: neutraali

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia 15 sekuntia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia 15 sekuntia (riippumatta työskentelyajasta)

PAKKAUSKOOT

- 38302 Heavy Body (Tray), 2 x 50 ml + 6 kpl
- 32517 Sekoituskärjet Top Dent, heavy konsistenssi, 50 kpl
- 32510 Sekoituspistooli Top Dent DS50 1:1/2:1, 1 kpl

Lisäksi saatavana Top Dent metalliset, perforoidut jäljennöslusikat sekä kertakäyttöiset jäljennöslusikat.



PUTTY SOFT

Lämmössä aktivoituva, tarttumaton ja käsin sekoitettava helposti käsiteltävä materiaali. Käytetään lusikkamateriaalina yksi- ja kaksivaiheisissa jäljennöstenotoissa.

Väri: sininen (sekoitettuna)

Maku: mieto minttu

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia (riippumatta työskentelyajasta)

PAKKAUSKOOT

- 38304 Putty Soft, 2 x 450 ml

Lisäksi saatavana Top Dent metalliset, perforoidut jäljennöslusikat sekä kertakäyttöiset jäljennöslusikat.



Jäljennösaineet sekoituslaitteeseen

MONOPHASE

Top Dent Monophasen muotonsa pitävät ominaisuudet mahdollistavat sen käytön lusikkamateriaalina, ja samanaikaisesti hydrofiliset ja tiksotrooppiset ominaisuudet mahdollistavat sen käytön tarkkuutta vaativissa jäljennöksissä, kuten Inlay/Onlay, kruunu- ja siltajäljennökset, implanttijäljennökset ja limakalvojäljennökset. Monophase-materiaalia saa sekoituslaitteisiin tarkoitetuissa kaseteissa, mutta sitä voidaan annostella myös suoraan hampaille kertakäyttöisen jäljennösruiskun avulla (ei sisälly pakkaukseen).

Väri: sininen

Maku: mieto minttu

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia (riippumatta työskentelyajasta)

PAKKAUSKOOT

- 38307 Monophase, 5:1, 380 ml + 10 kpl
- 38441 Sekoituskärki 5:1, keltainen, 40 kpl
- 38442 Kiiinnitysrengas, 5:1, keltainen, 2 kpl
- 34468 Jäljennösruisku, kertakäyttöinen Depro, 100 kpl



HEAVY BODY

Top Dent Heavy Body (Tray) -jäljennösaineen pääasiallinen käyttö on lusikkamateriaalina yksi- ja kaksivaiheisissa jäljennöstenotoissa. Materiaalia voidaan käyttää myös purennairekisteröintiin yhdessä Light Body tai Medium Body materiaalien kanssa.

Väri: sininen

Maku: neutraali

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia 15 sekuntia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia 15 sekuntia (riippumatta työskentelyajasta)

PAKKAUSKOOT

- 31153 Heavy Body (Tray), 5:1, 380 ml + 10 kpl
- 38441 Sekoituskärki 5:1, keltainen, 40 kpl
- 38442 Kiinnitysrengas, 5:1, keltainen, 2 kpl

Lisäksi saatavana Top Dent metalliset, perforoidut jäljennöslusikat sekä kertakäyttöiset jäljennöslusikat.



PUTTY SOFT

Top Dent Putty Soft on lämmössä aktivoituva, tarttumaton helposti käsiteltävä materiaali. Käytetään lusikkamateriaalina yksi- ja kaksivaiheisissa jäljennöstenotoissa.

Väri: sininen (sekoitettuna)

Maku: mieto minttu

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia (riippumatta työskentelyajasta)



PAKKAUSKOOT

38308 Putty Soft, 5:1, 2 x 380 ml

38441 Sekoituskärki 5:1, keltainen, 40 kpl

38442 Kiinnitysrennas, 5:1, keltainen, 2 kpl

Tekniset tiedot	Putty Soft	Putty Soft 380 ml	Medium body	Light body	Monophase	Heavy Tray
Väri	vaaleanvihreä / sininen	sininen	lila	pinkki	sininen	lila
Annostus / Sekoitusaika	1:1 / 30 sek	automaattinen	automaattinen	automaattinen	automaattinen	automaattinen
Työskentelyaika *	enintään 2 min	enintään 2 min	enintään 2 min	enintään 2 min	enintään 2 min	enintään 2 min 15 sek
Suussaoloaika	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min 15 sek
Kokonais-kovettumisaika	enintään 4 min	enintään 4 min	enintään 4 min	enintään 4 min	enintään 4 min	enintään 4 min 30 sek
Maku	Minttu	Minttu	Minttu	Minttu	Minttu	Neutraali
Muodonpitävyys	99,4 %	99,5 %	99,6 %	99,6 %	99,7 %	99,6 %
Lineaarinen muodonmuutos	0,2 %	0,2 %	0,13 %	0,16 %	0,2 %	0,1 %

* Lämpötilan ollessa 23 °C. Ylläolevassa taulukossa annetut ajat pätevät suhteellisen kosteuden ollessa 50+/- 10%.

Yleisesti ottaen korkea lämpötila nopeuttaa, matala lämpötila hidastaa aineen kovettumista.

Materiaali/indikaatio	Kruunu- ja siltäjäljennökset	Inlays/Onlays	Implantti-jäljennökset	Limakalvo-jäljennökset
Top Dent Heavy Body yhdessä Light/Medium Body kanssa	Sininen-rosa-lila	Sininen-rosa-lila	Sininen	
Top Dent Putty Soft yhdessä Light/Medium Body kanssa	Sininen-rosa-lila	Sininen-rosa-lila		
Top Dent Monophase	Sininen	Sininen	Sininen	Sininen
Top Dent Light/Medium Body				Rosa-lila

Jäljennöslusikat

JÄLJENNÖSLUSIKAT TOP DENT

Perforoitu, ruostumatonta terästä

Yläleuka

82430	nro 1, iso	1 kpl
82443	nro3, medium iso	1 kpl
82451	nro 4, medium	1 kpl
82510	nro 5, medium pieni	1 kpl
82577	nro 7, pieni	1 kpl
82583	nro 9, lasten	1 kpl
82609	nro 14, lasten	1 kpl

Alaleuka

82620	nro 20, iso	1 kpl
82631	nro 21, medium	1 kpl
82645	nro 24, lasten	1 kpl
82661	nro 28, lasten	1 kpl

Osalusikat

82692	nro 30, vasen ylä, oikea ala	1 kpl
82694	nro 31, oikea ylä, vasen ala	1 kpl
82712	nro 32, alaleuka, etualue	1kpl
82727	nro 33, yläleuka, etualue	1 kpl
82731	nro 99, säädettävä, vasen/oikea	1 kpl



KERTAKÄYTTÖISET JÄLJENNÖSLUSIKAT TOP DENT

Kertakäyttöiset, muoviset perforoidut ja sileät jäljennöslusikat

Yläleuka

32173	koko L	12 kpl
32174	koko M	12 kpl
32175	koko S	12 kpl

Alaleuka

32176	koko L	12 kpl
32177	koko M	12 kpl
32178	koko S	12 kpl

Osalusikat

32181	yläleuka	12 kpl
32182	alaleuka	12 kpl
32179	sektorit 2/4	12 kpl
32180	sektorit 1/3	12 kpl

Osalusikat sileä

32183	2/4, sileä	12 kpl
32184	1/3, sileä	12 kpl
32185	yläleuka, etualue, sileä	12 kpl
32186	alaleuka, etualue, sileä	12 kpl





HAMMASVÄLINE

HAMMASVÄLINE OY | PL 15, 02101 Espoo | Asiakaspalvelu, p. 010 588 6100 | www.hammasvaline.fi