



**TOP DENT**

## TOP DENT-JÄLJENNÖSAINEET

HAMMASVÄLINE



## HEAVY BODY

Top Dent Heavy Body (Tray) -jäljennösaineen pääasiallinen käyttö on lusikkamateriaalina yksi- ja kaksivaiheisissa jäljennöstenotoissa. Materiaali annostellaan samalla sekoituspistoolilla kuin tarkkuusjäljennösaine, mikä tekee järjestelmästä yksinkertaisen ilman sekoituslaitetta. Materiaalia voidaan käyttää myös purennanrekisteröintiin yhdessä Light Body tai Medium Body materiaalien kanssa.

Väri: lila

Maku: neutraali

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia 15 sekuntia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia 15 sekuntia (riippumatta työskentelyajasta)

### PAKKAUSKOOT

- 38302 Heavy Body (Tray), 2 x 50 ml + 6 kpl
- 32517 Sekoituskärjet Top Dent, heavy konsistenssi, 50 kpl
- 32510 Sekoituspistooli Top Dent DS50 1:1/2:1, 1 kpl

*Lisäksi saatavana Top Dent metalliset, perforoidut jäljennöslusikat sekä kertakäyttöiset jäljennöslusikat.*



## PUTTY SOFT

Lämmössä aktivoituva, tarttumaton ja käsin sekoitettava helposti käsiteltävä materiaali. Käytetään lusikkamateriaalina yksi- ja kaksivaiheisissa jäljennöstenotoissa.

Väri: sininen (sekoitettuna)

Maku: mieto minttu

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia (riippumatta työskentelyajasta)

### PAKKAUSKOOT

- 38304 Putty Soft, 2 x 450 ml

*Lisäksi saatavana Top Dent metalliset, perforoidut jäljennöslusikat sekä kertakäyttöiset jäljennöslusikat.*



# Jäljennösaineet sekoituslaitteeseen

## MONOPHASE

Top Dent Monophasen muotonsa pitävät ominaisuudet mahdollistavat sen käytön lusikkamateriaalina, ja samanaikaisesti hydrofiliset ja tiksotrooppiset ominaisuudet mahdollistavat sen käytön tarkkuutta vaativissa jäljennöksissä, kuten Inlay/Onlay, kruunu- ja siltajäljennökset, implanttijäljennökset ja limakalvojäljennökset. Monophase-materiaalia saa sekoituslaitteisiin tarkoitetuissa kaseteissa, mutta sitä voidaan annostella myös suoraan hampaille kertakäyttöisen jäljennösruihkun avulla (ei sisälly pakkaukseen).

Väri: sininen

Maku: mieto minttu

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia (riippumatta työskentelyajasta)

## PAKKAUSKOOT

- 38307 Monophase, 5:1, 380 ml + 10 kpl
- 38441 Sekoituskärki 5:1, keltainen, 40 kpl
- 38442 Kiiinnitysrengas, 5:1, keltainen, 2 kpl
- 34468 Jäljennösruišku, kertakäyttöinen Depro, 100 kpl



## HEAVY BODY

Top Dent Heavy Body (Tray) -jäljennösaineen pääasiallinen käyttö on lusikkamateriaalina yksi- ja kaksivaiheisissa jäljennöstenotoissa. Materiaalia voidaan käyttää myös purennaanrekisteröintiin yhdessä Light Body tai Medium Body materiaalien kanssa.

Väri: sininen

Maku: neutraali

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia 15 sekuntia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia 15 sekuntia (riippumatta työskentelyajasta)

## PAKKAUSKOOT

- 31153 Heavy Body (Tray), 5:1, 380 ml + 10 kpl
- 38441 Sekoituskärki 5:1, keltainen, 40 kpl
- 38442 Kiinnitysrengas, 5:1, keltainen, 2 kpl

*Lisäksi saatavana Top Dent metalliset, perforoidut jäljennöslusikat sekä kertakäyttöiset jäljennöslusikat.*





## PUTTY SOFT

Top Dent Putty Soft on lämmössä aktivoituva, tarttumaton helposti käsiteltävä materiaali. Käytetään lusikkamateriaalina yksi- ja kaksivaiheisissa jäljennöstenotoissa.

Väri: sininen (sekoitettuna)

Maku: mieto minttu

Työskentelyaika: enintään 2 minuuttia (23 °C)

Kovettumisaika suussa: 2 minuuttia (riippumatta työskentelyajasta)



## PAKKAUSKOOT

38308 Putty Soft, 5:1, 2 x 380 ml

38441 Sekoituskärki 5:1, keltainen, 40 kpl

38442 Kiinnitysrennas, 5:1, keltainen, 2 kpl

Tekniset tiedot	Putty Soft	Putty Soft 380 ml	Medium body	Light body	Monophase	Heavy Tray
Väri	vaaleanvihreä / sininen	sininen	lila	pinkki	sininen	lila
Annostus / Sekoitusaika	1:1 / 30 sek	automaattinen	automaattinen	automaattinen	automaattinen	automaattinen
Työskentelyaika *	enintään 2 min	enintään 2 min	enintään 2 min	enintään 2 min	enintään 2 min	enintään 2 min 15 sek
Suussaoloaika	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min 15 sek
Kokonais-kovettumisaika	enintään 4 min	enintään 4 min	enintään 4 min	enintään 4 min	enintään 4 min	enintään 4 min 30 sek
Maku	Minttu	Minttu	Minttu	Minttu	Minttu	Neutraali
Muodonpitävyys	99,4 %	99,5 %	99,6 %	99,6 %	99,7 %	99,6 %
Lineaarinen muodonmuutos	0,2 %	0,2 %	0,13 %	0,16 %	0,2 %	0,1 %

\* Lämpötilan ollessa 23 °C. Ylläolevassa taulukossa annetut ajat pätevät suhteellisen kosteuden ollessa 50+/- 10%.

Yleisesti ottaen korkea lämpötila nopeuttaa, matala lämpötila hidastaa aineen kovettumista.

Materiaali/indikaatio	Kruunu- ja siltajäljennökset	Inlays/Onlays	Implantti-jäljennökset	Limakalvo-jäljennökset
Top Dent Heavy Body yhdessä Light/Medium Body kanssa	Sininen-rosa-lila	Sininen-rosa-lila	Sininen	
Top Dent Putty Soft yhdessä Light/Medium Body kanssa	Sininen-rosa-lila	Sininen-rosa-lila		
Top Dent Monophase	Sininen	Sininen	Sininen	Sininen
Top Dent Light/Medium Body				Rosa-lila

## Jäljennöslusikat

### JÄLJENNÖSLUSIKAT TOP DENT

*Perforoitu, ruostumatonta terästä*

#### **Yläleuka**

82430	nro 1, iso	1 kpl
82443	nro 3, medium iso	1 kpl
82451	nro 4, medium	1 kpl
82510	nro 5, medium pieni	1 kpl
82577	nro 7, pieni	1 kpl
82583	nro 9, lasten	1 kpl
82609	nro 14, lasten	1 kpl

#### **Alaleuka**

82620	nro 20, iso	1 kpl
82631	nro 21, medium	1 kpl
82645	nro 24, lasten	1 kpl
82661	nro 28, lasten	1 kpl

#### **Osalusikat**

82692	nro 30, vasen ylä, oikea ala	1 kpl
82694	nro 31, oikea ylä, vasen ala	1 kpl
82712	nro 32, alaleuka, etualue	1kpl
82727	nro 33, yläleuka, etualue	1 kpl
82731	nro 99, säädettävä, vasen/oikea	1 kpl



# KERTAKÄYTTÖISET JÄLJENNÖSLUSIKAT TOP DENT

*Kertakäyttöiset, muoviset perforoidut ja sileät jäljennöslusikat*

## **Yläleuka**

32173	koko L	12 kpl
32174	koko M	12 kpl
32175	koko S	12 kpl

## **Alaleuka**

32176	koko L	12 kpl
32177	koko M	12 kpl
32178	koko S	12 kpl


## **Osalusikat**

32181	yläleuka	12 kpl
32182	alaleuka	12 kpl
32179	sektorit 2/4	12 kpl
32180	sektorit 1/3	12 kpl

## **Osalusikat sileä**

32183	2/4, sileä	12 kpl
32184	1/3, sileä	12 kpl
32185	yläleuka, etualue, sileä	12 kpl
32186	alaleuka, etualue, sileä	12 kpl



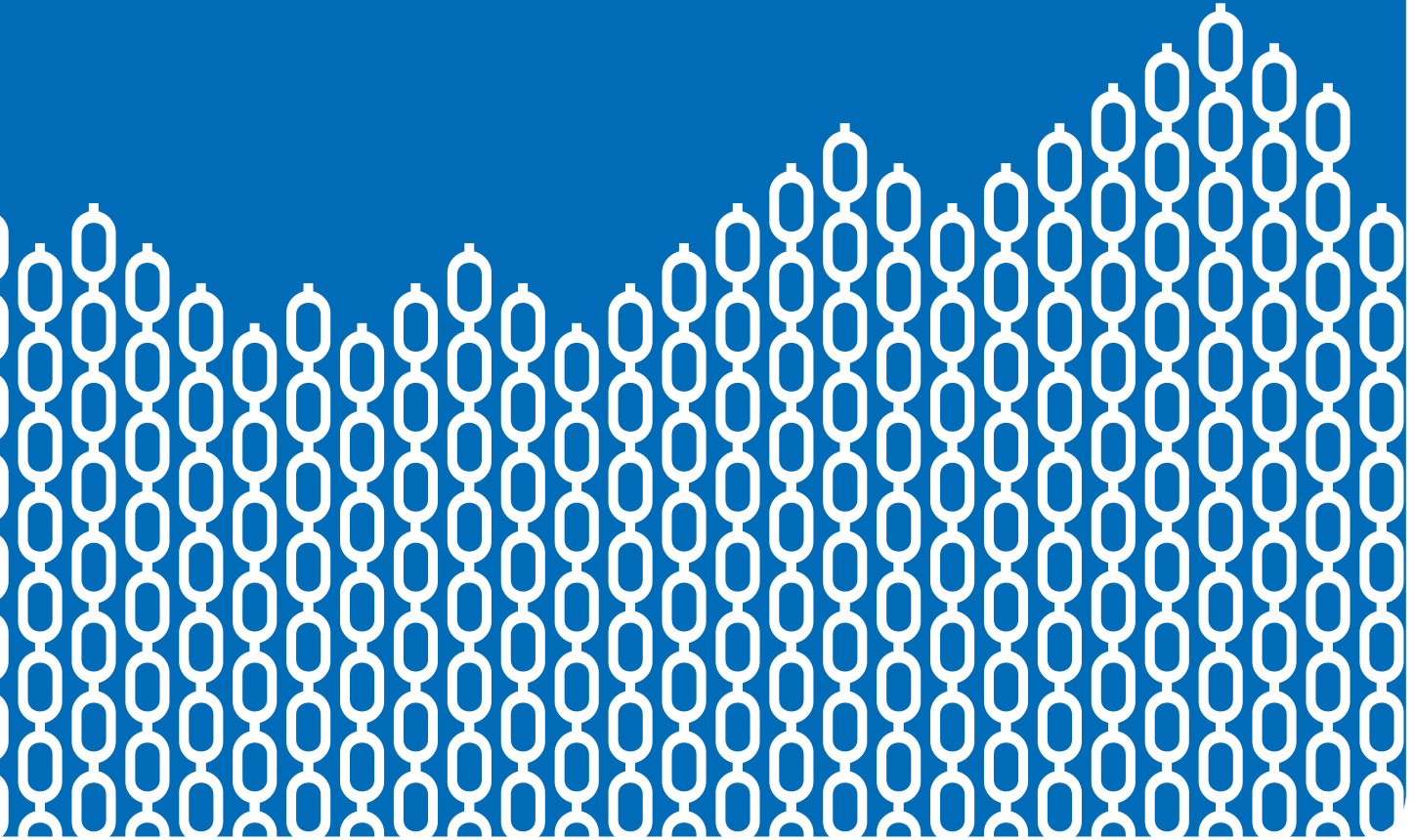

**HAMMASVÄLINE**

HAMMASVÄLINE OY | PL 15, 02101 Espoo | Asiakaspalvelu, p. 010 588 6100 | [www.hammasvaline.fi](http://www.hammasvaline.fi)