

inSafe turvaa kätesi neulanpistoilta

INSAFE -PUUDUTUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

inSafe tarjoaa täydellisen suojan toimenpiteen alusta loppuun neulan hävittämiseen saakka. Erikoissuunniteltu ruisku suojaa neulaa koko toimenpiteen ajan. Käytetty neula poistetaan ruiskusta keräyssäiliöön turvallisesti. Lainsäädäntö edellyttää, että vastaanotoilla käytetään asianmukaisia turvajärjestelmiä. inSafe on paras vaihtoehto suojaamaan neulanpistotapaturmilta.


1. TERÄVIEN ESINEIDEN KERÄYSSÄILIÖN ASENNUS



1 a. Poista tarroista suojapaperit.



1 b. Aseta pöytäpidike sileälle puhtalle työtasolle ja paina pidike tiukasti kiinni pöytätasoon.

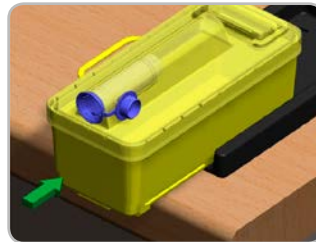


1 c. Työnnä säiliö pöytäpidikkeeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että säiliö on kiinni pöytäpidikkeessä vetämällä säiliötä eteenpäin vasten kiinnityssalppaa.




Katso inSafen käyttö:
www.youtube.com/watch?v=UbTgz8IGcCg

2. NEULAN ASETTAMINEN RUISKUUN

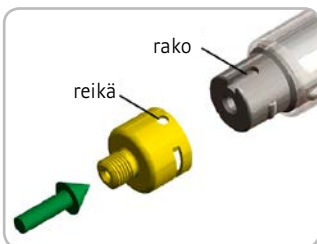


2 a. Kohdista neula-adapterin reikä ruiskun päässä olevaan rakoön ja työnnä paikalleen.

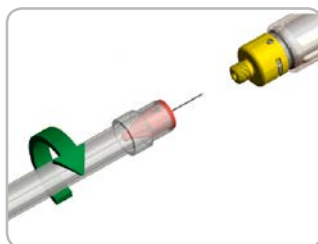

2 b. Kierrä neula paikalleen ja poista neulan suojus.
Huomautus:
Neulan maksimipituus 38 mm.




2 c. Kierrä hylsy myötäpäivään (nuolet eivät ole kohdakkain).

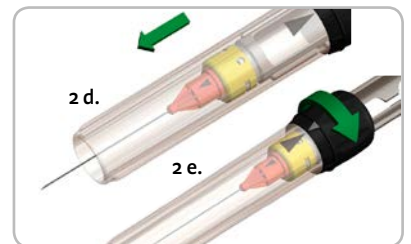

2 d. Liuta hylsy eteenpäin niin, että se on täysin ääriasennossa.

2 e. Kierrä hylsy vastapäivään; hylsy lukittuu (nuolet kohdakkain).
Varoitus: Varmista, että hylsy lukittuu, muuten neulanpistovaara on suuri.

3. AMPULLIN ASETTAMINEN

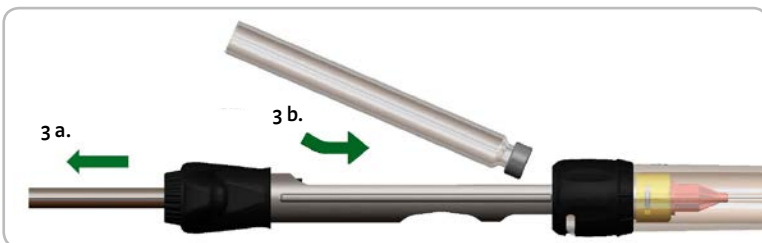

3 a. Vedä mäntää pois päin ja pidä paikoillaan.

3 b. Aseta ampulli ruiskuun ja vapauta mäntä.

5. AMPULLIN VAIHTAMINEN


- Kun hylsy on lukittuna eteenpäin vedä mäntää pois päin (3 a) ja pidä paikoillaan.
- Poista ampulli etusormen ja peukalon avulla ruiskun rungon aukosta.
- Työnnä ampulli ylöspäin ja poista se.
- Aseta uusi ampulli kohdan 3 ohjeen mukaan.

4. RUISKUN KÄYTTÖ


- Käännä hylsyn lukitusosasta myötäpäivään (nuolet eivät ole kohdakkain) (2 c).
- Työnnä hylsy takaisin.
- Käännä lukitusosasta vastapäivään ja lukitse hylsy (nuolet kohdakkain) (2 e).
- Injektoi normaalisti.
- Käännä hylsyn lukitusosasta myötäpäivään (nuolet eivät ole kohdakkain) (2 c).
- Työnnä hylsy eteenpäin ääriasentoon (2 d).
- Käännä lukitusosasta vastapäivään ja lukitse hylsy (nuolet kohdakkain) (2 e).
- Toista edelliset vaiheet, jos lisää puudutetta.
- Aseta uusi ampulli kohdan 3 ohjeen mukaan.

Huomautus: Älä vaihda neulaa ruiskuun potilaan hoidon aikana. Jos tarvitset uuden neulan käytä puhdasta steriloitua ruiskua.


6. NEULAN POISTAMINEN RUISKUSTA

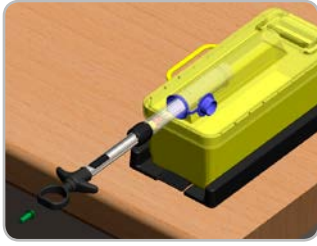


6 a. Hylsy lukitaan eteenpäin ääriasentoon. Työnnä ruisku sinisestä aukosta keräyssäiliöön.

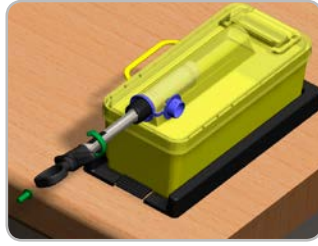

6 b. Pidä kiinni ruiskusta ja työnnä eteenpäin kevyellä paineella. Käännä ruiskua vastapäivään ja työnnä ruiskua eteenpäin keräyssäiliöön.

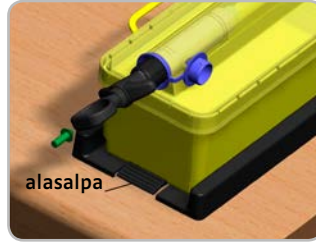

6 c. Työnnä ruisku eteenpäin. Ruisku on nyt "lukittu" säiliöön. **Varoitus:** ruisku on työnnettävä säiliön sisään kokonaan, niin että se "lukittuu". Jos "lukitus" epäonnistuu voi se johtaa neulan pistotaturmaan.

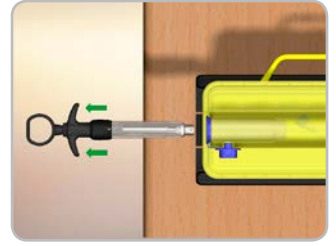

6 d. Tartu ruiskuun ja vedä ruiskua taaksepäin. Neula jää keräyssäiliöön.

7. TERÄVIEN ESINEIDEN KERÄYSSÄILIÖN HÄVITTÄMINEN

- Kun säiliö on täynnä, tulee se hävittää.
- Sulje säiliö.
- Paina pöytätelineen alasalpaa (6 c) ja vedä säiliö eteenpäin pois alustasta.
- Hävitä säiliö asianmukaisesti.
- Aseta uusi tyhjä keräyssäiliö kohdan 1. mukaan.

8. PUHDISTUS JA STERILOINTI

Puhdistus

- Pese ruiskun pinnalta näkyvä lika.
- Puhdistuksen jälkeen desinfioi ja steriloi ruisku.

Desinfiointi

- Ruiskun voi pestä desinfioivassa pesukoneessa.
- Ruiskun voi pyyhkiä desinfioivalla pyyhkeellä tai liinalla, joka on kostutettu desinfektioaineella. Älä suihkuta desinfektioainetta suoraan ruiskun pinnalle. Älä desinfioi ruiskua upottamalla.

Sterilointi

- Puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen ruuvaa mäntä irti ruiskusta. Aseta molemmat ruiskun osat autoklavoitavaan sterilointipussiin.
- Autoklavoi 134 °C:ssa vähintään 3 minuuttia.
- Käytä vain höyryautoklaavia.

9. HYL SYN VAIHTAMINEN



9 a. Avaa hylsy ja siirrä se kuvassa näkyvään asentoon.



9 b. Aseta sopiva työkalu kauluksen uraan, työnnä alas ja holkki irtoaa.



9 c. Poista pieni lukitus pala ja liuta holkki pois ruiskun rungon päältä.



9 d. Vaihda holkki uuteen, aseta lukitus pala paikalleen, paina kielekettä sisäänpäin ja työnnä holkki paikoilleen. Tarkista toiminta.

10. ITSEASPIROIVA PUUDUTUSRUISKU

- Kun neula ja puuduteampulli asetetaan ruiskuun, ruiskun mäntä asettuu paikalleen, jolloin pieni määrä puudutetta voi roiskua neulasta.
- Aseta neula kudokseen.
- Kun haluttu neulan syvyys on saavutettu vapauta mäntä ja tarkista, ettei neulaan aspiroidu verta.
- Jos neulaan aspiroiduu verta, niin vaihda neula ja pistä kudoksen eri kohtaan. Toista niin kauan, ettei verta aspiroidu.
- Annostelee tarvittava määrä puudutetta.



Insafe_kaytto-ohje_syys2013/INDD CS6/13092013/HV