

ottaen huomioon työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan määräyksen BGV A1, BGR 250/TRBA 250, BGI 775 ja § 36 Infektiosuojalaki

mitä

Kohde, jota huolletaan

miten

Toimintatapa

millä

Työaine (esim. desinfektioaine, VAH/DGHM-listattu),
valmiste, annostus, vaikutusaika

milloin

Hygienisten toimenpiteiden
ajankohta, laistuvuus, järjestys

kuka

Vastuullisen henkilön nimi
ja allekirjoitus

Instrumentit



Instrumentit ja apuvälineet:

- Yleiset, ennaltaehkäisevät, korjaavat ja leukaortopediset toimenpiteet, esim. jäljennäslusikat, tarjottimet, kasetit, tabletit, lasit, imukanyylit ja irrotettavat imukykimet
- Kirurgiset, parodontologiset ja endodontiset toimenpiteet, esim. ruiskut, atulat, vivut



Pyörivät ja värähtelevät instrumentit:

- Yleiset, ennaltaehkäisevät, korjaavat ja leukaortopediset toimenpiteet, esim. kiillotimet, parat, jyrsimet, hiomalaitteet, viimeistelijät
- Kirurgiset, parodontologiset ja endodontiset toimenpiteet, esim. endodantia-/parodontologiainstrumentit ja kirurgiset, pyörivät instrumentit



Siirtoinstrumentit

Käyttö: yleiset, ennaltaehkäisevät, korjaavat, leukaortopediset, kirurgiset, parodontologiset tai endodontiset toimenpiteet, esim. turbiini, käsi- ja kulmakappaleet



Lisälaitteet

Nesteiden ulostulolla/ilman ulostulua ja/tai ilman tai hiukkasten kanssa, esim. hammaskiven poistolaitteet, jauhesuihkulaitteet, intraoraali kamera, jne.



Pinnat ja lattiat

Tutkimus- ja hoitohuoneissa (esim. hoitoyksikkö, laitteet, kaapit)



Esineet ja pienet, potilaan lähellä olevat pinnat,

jotka ovat saotuneet ja joita ei voida desinfioida lämpökäsittelyllä eikä liuokseen uputtamalla (esim. hoitoyksikkö, laitteet, työpinnat, kalusteet, röntgenlaitteet, valon kahva, intraoraalit filmikotelot)



Iho, joka on rasittunut

- Vesisekoitteista työaineista, esim. desinfectioaineista, puhdistusaineista, röntgenkehityskemikaaleista
- Muista kuin vesisekoitteista työaineista, esim. orgaanisista liuotinaaineista, pesubensiinistä
- Kosteuseräntymä ja ihon pehmeneminen (maseraatio) esim. suojakäsineiden käytöstä



Iho, ei fysiologinen mikrobikanta

esim. bakteereita, sieniä, viruksia



Ihon suojaus ja hoito:

Levitä huolellisesti sormien väliin, kyynelreunuksiin ja kädenselkämkyksiin



Käsien hygieninen desinfectio:

Hiero käsien desinfectioainetta CEN/EN 1500 -menetelmän mukaisesti kuivumiseen asti. Käsien on oltava ilmakeivat ennen kuin hoidetaan kertakäyttökäsineet vedetään käsiin.



Käsien kirurginen desinfectio:

Pese käsiä ja käsivarsia kyynärpäihin asti 1 minuutin ajan, harjaa tällöin kyynenalustet ja reumat tarvittaessa. Kostuta kädet ja käsivarret täydellisesti hieromalla (CEN/EN 12791 -menetelmän mukaisesti) ja lisäämällä käsien desinfectioluosta annoksittain ja pidä vaikutusaikana koko ajan kosteana. Käsien on oltava ilmakeivat ennen kuin hoidetaan sterilit kertakäyttökäsineet vedetään käsiin.



Imulaite, imuletkut (sisäpuoli)
Suunhuuhteluallas (sisäpuoli)

Suodatimet
Amalgamierotin



Imuletkut (ulkopuoli) jne.
Suunhuuhteluallas (sisä- ja ulkopuoli)



Jäljennökset
esim. alginaatti, silikonit, polyeetterikumi, hydrokolloidit, polysulfidit, jne. sekä

Työkappaleet ja apuvälineet
esim. proteesi, sillat, jne., kipsimallit, vahaa, sellakkaa tai muovia olevat purennarekisterointimateriaalit, artikulaattorit, okkludaattorit, kiinnittimet, kasvokaaret, tms.

Esiteet, joissa on happoliukoimen pintakerros

esim. sementti, hammaskivi, oksidikerrokset, juoksuteainejämmät

Esiteet, joissa on kipsiä tai alginaattia oleva pintakerros

Oraalinen antiseptiikka

Pyykki

Suojaavaatteet DIN 66 083 mukaan, leikkaussalketitili, erityisesti leikkaussallilinat, leikkaussalivaatteet, työvaateet

Jätteet

Hoito- ja tutkimushuoneesta tulevat jätteet

Instrumienttien käsittely:

- Kontaminaatiolta suojatusti kuljetus käsittelypaikalle
- Karkean organismin liian poistaminen paperipyyhkeellä
- Desinfiointi ja puhdistus
 - Märkäkemiallisesti:
 - Instrumienttien asettaminen osiin purettuna ja nivelet avattuina, ilmapuhdattomasti desinfectio- ja puhdistusaineriukseen (lavitassa ultraäänikylypyyn) sisä- ja ulkopuolelta kokonaan liuksen peittoon
 - Pesu, huuhtelu vaikutusajan päätyttyä juoksevan veden alla, kuivaus
 - Koneellisesti:
 - Desinfiointi ja puhdistus puhdistus- ja desinfectiolaitteissa, kuivaus
- Puhtauden, ehjyyden tarkastus, tarvittaessa toistetaan vaihe 3
- Tunnistus
- Hoito ja kunnostus
- Toiminnan tarkastus
- Merkintä (vaatimuksen mukaan)
- Höyrysterilointi tehokkaalla, validoidulla menetelmällä:
 - Ei kriittiset instrumentit; höyrysterilointia ei tarvita
 - Puolikriittiset instrumentit; pakkaamattomina tarjottimien päällä, sihtiasat, tabletit, jalustat, kuoriat, jne. tai pakattuina sterilippakkaukseen EN 868 mukaisesti
 - Kriittiset instrumentit; pakattuina sterilippakkaukseen EN 868 mukaisesti</

* Ei kritiittiset lääkinnälliset tuotteet: lääkinnälliset tuotteet, jotka joutuvat kosketuksiin ainoastaan ehjän ihon kanssa
 ** Puolitaitoiset kritiittiset lääkinnälliset tuotteet: lääkinnälliset tuotteet, jotka joutuvat kosketuksiin limakalvojen tai sairauden vuoksi muuttuneen ihon kanssa
 *** Kritiittiset lääkinnälliset tuotteet: lääkinnälliset tuotteet, jotka tunkeutuvat ihoon tai limakalvon läpi ja joutuvat tällöin kosketuksiin veren, sisäeläinten tai sisäelimen kanssa [mukaan lukien haavat] ja veren, veritutteen käytön lääkinnälliset tuotteet, mm. steriili lääkeinetti
 Poitolaaj, joiden epäillään sisältävän tai jotka ovat sairautseen tarttuvaa sporigormiaa enkefalopatiaan (CJK, vCJK iine) on hoidettava laitoksissa, joissa on sopivat infektiot ehkäisy-mahdollisuudet.
 Uudelleen käytettävien instrumenttien ja materiaalien sikiästyksen saksella ynnä saksella, iaillo on ulkoisesti steriloitava lapudunvarmistus DIN EN ISO 13485/13488 mukaan.

ottaen huomioon työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan määräyksen BGV A1, BGR 250/TRBA 250, BGI 775 ja § 36 Infektiosuojalaki

[illegible]

* Ei kritiittiset lääkinnälliset tuotteet: lääkinnälliset tuotteet, jotka joutuvat kosketuksiin ainoastaan ehjän ihon kanssa
 ** Puolitaiten kritiittiset lääkinnälliset tuotteet: lääkinnälliset tuotteet, jotka joutuvat kosketuksiin limakalvojen tai sairauden vuoksi muuttuneen ihon kanssa
 *** Kritiittiset lääkinnälliset tuotteet: lääkinnälliset tuotteet, jotka tunkeutuvat ihoon tai limakalvon läpi ja joutuvat tällöin kosketuksiin veren, sisäeläinten tai sisäelinten kanssa [mukaan lukien haavat] ja veren, veritutteen käytön lääkinnälliset tuotteet, mm. steriili lääkeinetti
 Poitolaaj, joiden epäillään sisältävän tai jotka ovat sairautseen tarttuvaa sporigormiaa enkefalopatiaan (CJK, vCJK jne.) on hoidettava laitoksissa, joissa on sopivat infektiot ehkäisy-mahdollisuudet.
 Uudelleen käytettävien instrumenttien ja materiaalien sijoittaminen sijoittamisen jälkeen, ja on ulkoisesti steriloitava laadunvarmistus DIN EN ISO 13485/13488 mukaan.

Vastaanoton leima / päiväs / vrittäin allekirjoitus