

Impregum™ Penta™ Soft / Soft Quick

Polyeetterijäljennösaineet



Erittäin tarkka
lopputulokset

Miksi kannattaa hankkia ImpregumTM PentaTM Soft / Soft Quick polyeetterimateriaali?

Hankkiessasi 3M ESPE Impregum Penta Soft / Soft Quick materiaalin vastaanottosi jäljennösaineeksi, tarvitset vain yhden sekoituslaitteen. Samaa Impregum -materiaalia, joka viedään lusikkaan, ruiskutetaan myös hampaistolle elastomeeriruiskun avulla.



Laaja indikaatiolista

- Kruunu- ja siltäjäljennökset
- Inlay- ja onlayjäljennökset
- Irtoprotetiikan jäljennökset
- Implanttijäljennökset

PentamixTM 3




Impregum Penta Soft / Soft Quick polyeetterijäljennösaineet – tarkka jäljennös heti ensimmäisellä kerralla.

Polyeetterimateriaalien kutistumattomuus perustuu additioreaktioon, jossa ei synny haihtuvia reaktiotuotteita.

Impregum -materiaaleille ominainen sisäinen hydrofiilisyyss toimii välittömästi jo materiaalia hampaistolle ruiskutettaessa. Hydrofiilinen materiaali liukuu kosteallakin hammaspinnalla kriittisiin kohtiin muodostamatta kuplia. Nämä ominaisuudet yhdessä mahdollistavat suun oloissa erinomaisen jäljennöksen.

Hydrofiilisyyss

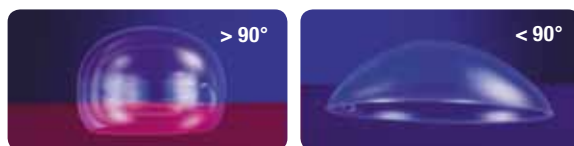

Vesipisara kovettumattomalla Aquasil jäljennösainemateriaalilla (vasemmalla, Dentsply) ja kovettumattomalla ImpregumTM PentaTM Soft jäljennösainemateriaalilla (oikealla, 3M ESPE): Impregum-materiaalilla on merkittävästi pienempi kontaktikulma, joten se on hydrofiilisempi materiaali.

Edut

Tarkin polyeetterijäljennösaine

- Vähäisen kutistumisen ansiosta tarkat, korkealaatuiset jäljennökset myös hankalissa suun olosuhteissa sekä hiontarajojen ollessa alhaalla
- Helppokäyttöinen ja tarkka elastomeeriruisku hampaistolle ruiskutettaessa - säästää aikaa ja jäljennösainetta

Miellyttävämpi potilaalle

- Raikas mintun maku
- Täydellinen jäljennös heti ensimmäisellä kerralla - ei uusintajäljennöksiä

... ja hammaslaboratoriolle

- Helppo mallista irrottaminen (kastele jäljennös vedellä ennen valamista kipsiin)
- Laboratorioiden suositteloima materiaali
- Voidaan valaa 30 min. jälkeen aina 14 päivään asti




Snap-set kovettuminen vähentää tilannestressiä.

Snap-set kovettuminen takaa sen, että materiaali ei lähde kovettumaan ennen työskentelyajan loppumista. Kovettuminen tapahtuu nopeasti verrattuna A-silikoneihin. Impregum Penta Soft Quick materiaali helpottaa työtäsi. Työskentelyaika voidaan tarkasti määritellä ennen kuin nopea, muutaman sekunnin kovettumisvaihe suussa käynnistyy. Näin työskentelyaika voidaan hyödyntää maksimaalisesti ja jäljennöksiin syntyy erittäin harvoin vääristymiä.



Snap Set

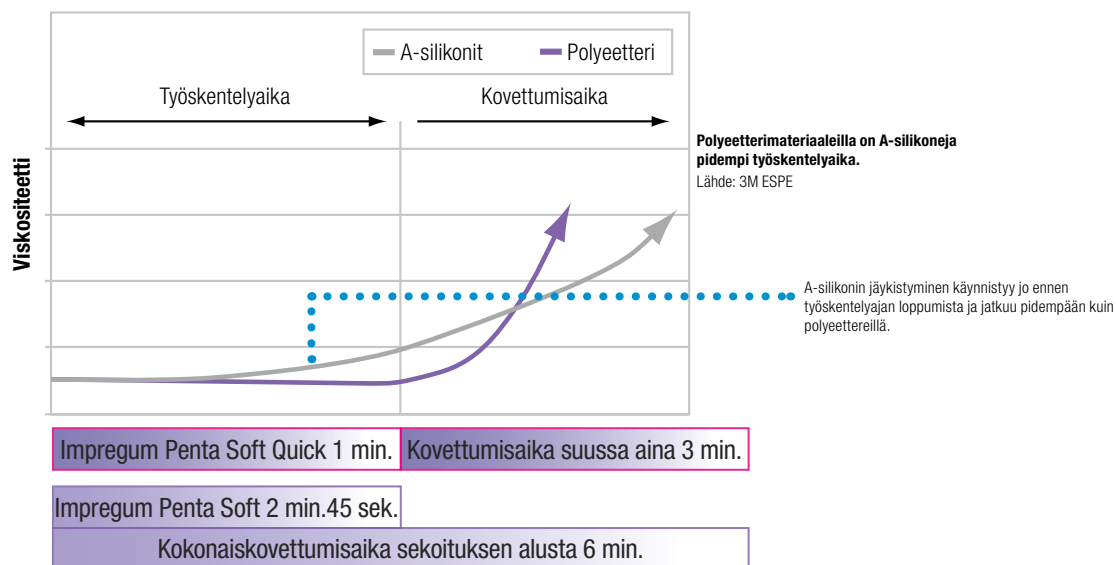

Impregum Penta Soft sopii myös yksin työskenteleville. Tällöin lusikka kannattaa täyttää ensin ennen elastomeeriruiskun täyttämistä mahdollisimman pitkän ruiskutusajan saavuttamiseksi.

Tallentaa hienoimmatkin yksityiskohdat erinomaisten flow-ominaisuuksien ansiosta.

Rakenteellinen viskositeetti = tiksotrooppisuus

- viskositeetti pienenee ulkoisen voiman kasvaessa
- kun energian tuotto (paine tai liike) keskeytetään, viskositeetti palautuu nopeasti alkuperäiseksi, eikä materiaali valu

Tehokkaan flow- ominaisuuden ansiosta Impregum™ Penta™ Soft (Quick) polyeetterimateriaali virtaa tehokkaasti vaikeimpiinkin kohteisiin. Materiaali on jäykkää lusikassa, mutta hampaistolle ruiskutettuna se muuttuu juoksevaksi puristusvoiman vaikutuksesta. Impregum -materiaaleilla on siten parhaat flow ominaisuudet koko työskentelyajan läpi.

Tilaustiedot

Tuotenro. Sisältö

Peruspakkaukset	
P31770	Pentamix™ 3 -laitteelle: Impregum™ Penta™ Soft Quick 1 base á 300 ml, 1 catalyst á 60 ml, 1 Impregum™ Penta™ Soft Quick kasetti, 10 Penta™ sekoituskärkeä (punainen), 1 Penta™ elastomeeriruisku, 1 pullo polyetteriliima á 17 m
31770	Pentamix™ 2 -laitteelle: Impregum™ Penta™ Soft Quick Sisältö, ks. yllä
P31734	Pentamix™ 3 -laitteelle: Impregum™ Penta™ Soft 1 base á 300 ml, 1 catalyst á 60 ml, 1 Impregum™ Penta™ Soft kasetti, 10 Penta™ sekoituskärkeä (punainen), 1 Penta™ elastomeeriruisku, 1 pullo polyetteriliima á 17 ml
31734	Pentamix™ 2 -laitteelle: Impregum™ Penta™ Soft Sisältö, ks. yllä
P31684	Pentamix™ 3 -laitteelle: Impregum™ Penta™ 1 base á 300 ml, 1 catalyst á 60 ml, 1 Impregum™ Penta™ kasetti, 10 Penta™ sekoituskärkeä (punainen), 1 Penta™ elastomeeriruisku, 1 pullo polyetteriliima á 17 ml
31684	Pentamix™ 2 -laitteelle: Impregum™ Penta™ Sisältö, ks. yllä

Tuotenro. Sisältö

Refillit – lusikka & wash materiaalit	
31764	Impregum™ Penta™ Soft Quick 2 x base á 300 ml, 2 x catalyst á 60 ml
31730	Impregum™ Penta™ Soft 2 x base á 300 ml, 2 x catalyst á 60 ml
31644	Impregum™ Penta™ 2 x base á 300 ml, 2 x catalyst á 60 ml
Kasetit	
P3775	Pentamix™ 3 -laitteelle: Impregum™ Penta™ Soft Quick
31775	Pentamix™ 2 -laitteelle: Impregum™ Penta™ Soft Quick
P3787	Pentamix™ 3 -laitteelle: Impregum™ Penta™ Soft
77787	Pentamix™ 2 -laitteelle: Impregum™ Penta™ Soft
P3792	Pentamix™ 3 -laitteelle: Impregum™ Penta™
77792	Pentamix™ 2 -laitteelle: Impregum™ Penta™
77871	Pentamix™ 3 jäljennösaineiden sekoituslaite
71210	Penta™ elastomeeriruisku
71512	Penta™ sekoituskärjet (punainen) 50 kpl
30600	1 pullo polyetteriliima á 17 ml



Pentamix™ 3 laitteen edut

- Sekoittaa ja annostelee kaikki 3M ESPE Penta jäljennösaineet puolta nopeammin kuin Pentamix 2 -laite
- Mahdollistaa Quick-materiaalien käytön myös rutiinijäljentämisessä, sillä lyhentynyt sekoitusaika voidaan lisätä kokonaisuudessaan hammaslääkärin työskentelyajaksi
- Homogeeninen, ilmakuplaton seos
- Hygieeninen - annostelu suoraan lusikkaan, ruiskuun tai proteesiin
- Luotettavat työskentely- ja kovettumisajat
- Materiaalin säästö - yksi ja sama sekoituskärki / jäljennöstoimenpide

3M ESPE

Hammashoitotuotteet
Lars Sonckin kaari 6, PL 90
02601 Espoo
puh. (09) 52 521
www.3MESPE.com/fi

Sinä + 3M ESPE =
Onnistunut lopputulos

3M, ESPE, Impregum, Penta ja Pentamix ovat 3M:n tai 3M ESPE AG:n omistamia tavaramerkkejä.
Aquisil ei ole 3M:n tai 3M ESPE AG:n omistama tavaramerkki.
© 3M 2011.