

ILINE

microINR-mittari ja testiliuskat

iLine-mittari on pienikokoinen kannettava, täysautomaattinen ja yksinkertainen käyttää. Laite mittaa veren INR-arvon sormenpääverinäytteestä helposti ja nopeasti – alle minuutissa.



iLine microINR -laitteen avulla voidaan helposti seurata varfariinihoidossa (Marevan-lääkitys) olevien potilaiden hoitotasapainoa missä ja milloin vain. iLine-mittari on tarkoitettu vain terveydenhoidon ammattilaisten käyttöön.

Helppo näytteenotto

Näytteeksi tarvitaan vain pieni veripisara (3 µl).

Testin otto (ks. käyttöohje):

1. Laita testiliuska laitteeseen ohjeen mukaan.
2. Ota pistonäyte sormenpäästä (tulossa oma ohje sormenpääverinäytteen ottamiseen).
3. Laita veripisara liuskaan siten, että sormi ei tuki liuskan mittauskanavaa.

iLine microINR -mittari

Suuri, selkeä näyttö. Kevyt ja pieni mittari.

Laitteessa on 200 tuloksen muisti. Mittausalue 0.8–8 INR

Ei kalibrointia. Automaattinen testikohtainen kalibrointi lisää mittauksen luotettavuutta.

iLine-testiliuskat

Kertakäyttöisiä ja yksittäispakattuja 25 kpl:n pakkauksessa.

Säilyvät huoneenlämmössä.

Miksi INR-arvon mittaaminen on tärkeää mm. ennen kirurgisia hoitotoimenpiteitä

Veren hyytymisaikaa seurataan mm. potilailla, joiden hoitoon kuuluu verenohennuslääkkeenä eli antikoagulanttina käytettävä varfariini. Varfariini pidentää veren hyytymisaikaa, ja sitä käytetään verisuonitukoksien ehkäisemiseen ja hoitoon. Lääkkeen tehoon vaikuttavat useat tekijät ja siksi hoito vaatii säännöllistä ja yksilöllistä seurantaa.

Veren hyytymisaikaa (INR) voidaan mitata kätevästi sormenpääverinäytteestä INR-pikamittarilla. INR-tulosta hyödynnetään mm. varfariinihoidossa olevien potilaiden oikean lääkeannoksen säätämiseksi.



PAKKAUSKOOT

tuotenro		valmistajan koodi
30460	iLine microINR-laite, 1 kpl	142353
30461	iLine microINR chips, yksittäispakatut testiliuskat, 25 kpl	142352
TT	iLine microINR Easy Control, testiliuos 5 x 2 ml	
36354	Lansetti MediSafe Solo 23G, 2,0 mm, 50 kpl	

maahantuojat: Orion Diagnostica Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B, PL 83, 02101 Espoo
Puh. 010 426 2709 | www.oriondiagnostica.fi

HAMMASVÄLINE