

CRYSTALTIP

Adapterien puhdistaminen ja sterilointi

Puhdistaminen:

1. Puhdista adapterin ja kolmitoimiruiskun kaikki ulkopinnat miedolla puhdistusaineella. Kuivaa nukkaamattomalla liinalla.
2. Poista kolmitoimiruiskun kuori sterilointia varten niin, että adapteri on kiinnitettynä kuoreen. Steriloi joka potilaan jälkeen.
3. Jatkokäsittely tavanomaisten autoklavointimenetelmien mukaisesti.

Sterilointi:

1. Höyryautoklavointi 15 minuuttia, 121 asteessa (paine 15 psi) takaa adapterin optimaalisen käyttöiän. Nopeita sterilointisyklejä ei tule käyttää, sillä ne heikentävät O-renkaita.
2. Kuivalämpösterilointi (kuivailmakaappi) aiheuttaa O-renkaiden nopeaa heikentymistä.

Huom! Mikäli huomaat ilman- tai vedenpaineen heikentymistä tai ilman ja veden sekoittumista ota yhteyttä jälleenmyyjään uusien O-renkaiden tai uuden adapterin hankkimiseksi.