

Erinox

Erikoispesuaine



Käyttöalue

Erinox on matalavaahtoinen erikoispesuaine instrumenttien ja hoitovälineistön puhdistukseen.

Erinox sopii hyvin

- ultraäänipesulaitteen pesuaineeksi
- endoskooppien käsin suoritettavaan puhdistukseen
- hoitovälineistön käsin suoritettavaan pesuun
- hammaslääkärin instrumenttien pesuun
- herkän lasitavaran pesuun
- laboratoriovälineiden pesuun

Erinox Erikoispesuaine irrottaa tehokkaasti epäpuhtauksia ja rasvalikaa. Se sopii hyvin myös herkkien materiaalien puhdistukseen

Ominaisuudet

Valmista ohjeen mukainen käyttölaimennos Erinox Erikoispesuaineesta. Valmis käyttölaimennos vaihdetaan päivittäin. Käsin suoritettavassa puhdistuksessa käyttölaimennos tehdään jokaista huoltotoimenpidettä varten erikseen. Pestyt välineet huuhdellaan ja kuivataan. Aseta välineet väljästi ultraäänipesulaitteeseen. Huuhtelee välineet pesun jälkeen. Tarvittaessa desinfioi välineet ennen pesua.

Käyttöohje

Erinox käyttö- ja laimennos ohjeet	%	Erinox	Vesi	Huom!
Ultraäänipesulaitteet	1 % - 2 %	10 ml 20 ml	1 l 1 l	vaihda laimennos 1-2 x pv esiliotus tarvittaessa 2 %
Käsin suoritettava pesu - endoskoopit - muu välineistö	2 % 1- 2 %	20 ml 10- 20 ml	1 l 1 l	
Peruspesu/vaikea lika	5 %	50 ml	0,95l	

Huomioitavaa	Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.			
Koostumus	Ionittomia tensidejä < 5% Polykarboksylaatia <5%	pesuteho dispergoi likaa, kompleksinmuodostaja		
pH	Tuotteen pH 10 Käyttölaimennoksen pH 10			
Varastointi	Säilytettävä huoneenlämmössä. Säilyy 3 vuotta valmistusajankohdasta.			
Valmistusmaa	Suomi			
Käyttö- ja ympäristö- turvallisuus	Tuotteen sisältämät tensidit ovat helposti biohajoavia.. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötenäinen, täysin kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali.			
Pakkauskoko/ Tuotekoodi	6x1 l pullo 3x5 l kanisteri	KiiltoClean 8113 8114	GTIN 6417964081138 6417964081145	Sailab 20070222 20070222
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi .			