

Luonnollista
joustoja ja
istuvuutta



CERASMART™270

GC: Itä

Voimia vaimentava
hybridikeraaminen
CAD/CAM-blokki

GC


CERASMART270 GC: Itä

Älykäs materiaali älykkäisiin sovelluksiin!

CERASMART270 on esteettinen hybridiblokki, jonka avulla onnistut nopeasti ja työsi tulokset kestävät pitkään. Uuden, paranneltuun nanofilleriteknologiaan perustuvan **Full Coverage Silane Coating (FSC)** -tekniikan ansiosta CERASMART270-materiaalilla on mainiot fyysiset ja esteettiset ominaisuudet. Materiaalin jyrsiminen on nopeaa ja tehokasta, ja laadukkaan, tarkkareunaisen ja optimaalisesti istuvan täytteen tekeminen onnistuu erittäin lyhyessä ajassa. Lisäksi materiaalin estetiikkaa voi elävöittää kiillottamalla tai karakterisoimalla. CERASMART270-blokki on oikea valinta, olipa kyseessä nopea onlay-täyte tai haastava kuluma.


Parempaa lujuutta kestäämään puruvoimaa

- Korkea filleritiheys FSC-teknologian ansiosta
- Paranneltu taivutuslujuus pidentää työn käyttöikää
- Vastustaa voimakkaasti lohkeilua

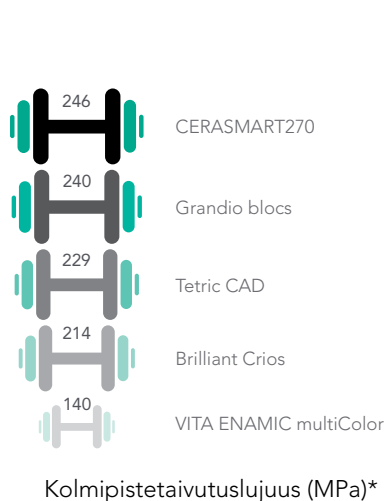


Joustavuutta vaimentamaan iskuja

- Vähemmän stressihuippuja purressa
- Materiaalin väsymisen riski on pienempi
- Sopii äärimmäisen hyvin implanttitöihin

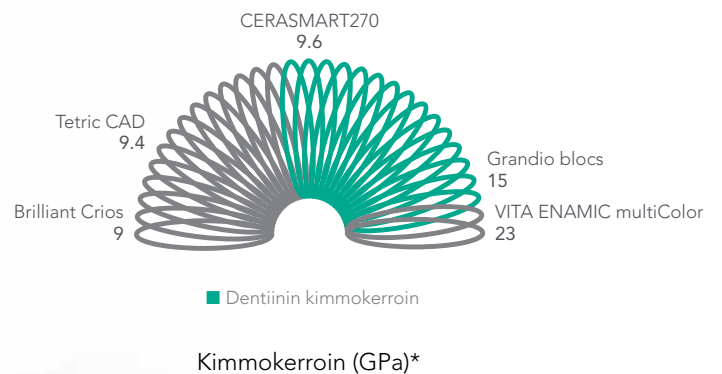

Kulutuskestävyyttä pitkäikäisiin töihin

- Erittäin kulutuskestävä
- Ihanteellinen **bruksismista** kärsiville potilaille
- Pitkäkestoinen, korkea kiilto

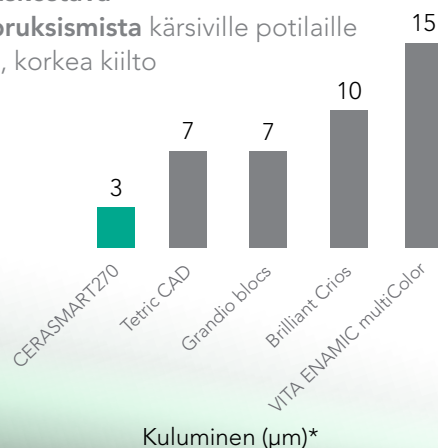

*Lähde: GC R&D, Japani, 2018. Tallennettua tietoa






Joustava ja tarkka

Tarkat hiontarajat takaavat sujuvan siirtymän



Nopealla ja helpolla jyrsimisellä saadaan erittäin tarkat ja sileät hiontarajat, jotka takaavat luonnollisen istuvuuden.

Parempi kiillottuvuus ja kestävä kiilto

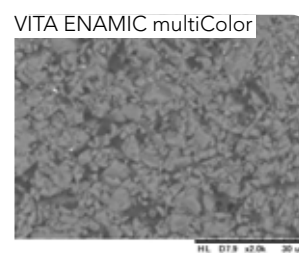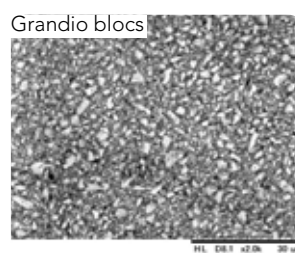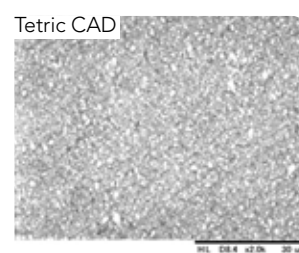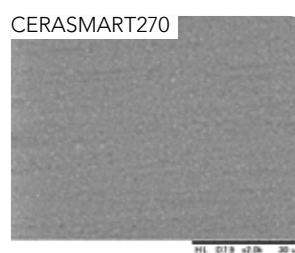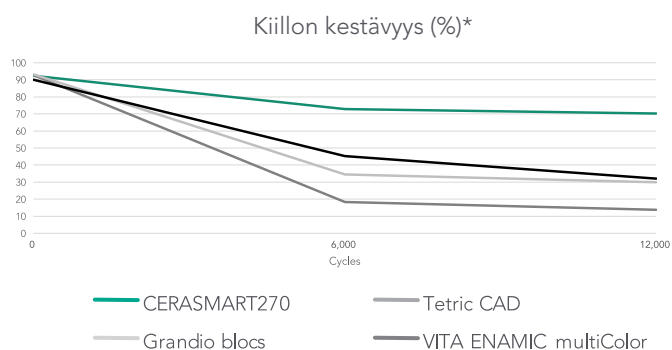

SEM-kuvia CERASMART270-töistä kilpailijoiden materiaaleihin verrattuna*

Hienojakoisen fillerikoostumuksensa ansiosta CERASMART270 on erittäin helposti kiillotettava ja pysyy ajan mittaan huomattavasti kilpailijoita kiiltävämpänä.

Luonnollisesti sulautuvat värit



Luonnollinen hymy vain yhtä väriä käyttämällä.



Optimaalinen fluoresenssi ja läpikuultavuus



Kauniit värit tekevät ulkonäöstä luonnollisen. Lämpimät, aidon näköiset sävyt, joissa fluoresenssi ja opalesenssi ovat täydellisessä tasapainossa.



Kuvat: Hammasteknikko C. Hannker, Saksa

Kaunis ja tarkka

Valitse kuinka viimeistelet

Karakterisointi

Koska väreissä kaikki näyttää paremmalta

Karakterisoi työ yhdellä siveltimen vedolla käyttäen käyttövalmista, kiiltävää ja kulutusta kestävää OPTIGLAZE color -maaliväriä.



Voit valita useasta väri vaihtoehdosta tai käyttää Clear glaze -pinnoitetta, joka tuo pintaan ainoastaan kiillon.

Kiillotus

Nopea ja helppo kiillotus

Vaikuttavaa kiiltoa jo muutamilla helpoilla kiillotusvaiheilla.



Kiillotusvaiheessa voit käyttää aivan tavanomaisia kiillotuskiekoja ja -poria.

Helpot ja nopeat esikäsitteily- ja sementointivaihtoehdot

Etsaa tai hiekkapuhalla



CERASMART270 on ainoa hybridikeraaminen materiaali, jota voi etsata fluorivetyhapolla tai hiekkapuhaltua.

Silaani tai MDP



Yleiskäyttöinen G-Multi PRIMER on kummassakin tapauksessa hyvä vaihtoehto, sillä se sisältää sekä silaania että MDP:tä.

Esikäsittele hammas



Valitse etsaustapa sen perusteella, kuinka paljon työssä on kiillettä ja dentiiniä. Levitä sidosainetta, kuten G-Premio BOND.

Sementoi



Käytä adhesiivista kiinnityssementtiä, kuten G-CEM LinkForce tai G-CEM Veneer.

Kuvat: Hammaslääkäri P. Dimitrov, Bulgaria

Sementointivaihtoehdot kestäviin töihin



G-CEM LinkForce
Universaali kaksoiskovetteinen resinisementti on ammattilaisen luottotuote.



G-CEM Veneer
Valokovetteinen resinisementti täyttää korkeat esteettiset vaatimukset.



GC Luting App -sovellus auttaa aina löytämään oikean menetelmän.

Kaunis ja helppo

Kestävää tarkkuutta. Hiipumatonta estetiikkaa.

Vertikaalisen ulottuvuuden kasvaessa

CERASMART270-materiaalin korkea taivutuslujuus ja murtoenergia sopivat täydellisesti haastaviin purentatapauksiin. Pinnan sopiva kovuusaste säästää erityisesti vastapurijoita kulumiselta, mutta takaa myös pitkäkestoisen kiillon.



Kuvat: Hammaslääkäri C. Moussally, Ranska

Yhden käynnin työt

CERASMART270-blokillä pystyt tekemään täydellisesti istuvat, kauniit ja kestävät työt yhdellä vastaanottokäynnillä. Työn jyrsiminen kestää vain muutamia minuutteja, eikä materiaali aiheuta haittaa jyrsimillesi.

Suuren parapulpaalinastoja sisältävän yhdistelmämuovitäytteen korvaaminen

Oikea valinta suurille, kuormittuville täytteille.



Kuvat: Hammaslääkäri D. Gerdolle, Sveitsi

Implanttikruunu

CERASMART270-materiaalin elastisuus on erityisen käyttökelpoinen ominaisuus, kun potilaalle asennetaan implanttikruunu.



Kuvat: Hammaslääkäri J. Tapia Guadix, Espanja

Takahampaan täyte

Pelkästään yhden värin luonnollinen sulautuminen tekee CERASMART270:sta mainion materiaalin tavanomaiseen takahampaan korjaamiseen.



Kuvat: Hammaslääkäri Y. Roos, Espanja

Hammassektorin työt


Sopii täydellisesti usean täytteen tekemiseen yhdellä vastaanottokäynnillä.



Kuvat: Hammaslääkäri G. Witkowski, Puola

CERASMART270 GC: Itä

Luonnollista joustoa ja istuvuutta

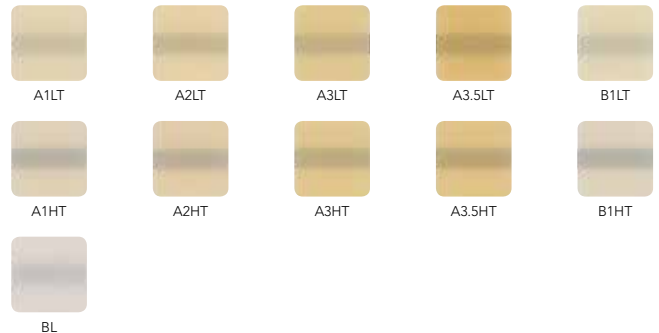

CEREC						
Väri	Koko	Tuotenro	Koko	Tuotenro	Koko	Tuotenro
A1 HT	12	12540	14	12576	14L	12612
A2 HT	12	12541	14	12577	14L	12613
A3 HT	12	12542	14	12578	14L	12614
A3.5 HT	12	12543	14	12579	14L	12615
B1 HT	12	12544	14	12580	14L	12616
A1 LT	12	12545	14	12581	14L	12617
A2 LT	12	12546	14	12582	14L	12618
A3 LT	12	12547	14	12583	14L	12619
A3.5 LT	12	12548	14	12584	14L	12620
B1 LT	12	12550	14	12586	14L	12622
BL	12	12551	14	12587	14L	12623

Universal						
Väri	Koko	Tuotenro	Koko	Tuotenro	Koko	Tuotenro
A1 HT	12	12552	14	12588	14L	12624
A2 HT	12	12553	14	12589	14L	12625
A3 HT	12	12554	14	12590	14L	12626
A3.5 HT	12	12555	14	12591	14L	12627
B1 HT	12	12556	14	12592	14L	12628
A1 LT	12	12557	14	12593	14L	12629
A2 LT	12	12558	14	12594	14L	12630
A3 LT	12	12559	14	12595	14L	12631
A3.5 LT	12	12560	14	12596	14L	12632
B1 LT	12	12562	14	12598	14L	12634
BL	12	12563	14	12599	14L	12635

Yhteensopivia tuotteita



G-CEM LinkForce



G-CEM Veneer



OPTIGLAZE color



DIAPOLISHER Paste

CERASMART270, DIAPOLISHER Paste, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, G-Premio BOND, G-Multi PRIMER ja OPTIGLAZE color ovat GC:n tavaramerkkejä. Brilliant Crios, Grandio blocs, Tetric CAD, VITA Enamic multiColor ja CEREC eivät ole GC:n tavaramerkkejä.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC NORDIC AB.
Finnish Branch
Bertel Jungin aukio 5 (6. kerros)
FIN-02600 Espoo
Tel: +358 40 9000 757
info.finland@gc.dental
<http://finland.gceurope.com>
<http://www.gceurope.com>

