

Diversey

Suma® Med Alu L10

Koneastianpesuaine kaikkiin veden kovuuksiin, soveltuu myös alumiinille

Edut

- Turvallinen alumiinille.
- Irrottaa rasvan ja kiinni kuivuneen lian.
- Sopii käytettäväksi kaikissa veden kovuuksissa.
- Tiivistetty tuote on taloudellinen käytössä.

Kuvaus tuotteesta

Suma Med Alu L10 on kaikkiin veden kovuuksiin kehitetty, tiivistetty nestemäinen koneastianpesuaine, jolla on erinomainen lianirrotuskyky.

Ominaisuudet

Suma Med Alu L10 soveltuu pesu- ja desinfektioilaitteissa suoritettavaan sairaalavälineiden, imupullojen yms. pesuun sekä pesuvärien, kaarimaljojen, portatiivien yms. puhdistamiseen huuhtelu- ja desinfektioilaitteissa. Tuote sisältää voimakasta emästä ja kompleksointiaineita, jotka takaavat erinomaisen pesutuloksen kaikissa vesiolosuhteissa. Soveltuu myös pehmeille metalleille.

Käyttöohje

Suma Med Alu L10:n annostelu tapahtuu automaattisesti Diversey Care annostelulaitteen avulla. Annostelu alkaen 1g litraan vettä veden kovuuden ollessa 0-6 °dH. Toimitamme pyydettyessä suositusannostukset eri veden kovuuksille.



Suma[®] Med Alu L10

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	hailakan keltainen neste	Suhteellinen tiheys (20 °C)	1,303
pH-arvo,1-prosenttinen käyttöliuos	11,6		

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Koostumus

NTA:ta	15 - 30 %
Metasilikaattia	< 5 - 15 %
Fosfonaatteja	< 5 %

Pakkaustiedot

Tuotenumero	Pakkauskoko	Pakkausmuoto
100854034	2x5 l	kannu
100854033	200 l	tynnyri

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Annostellaan annostelulaitteen avulla. Huuhtelee ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Suojakäsineiden ja kosteusvoiteen käyttö on suositeltavaa. Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön liittyvistä yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diversey Care ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.

Hyväksynät

Lääkintälaitedirektiivin (93/42/EEC) mukainen CE-merkki, pohjoismainen Joutsen-ympäristömerkki.

Ympäristötiedot

Ohjeiden mukaisesti käytettynä Suma Med Alu L10 soveltuu useimmille sairaaloissa tavattaville, tuotteen alkalisuuden kestäville materiaaleille, myös alumiinille.