

ONE FLARE

Tekninen tietolomake

Instrumentti			ISO-standardin mukainen värikoodi	Käytettävissä oleva pituus	Kädensija
Nimi	Nro	Kartioisuus			
One Flare	25	9% .09	väritön	17 mm	Classics

Epästeriili: One Flare -instrumentteja myydään ainoastaan steriilisti pakattuina

Käytetyt materiaalit:

Kädensija: Metalli

Terä: Nikkelin ja titaanin seos

Suosittelun käyttö kertojen enimmäismäärä tavanomaisissa olosuhteissa:

Steriilit instrumentit: useita kertoja, jos instrumentissa ei ole näkyviä vaurioita

Epästeriilit instrumentit: One Flare on myynnissä ainoastaan steriilisti pakattuna.

Kertakäyttöisten instrumenttien uudelleenkäyttö:

Jos kertakäyttöistä instrumenttia käytetään uudelleen, vaarana on, että pesutulos ei instrumenttia käsiteltäessä ole riittävä, tai että instrumentti rikkoutuu, kun sitä käytetään uudelleen.

Alustava desinfiointi, pesu ja sterilointi:

Hygieniasyistä ja potilasturvallisuuden takaamiseksi kaikki MICRO-MEGA®:n markkinoimat juurikanavainstrumentit on desinfioitava, pestävä ja steriloitava, ennen kuin niitä käytetään potilastyössä (steriilejä instrumentteja lukuun ottamatta).

Toimenpidettä suositellaan kaikille instrumenteille:

- ennen epästeriilien instrumenttien ensimmäistä käyttökertaa
- uudelleen käytettävien instrumenttien kohdalla aina ennen seuraavaa potilasta.

Alustava desinfiointi: Ennen kuin instrumentit upotetaan desinfiointihauteeseen, ne on lajiteltava tyyppin ja materiaalin mukaan niin, että vältetään elektrolyysiltä ja korroosiolta. Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita ja käytä valmistajan suosittelemia pitoisuuksia (liian voimakas pitoisuus voi vahingoittaa materiaaleja). Noudata liottamista koskevaa aikasuositusta (älä jätä instrumentteja desinfiointihauteeseen yön ajaksi). Käytä ainoastaan juurikanavainstrumenteille suositeltuja desinfiointiaineita (älä käytä aineita, jotka sisältävät fenolia, vetyperoksidia, natriumkarbonaattia tai natriumhypokloriittia tai äärimmäisen voimakkaita, hammasporille tarkoitettuja erikoistuotteita).

Huom. MICRO-MEGA® on testannut tavallisimpia markkinoilla olevia desinfiointiaineita. Koska saatavilla on suuri määrä tuotteita, ainetta on hyvä ensin testata tai kysyä tarkempia tietoja desinfiointiaineen valmistajalta.

Pesu: Harjaa instrumentit, jotta niihin ei jää hammasperäistä ainesta. Älä pese instrumentteja erillään ultraäänihauteessa. Älä käytä natriumkarbonaattiin perustuvia liuoksia, elohopeasuolaa sisältäviä liuoksia tai emäksisiä tai happamia liuoksia.

Huuhtelu: Huuhtele instrumentit runsaalla demineralisoidulla tai tislatusella vedellä, jotta vältetään korroosiolta ja muutoksilta steriloinnin aikana. Kuivata kuivalla ilmalla. Hävitä muotoaan muuttaneet instrumentit (rikkinäiset, kiertyneet ja vääntyneet instrumentit sekä instrumentit, jotka ovat vähällä mennä rikki).

Pakkaaminen: Laita instrumentit EN ISO 11607 -standardin mukaiseen sterilointipussiin, jota käytetään höyryautoklaavissa 134 °C:n lämpötilassa 2,2 baarin paineessa 18 minuutin ajan. Noudata sterilointipussin valmistajan ohjeita.

Sterilointi: Steriloi sterilointipussiin pakatut instrumentit. Käytä (kylläistä höyryä käyttävää) autoklaavia 134 °C:n lämpötilassa 2,2 baarin paineessa 18 minuutin ajan.

Säilytys: Tarkista sterilointipussin eheys ennen instrumenttien ottamista käyttöön.

HAMMASVÄLINE