



HYDENT | Väritikku

Hydent -väritikut korottavien kohtien sekä painokohtien määrittämiseen proteesista. Erittäin tarkka ja helpokäyttöinen. Taivutettavan varren ansioista sopii hyvin myös vaikeapääsyisille alueille. Väritikun harjaosa on valmistettu nylonista ja se sisältää vesiliukoista, violettiä väriä.

302373 Väritikku Hydent sticks, 100 kpl

Käyttöohje:

1. Poista proteesi/koje
2. Paikallista ongelma-alue
3. Kostuta ongelma-alue (kostuta alue syljellä tai tarvittaessa kevyellä vesisuihkauksella)
4. Kosketa ongelma-aluetta kevyesti Hydent -tikun päällä (tikkua voi taivuttaa, helpottaa vaikeapääsyisten aluieden saavuttamista)
5. Aseta proteesi/koje uudelleen paikalleen
6. Poista proteesi/koje
7. Paikanna värin jättämä korkea kohta
8. Poista värin jättämä korkea kohta
9. Aseta proteesi/koje uudelleen paikalleen
10. Tarpeen vaatiessa toista toimenpiteet

Hydent Stick sisältää keinotekoista väriainetta. Varmista, että potilaalla ei ole allergioita. Kaikki ainesosat ovat turvallisia, mikäli potilas nielee.

HAMMASVÄLINE

Asiakaspalvelu p. 010 588 6100 | tilaukset@hammasvaline.fi | kauppa.hammasvaline.fi